

본 설명서를 반드시 읽은 후 사용하시고,  
다 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

# 이동변기

## 사용 설명서

- **제품명** : 이동변기 (APT-101)
- **종 류** : 원목가구형 이동변기
- **제조국/원산지** : 한국
- **제조년월일** : 제품 및 포장박스에 표기



- 단체표준 규격명 : 이동변기
- 규격번호 : KSPA3002
- 단체표준 인증단체 : KSPA
- 인증번호 : 제74호(20090409-2)
- 제조년월일 : 제품박스에 별도표시
- 제조인증업체명 : (주)아시아엠이

[품질보증] 본 제품은 단체표준인증 단체인 당 협회에서 품질을 보증함  
**한국고령친화용품산업협회**



이 복지용구는 고령자를 배려한  
고령친화 우수제품입니다.

Code : T03030060001

보건복지가족부지정 고령친화산업지원센터 **KHIDI** 한국보건산업진흥원

※제품문의 및 반품, AS 신청(소모품) 문의  
■ 주문 및 상담시간 : 평일 오전9시~오후6시

의료기기 복지용구 제조 전문업체  
**(주)아시아엠이**  
ASIA MEDICAL ELECTRONICS

경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 469 (우)17600  
Tel : (031)677-7522(代) Fax : (031)677-2689  
[www.ame.co.kr](http://www.ame.co.kr)

# AME 원목가구형 이동변기

## ■ 제품구성품<총 11종>


- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. 원목 본체 1ea          | 2. 원목 등받이 1ea |
| 3. 원목 좌우팔걸이 2ea       | 4. 보조팔걸이 1ea  |
| 5. 변기통 1set           | 6. 변좌 깔판 1ea  |
| 7. 변좌 1ea             | 8. 드라이버 1ea   |
| 9. 등받이 2cm 볼트&넛트 4set |               |
| 10. 팔걸이 볼트 6×35mm 6ea | 11. 설명서 1ea   |



## ■ 이동변기 조립방법

이동변기는 본체, 등받이 그리고 팔걸이 세부분으로 나누어져 있습니다. 사용시 세부분을 조립하여 사용하시면 됩니다.

- 먼저 이동변기 본체를 바닥이 고르고 경사지지 않은 곳에 놓고 제품의 구성품들을 바닥에 고루 놓아주세요.
- 본체의 변좌 밑에 있는 변기뚜껑을 열면 드라이버와 볼트set가 들어있는 비닐봉투와 보조손잡이를 확인 후 꺼내주세요.
- 등받이를 본체와 연결하여 주시고 봉투 안에 있는 등받이 볼트/넛트 4set를 이용하여 장착하여 주시기 바랍니다.
- 다음으로 좌우팔걸이를 장착하시면 되는데 이때 팔걸이 볼트를 위에서 두번째 구멍(일반 체형 기준)에 장착하시기 바랍니다.(체형에 따라 4단으로 높이 조절 가능)
- 마지막으로 남은 보조팔걸이는 필요 시 한쪽 팔걸이를 해체 후 보조팔걸이를 위에서 두번째 구멍과 세번째 구멍에 볼트(팔걸이 분리 시 나온 볼트 3개 중 2개)로 장착하여 주시기 바랍니다.

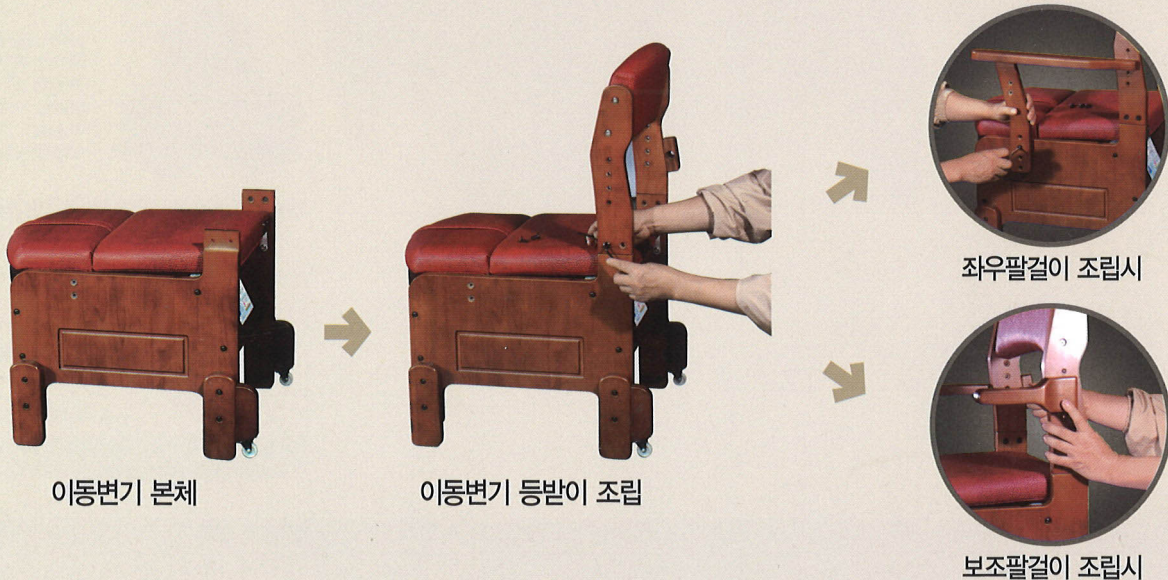

### \*보조팔걸이는 좌우팔걸이와 동시에 장착할 수 없습니다.

보조팔걸이는 침대에서 이동변기로 이동 시 긴 팔걸이의 걸림현상을 방지하여 편하게 이동변기로 이동하기 위한 간이 팔걸이 입니다. 단 변기의 한쪽에만 설치가 가능하므로 유념하여 사용하시기 바랍니다.



## ■ 제품사양

- 중 량 : 16.2Kg
- 재 질 : 천연목, 우레탄, 합성피혁, 폴리프로필렌
- 사이즈 : 47cm(폭)×55cm(길이)×85/88/91cm(높이)
- 변기통의 용량 : 9ℓ
- 최대사용자체중 : 100Kg

## ■ 제품특징

- 좌면의 높이(3cm/3단계) 및 팔걸이의 높이(3cm/4단계) 조절가능
- 원목의 수려한 디자인으로 정서적 안정성과 견고한 안전성 제고.
- 캐스터 부착으로 이동 시 편리.
- 내열소재 변기통으로 내열소독 가능.

## ■ 제품의 설치 및 사용방법

1. 이동변기를 이동 할 때는 앞쪽을 살짝 들고 뒤쪽의 캐스터를 이용하여 이동하여 주십시오. 이때 변기통이 비어 있는지 반드시 확인하여 주십시오.
2. 사용 전에 변기통에 소취제와 물을 희석한 용액을 약 1ℓ 정도 부어놓고 사용하면 냄새방지에 도움이 됩니다.
3. 사용 시 시트를 들어 뒤로 밀어서 시트고정손잡이로 고정하거나 뒤로 밀어 젖힙니다.
4. 변좌를 들고 변기통의 뚜껑을 들어낸 다음, 다시 변좌를 내립니다.
5. 편안한 자세로 변좌에 앉아 용변을 봅니다.
6. 사용이 끝나면 다시 변좌를 들고 변기통의 뚜껑을 닫은 다음, 변좌를 내리고 시트를 내립니다.
7. 변기통의 오물은 시트와 변좌를 들고 변기통의 손잡이를 잡고 들어 내어 화장실로 가져가서 변기에 버리고 세척합니다.
8. 변기통의 오물버림 없이 2회 이상 사용하지 마시고, 변기통은 세척 및 주기적인 열탕소독을 해 주십시오.

# AME 원목가구형 이동변기



## ■ 사용상 주의사항

- 지면이 고르지 않거나 경사진 곳에 놓고 사용하지 마십시오. 전도되어 사용자가 상해를 입을 수 있습니다.
- 사용자가 자신이 몸을 잘 가누지 못할 경우 이동변기를 침대 등에 고정하거나 간병인이 개호하여 주십시오. 사용자 및 이동변기의 전도 등으로 사용자가 상해를 입을 수 있습니다.
- 제품을 임의로 개조하거나 용도이외의 목적으로 사용하지 마십시오. 파손이나 고장 및 사고의 원인이 됩니다.
- 화기 근처에 놓지 마십시오. 변형이나 화재의 원인이 됩니다.
- 최대 사용자 체중(100kg이하)을 초과하여 사용하지 마십시오.
- 등받이를 잡고 앉거나 일어서지 마십시오. 넘어질 우려가 있습니다.
- 사용자 또는 사람이 앉은 채로 캐스터로 이동시키지 마십시오. 넘어질 우려와 고장의 원인이 됩니다.
- 본체 이동 시에는 반드시 변기통이 비워졌는지 확인 하십시오. 내용물이 쏟아져, 더럽혀질 우려가 있습니다.

## ■ 제품의 보관 및 손질방법

변기통은 증기 및 열탕 등의 내열소독(내열온도 120℃) 또는 세척솔 및 세제 등을 사용하여 세척하시고, 응급상황 발생 시 AS센터로 연락주시기 바랍니다.

### \*교환 및 반품이 가능한 경우

- 상품 및 서비스를 공급 받으신 날로부터 7일 이내
- 재화 등의 내용이 표시, 광고 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우

### \*교환 및 반품이 불가능한 경우

- 이용자에게 책임 있는 사유로 재화 등이 멸실 또는 훼손된 경우
- 이용자의 사용 또는 일부 소비에 의하여 재화 등의 가치가 현저히 감소한 경우

### \*A/S 내용 및 기간

- A/S 내용 : 전체 (사용자의 부주의로 인한 파손이나 훼손 시 사용자가 비용 일부 부담)
- A/S 기간 : 1년 (사용자의 부주의로 인한 파손이나 훼손 시 사용자가 비용 일부 부담)

### \*소비자 피해보상

- 소비자 피해보상 내용 : 본 제품은 소비자 피해보상 규정에 의거하여, 교환 및 보상을 받을 수 있습니다.



의료기기 복지용구 제조 전문업체

**(주) 아시아에이**  
ASIA MEDICAL ELECTRONICS

경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 469 (우)17600  
Tel : (031)677-7522(代) Fax : (031)677-2689  
[www.ame.co.kr](http://www.ame.co.kr)

