


이동변기

Portable toilet



사용설명서

APT-210

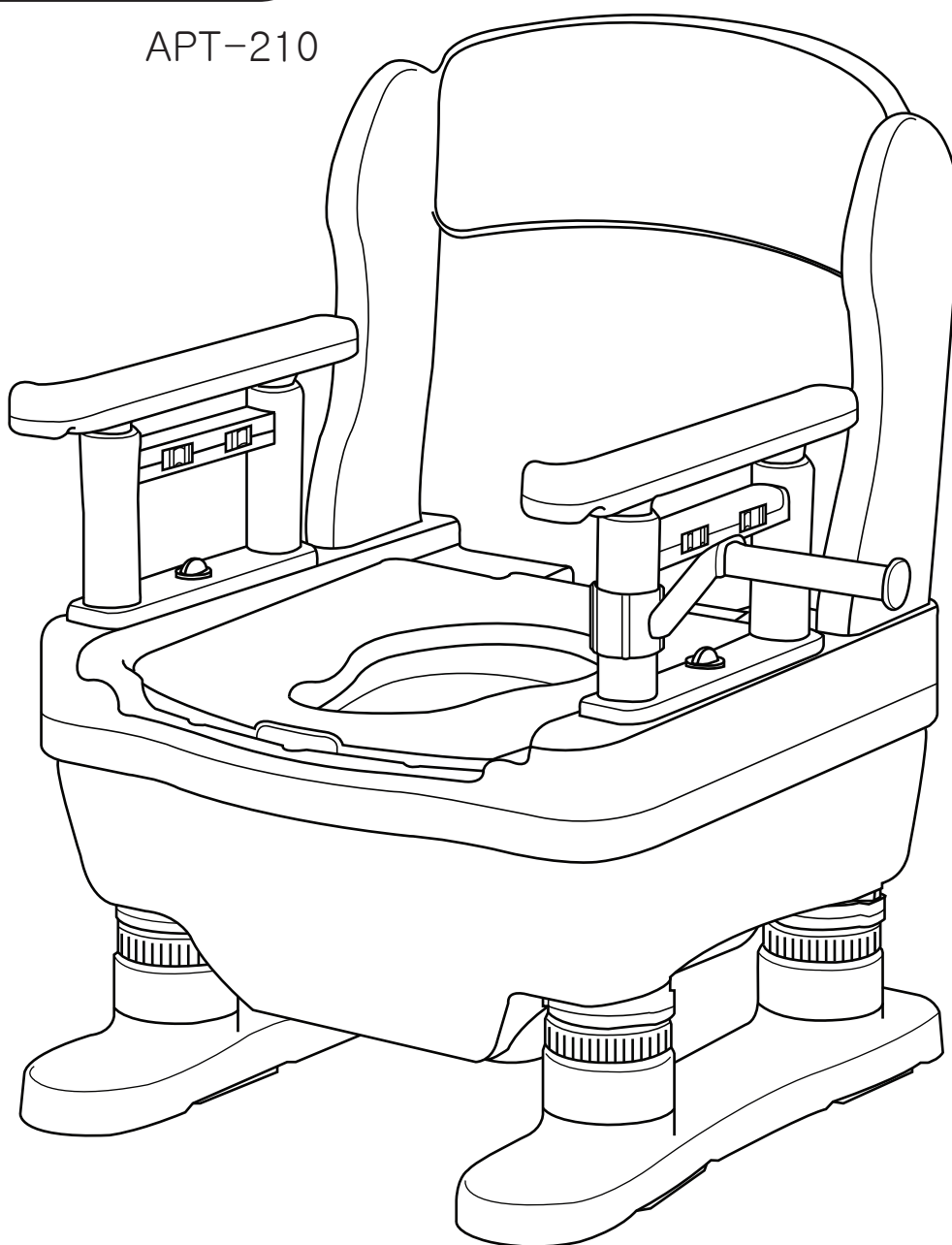


안전동작하중
95kg 이하

이 사용설명서를 반드시 읽은 후 사용하시고, 다 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

- 사용전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오 !
- 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.
구입일, 판매점 등을 기입하고 확인 해 주십시오.

제품 구성

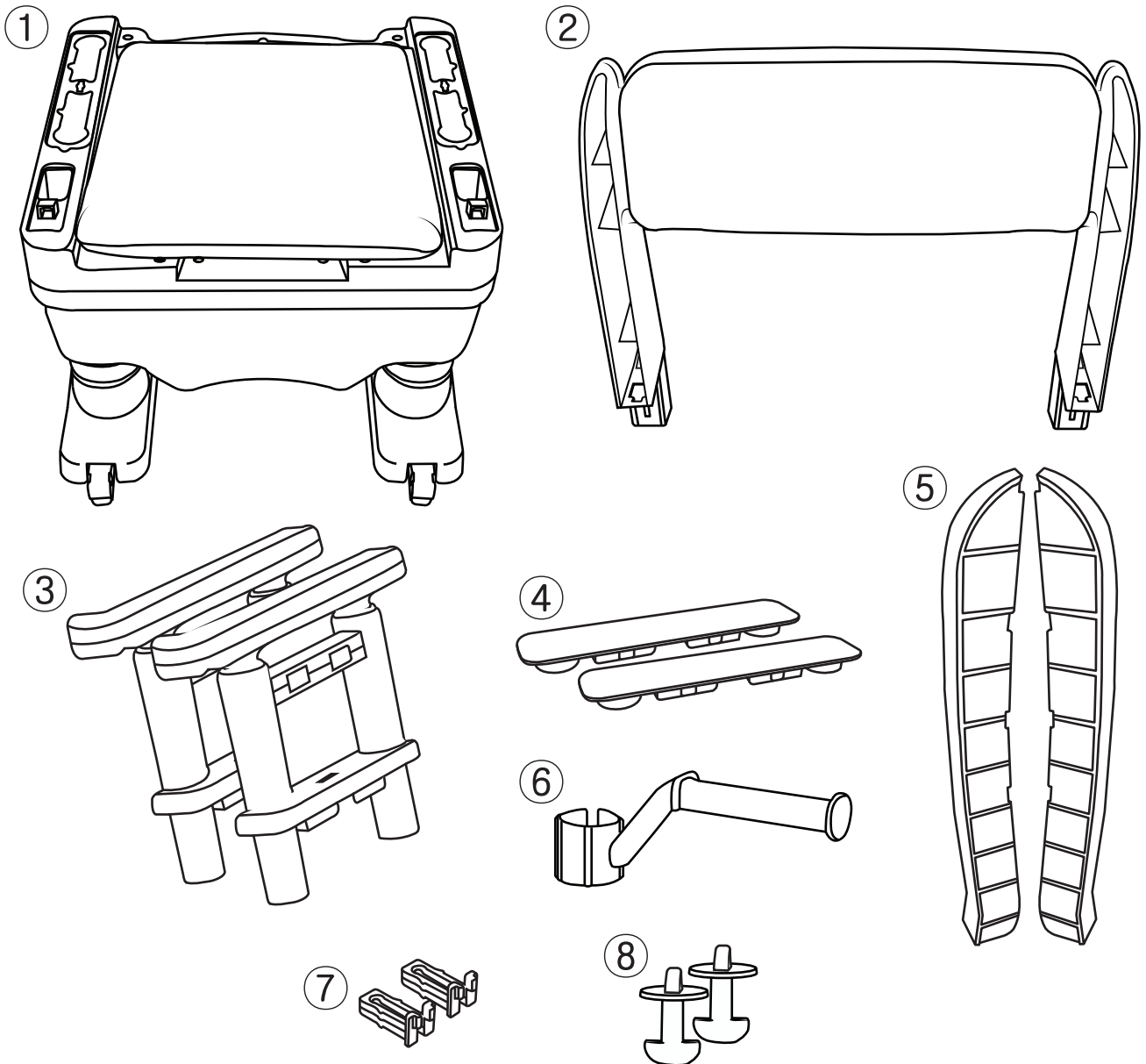

① 이동변기 본체 1ea

⑤ 등받이 커버 2ea

② 등받이 1ea

⑥ 휴지걸이 1ea

③ 팔걸이 2ea

⑦ 등받이 고정부 2ea

④ 팔걸이 덮개 2ea

⑧ 팔걸이 고정부 2ea

안전을 위한 주의사항

반드시 지켜 주십시오 !

사용자 및 그 외의 사람에게 상해, 재산상의 피해를 사전에 방지하기 위해 안전에 관련된 중요한 사항들을 기재하고 있으니 반드시 지켜 주십시오.

그림기호의 의미는 아래와 같습니다.



이 그림기호는 반드시 지켜야 할 강제사항을 의미합니다.



이 그림기호는 해서는 안되는 금지를 의미합니다.



경고

표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망 및 피해가 발생할 가능성이 있는 경우.



주의

표시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상 및 피해가 발생할 가능성이 있는 경우.

⚠ 경고



이동변기외 사용금지

이동변기 이외의 용도로 사용하지 마십시오. 제품파손 및 상해의 원인이 됩니다.



변좌 위에 올라서거나 신체의 일부만을 걸치고 사용하지 마십시오.

전도 등으로 상해를 입을 수 있습니다.



상체의 중심을 한쪽으로 편중하여 앉거나 팔걸이의 어느 한쪽에 편중하여 체중을 가하지 마십시오.

전도 등으로 상해를 입을 수 있습니다.



상체를 후방으로 크게 젖혀서 등받이에 무리하게 체중을 가하지 마십시오.

전도 등으로 상해를 입을 수 있습니다.



임의로 분해, 개조, 수리하지 마십시오.

제품기능의 비정상 등으로 상해를 입을 수 있습니다.



앉은 상태에서 무리하게 흔들지 마십시오.

전도 등으로 상해를 입을 수 있습니다.



체중이 95kg을 초과하는 분은 사용하지 마십시오.

제품파손과 전도 등으로 상해를 입을 수 있습니다.



제품 사용 중 및 이동 시에 심한 충격을 가하지 마십시오.

캐스터를 사용하여 이동 시 요철 및 단차가 있는 곳에서 이동하지 마십시오.

제품의 변형 및 파손으로 사용 중 상해를 입을 수 있습니다.



높이조절부 장착및 조절 시 다리의 높이가 동일하게 되도록 하십시오.

높이가 다를 경우 전도 등으로 상해를 입을 수 있습니다.



바닥면이 평평하고 안정된 곳에서 사용 하십시오.

불안정한 바닥면에서 사용 할 경우 전도 등으로 상해를 입을 수 있습니다.

⚠ 주의

- ❌ 팔걸이나 등받이를 지팡이처럼 지지목적으로 사용하지 마십시오.
전도 등으로 상해를 입을 수 있습니다.
- ❌ 화기에 가까이 하지 마십시오.
화재 및 변형의 원인이 됩니다.
- ❌ 직사광선을 피하고 실외에 방치하지 마십시오.
변색 및 제품열화의 원인이 됩니다.
- ❌ 제품세척 및 소독을 위하여 염소계 및 신나, 크레졸 등과 산, 알칼리계 세제 등을 사용하지 마십시오.
제품열화, 변형 및 파손의 원인이 되고 이로 인해 상해를 입을 수 있습니다.
- ❌ 좌면을 올리고 내릴 때 좌면과 본체사이에 손가락이 끼지 않게 하십시오.
손가락 등에 상해를 입을 수 있습니다.
- ❗ 이동변기 각 체결부위 등이 확실하게 체결되어 있는지 정기적으로 확인 해 주십시오.
고정이 불안정 할 시 전도 등으로 상해를 입을 수 있습니다.
- ❗ 변좌가 수평을 이루고 있는지 수시로 확인 해 주십시오.
불안정한 좌면에서 사용 할 경우 전도 등으로 상해를 입을 수 있습니다.


- 오물 처리 시 변좌덮개 및 변좌를 열고 변기통을 들어내어 화장실 변기에 버립니다.

- 용변을 보신 후 방치하면 냄새로 인하여 사용자에게 불쾌감을 줄 수 있으니 바로바로 버려 주십시오.

- 변기통은 중성세제 등을 사용하여 세척하여 주십시오.

- 필요 시 냄새 중화제 등을 희석한 물을 변기통에 넣어서 사용하셔도 됩니다.

■ 제품치수(단위 : mm)

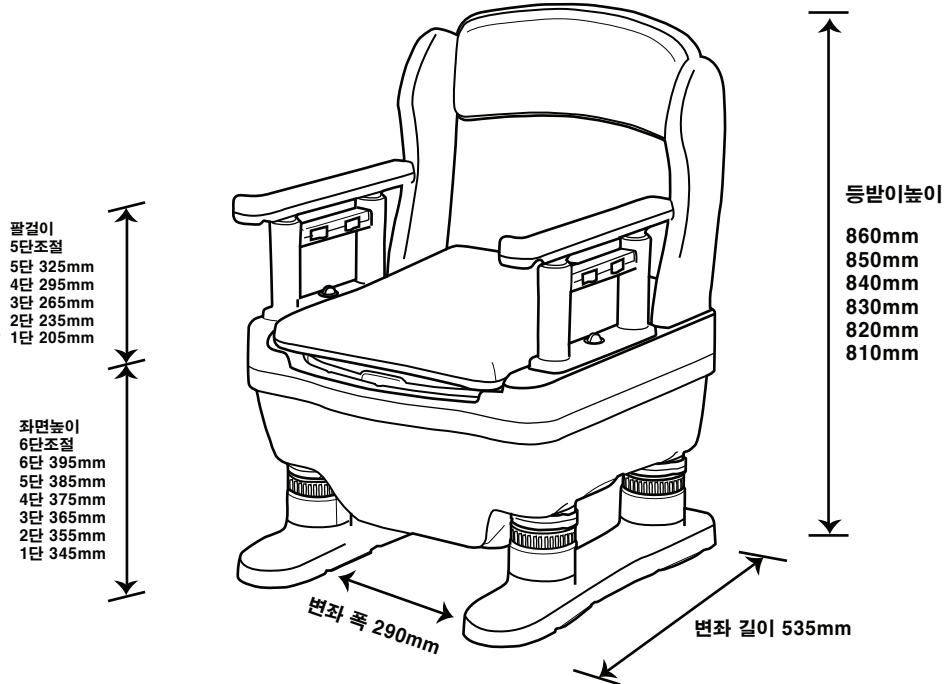

제품규격


■ APT-210

제 품 명	이동변기
모 델 명	APT210
제품유형	이동변기
중 량	13.8kg


구성부품	재 질
외 피	면
내 피	폴리에스테르
충 전 제	라텍스라이크폼

사용 설명서


반드시 설명서를 숙지하신 후에 사용해 주세요.

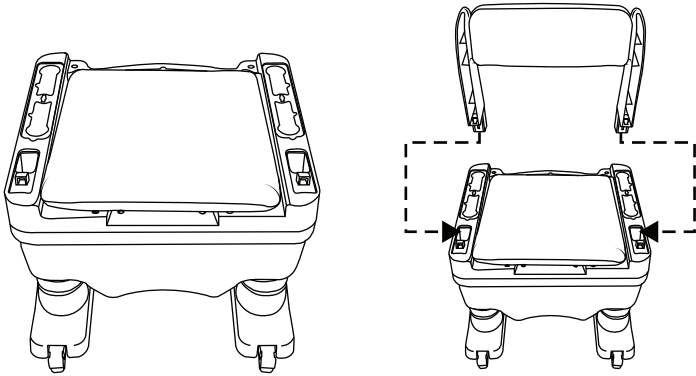


- ① 박스에 포장된 본체와 각 부품들을 꺼낸 후 뒷바퀴가 보이도록 본체를 돌립니다.
- ② 등받이를 옆 그림과 같이 화살표의 구멍에 맞추어 조립합니다.

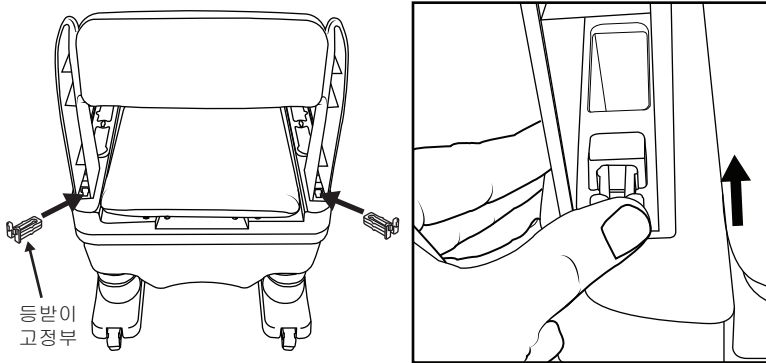

- ③ 등받이를 조립 후 등받이 고정부를 이용하여 움직이지 않도록 고정합니다.

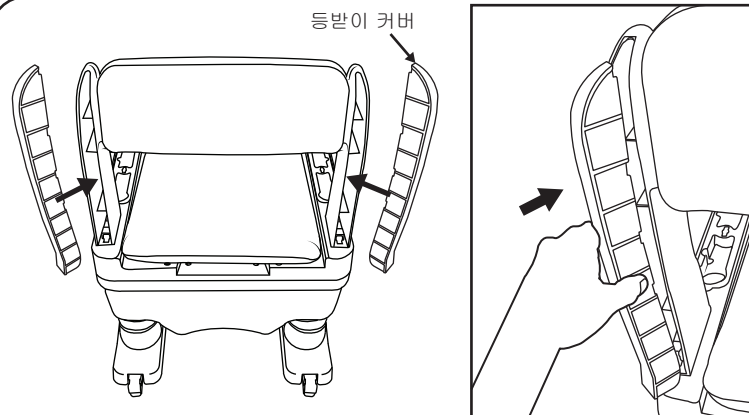


- ④ 등받이를 커버를 이용하여 깔끔하게 마무리합니다. (등받이가 좌,우가 다르기 때문에 잘 확인하여 주세요.)

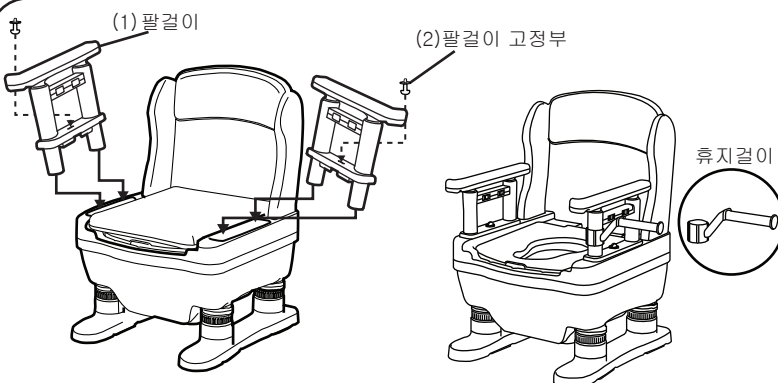


- ⑤ 팔걸이 조립시 먼저 양쪽 팔걸이를 구멍에 맞도록 끼우고, 옆 그림과 같이 팔걸이 고정부를 이용하여 고정시키고 오른쪽으로 돌려줍니다.
- ⑥ 휴지걸이는 팔걸이 기둥의 원하는 위치에 끼워넣으면 됩니다.

사용 설명서


반드시 설명서를 숙지하신 후에 사용해 주세요.

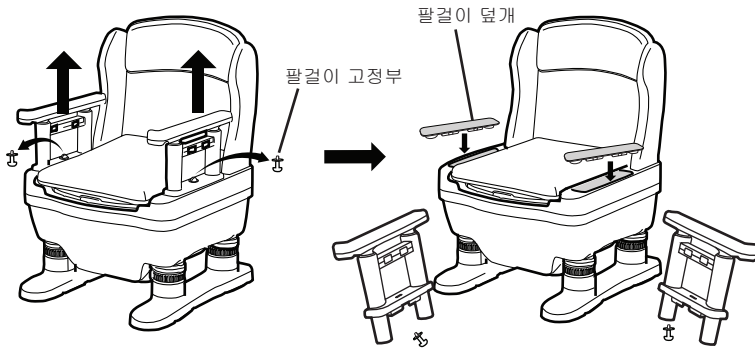


- ⑦ 침대사용 및 팔걸이를 분리할 때 팔걸이 고정부를 해제시킨 후 분리 합니다.
- ⑧ 분리한 팔걸이 자리에 팔걸이 덮개로 구멍에 맞추어 조립합니다.

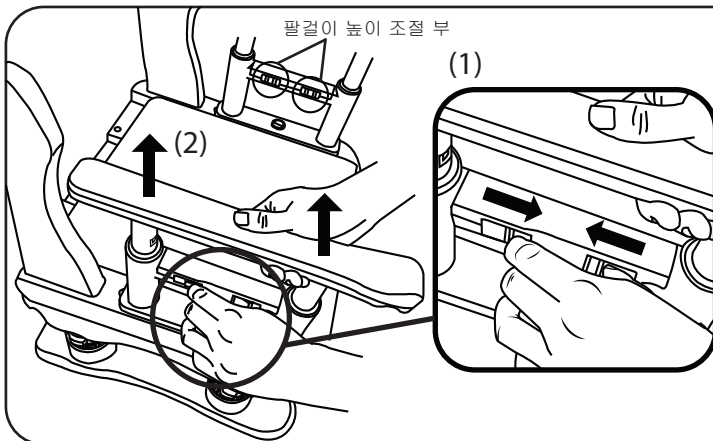

- ⑨ 팔걸이를 조절 할 때는 팔걸이 높이 조절 부를 이용하여 옆 그림과 같이 높이를 조절 합니다.

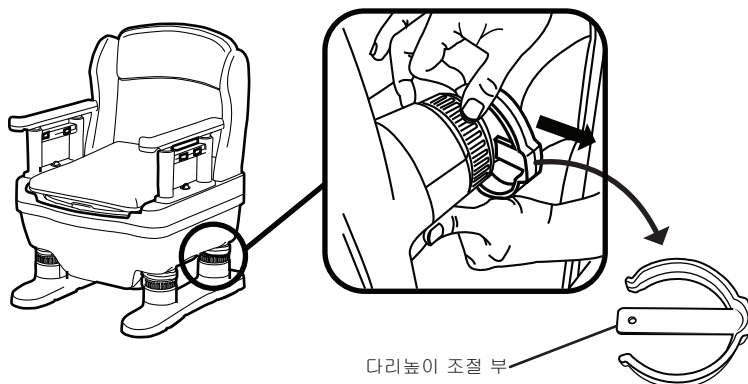


- ⑩ 다리높이를 조절 할 때는 먼저 다리높이 조절 부를 양손으로 당겨서 빼 줍니다.

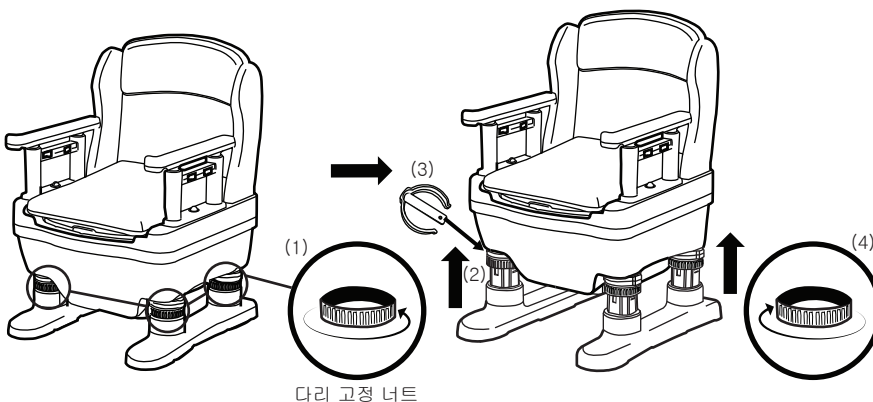


- ⑪ 다리 고정 너트를 시계 반대방향으로 완전히 돌린 후 자신의 키에 맞도록 조절 해 줍니다.
- ⑫ ⑪번을 한 후 다리높이 조절 부로 고정 시키고 다리 고정 너트를 시계방향으로 돌려서 완전하게 고정시켜 줍니다. (옆의 순서를 참고해주세요)

사용 설명서


반드시 설명서를 숙지하신 후에 사용해 주세요.

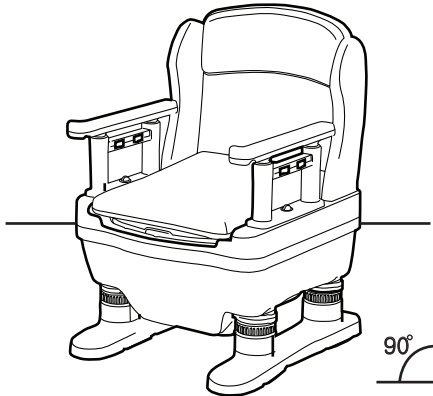


- ⑬ 변기가 한쪽으로 편중되지 않도록 바닥면이 평평하고 안정된 곳에 위치합니다.
(울퉁불퉁한 곳이나 경사면에 배치 할 경우 오물이 새거나 용변중 다칠 수 있습니다.)

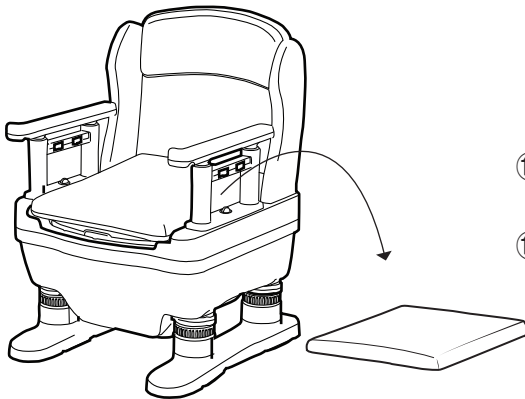

- ⑭ 용변을 보기위해 시트를 다른곳으로 옮깁니다.
⑮ 시트를 옮긴 후 변기 뚜껑을 열고 용변을 봅니다.

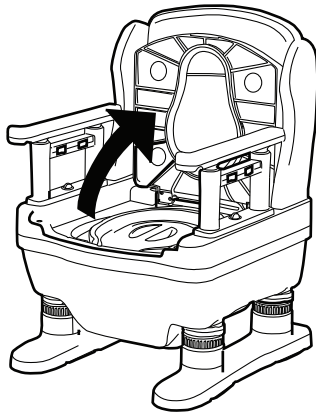

- ⑯ 용변을 다 본 후 좌면을 위로 올립니다.
(올린 좌면이 갑작스럽게 내려오지 않도록 덴퍼를 부착하여 천천히 내려오도록 설계 되었습니다.)
⑰ 변기통을 꺼낸 후 오물을 화장실에 가져가서 변기에 버리고 세척합니다.

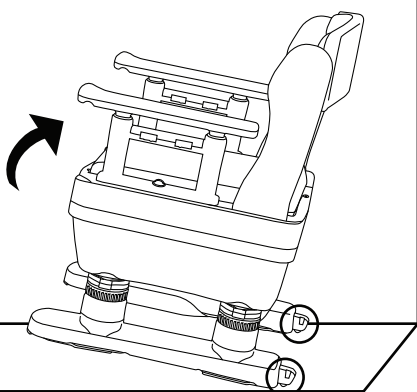

Tip1

이동이 쉽도록 하단 뒤쪽에 이동식 캐스터가 부착이 되어 있으므로, 이동시에는 쪽으로 기울여서 움직일 수 있습니다 .

- 당사 제품의 소비자분쟁해결기준은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거합니다.
- 당사 제품의 보증기간은 1년입니다.

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장으로 중요한 수리를 요하는 경우.		제품교환 또는 환불	해당 없음.
구입 후 30일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장으로 중요한 수리를 요하는 경우.		제품교환 또는 무상수리	해당 없음.
수리 가능	동일 하자로 2회째 고장 발생 시.	무료수리	유료수리
	동일 하자로 3회째 고장 발생 시.	교환 또는 환불	유료수리
	서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시.	교환 또는 환불	유료수리
수리 불가	부품 보유기간 이내에 수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시.	교환 또는 환불	정액 감가상각 후 교환
	부품 보유기간 이내에 수리용 부품이 없어서 수리 불가능 시.	교환 또는 환불	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환불
소비자 과실	수리가 가능한 경우.	유료수리	유료수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우.	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	해당 없음.
천재지변에 의한 고장이 발생 하였을 경우.		유료수리	유료수리
사용상 정상마모 되는 소모성 부품을 교환하는 경우.			
기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부원인으로 인한 경우.			

제품보증서

제 품 명 :

모델명 :

구입일 :

이
아
그

고객명 :

전화번호 :

판매점 :

전화번호 :

- 수리 의뢰 시 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 규정된 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 무상보증기간은 구입일로 부터 산정되므로 판매점 등에서 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다. 구입일자 미기재 및 확인이 곤란한 경우 제조년월일로 부터 3개월이 경과한 날을 기준으로 품질보증기간을 기산합니다.
- 당사의 부품 보유기간은 6년입니다.



(주)아시아엠이 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 469 (우)456-843
고객상담실 031-677-7522