

이동변기(SK-660)

사 용 설 명 서

본 제품을 사용하기 전 반드시 사용설명서를 읽은 후 사용하시고, A/S 및 사용방법, 주의사항을 위하여 설명서를 보관하시기 바랍니다.

각 부의 명칭



제품 기본 사양

크 기	전체크기	520 × 540 × 870(mm)
	변좌높이	420(mm)
	좌석크기	440 × 460(mm)
무 게	중 량	8.9kg
	최대 사용자 무게	100kg
재 질	Body	알루미늄 합금, 분체도장 투명코팅
	의 자	PU 및 고무합성 재질
	등 받 이	PE브로몰딩
	바 퀴	3" 브레이크 장착
	변 기 통	PP, 4000cc

기능 및 용도

1. 본체 등은 알루미늄으로 되어있어 세척 뒤 녹 발생 등의 변형이 없습니다.
2. 접이식으로 부피가 작아서 보관이 용이하고 사용 후 조작이 간편합니다.
3. 의자시트의 탈, 부착이 가능하며 사용 중 시트만 분리하여 세척을 할 수 있어 위생적입니다.
4. 뒷바퀴의 부착으로 이동이 용이하며, 사용 후 보관이 간편합니다.
5. 의자 시트 중앙의 변기 커버가 별도로 있으므로, 외형이 미려하고 평소에는 덮어둘 수 있습니다.



사용 방법

1. 최초의 접어진 시트 Body를 양쪽 옆으로 약 90° 정도로 펼칩니다
2. 위쪽으로 접어진 시트판을 밑으로 내리면서 양쪽 몸체에 안착시킵니다.
3. 분리된 시트를 시트판의 구멍에 맞추어 끼웁니다.
4. 브레이크를 눌러 바퀴 회전을 고정시킨 후 대상자를 수발자의 도움으로 앉힙니다.
5. 변기통은 대상자가 앉은 후 또는 앉기 전에 앞쪽에서 서랍식으로 밀어넣거나 빼낼 수 있는 장점이 있습니다.

보관방법 및 주의사항

1. 이동변기는 반드시 바닥이 수평면에서만 사용하여야 합니다.
2. 대상자가 기대거나 한쪽으로만 힘을 주면 본체가 밀리거나 넘어질 위험이 있으므로 반드시 수발자의 도움하에 사용해야 합니다.
3. 시트는 사용 후 이물질 등이 있으면 간편하게 착탈하며 세척한 후 건조하여 사용할 수 있습니다.
4. 변기통은 사용 후 깨끗이 청소(소독)하지 않으면 병원이나 위생상 불리함으로 세척 후 건조하여 사용합니다.
5. 본체는 세척 등으로 물기가 많을 경우 다음 사용을 위하여 물기를 제거한 후 습기가 없는 건조한 곳에 접어서 보관합니다.

사후관리 (A/S)

1. A/S범위 : 소모성부품 유상 (받침고무, 바퀴, 의자시트)
그 외 기능성부품무상 (무상보증 1년)
2. 접 수 처 : 현품 소비자 구입처 또는 직영영업점
소비자지원팀 : 051)325-5100 (09시~17시)
Homepage : www.skywheel.co.kr
www.건강한백세.kr
E-mail : samwonsky@hanmail.net

※ 본 제품은 생산물배상책임보험(P/L)에 가입되어 있습니다.

※ 본 제품은 실용실안특허등록 제품이므로 모방시 법적인 책임이 있습니다.



단체표준명(품명) : 이동변기
단체표준번호 : KSPA3002
인증번호 : 제117호 (20100306-3)
모델명 및 모델 고유번호 : SKC-660
제조년월 : 별도표시
A/S 전화번호 : 051-325-5100
제조국명 : 한국 제조자명 : 삼원스카이

품질보증 : 본 제품은 단체표준인증단체인 당 협회에서
단체표준 제품임을 보증함. (사)한국고령친화용품산업협회

SAMWON SKY