

# 이동식욕조 사용설명서 (YH-2013)



구성품	수량
이동식 욕조 본체	1개
조절식 샤워기(그림6)	1개
샤워기 호스(그림7)	1개
전동식 에어펌프(그림1)	1개
배수조절밸브(그림5)	1개
등머리받침(부착형,그림3)	1개
배수호스(그림8)	1개
전동식 배수펌프(그림9)	1개

## ◇ 제품의 특징◇

- 특징1 -거주하는 방밖으로 이동하지 않고 방안에서 편하게 목욕이 가능합니다.
- 특징2 -튜브는 83cm(가로)×135cm(세로)×40cm(높이) 크기로 한국인의 체형에 맞도록 제작되었습니다.
- 특징3 -위급상황방지구조  
욕조본체는 3칸으로 나누어 제작되어 제품파손시 목욕하는 환자분이 쓰러져서 다칠우려가 없습니다.
- 특징4 -항균재질로 제작되어 인체에 유해한 세균의 번식을 원천적으로 봉쇄합니다.
- 특징5 - 3단으로 되어있으며 환자분의 특성과 사용하고자 하는 환경에 따라 1단, 2단, 3단 높이조절 사용가능합니다.
- 특징6 -공기주입(약2분), 공기배출(약1분)으로 사용이 간편합니다.
- 특징7 -수도꼭지의 크기에 관계없이 맞추어 사용가능 합니다.
- 특징8 -물배수구를 욕조바닥에서 최대한 낮게하여 배수시 잔여량을 최소화 하였습니다.
- 특징9 -배수호스의 높낮이에 따라 배수가 어려우므로 배수펌프를 이용 배수 가능하며 DC 12V로 사용하게 하여 감전의 우려가 없습니다.

## ◇ 제품 사용방법 및 구성품 ◇




<그림1>

1) 공기주입시 뚜껑을 그림과 같이 여시고 동봉한 전동펌프 이용하여 주입하십시오.  
공기주입밸브는 배기는 안되고 주입 전용입니다.



<그림2>

2) 공기 배출시 뚜껑전체를 그림2와 같이 돌려서 여시면 공기가 배출됩니다.

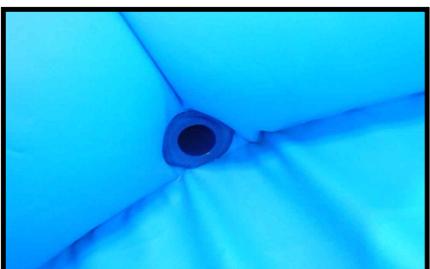

<그림4>

4) 욕조안쪽의 물 배수구; 욕조속의 배수구를 욕조 바닥이 아닌 옆면 아래쪽에 위치하게 하여 목욕을하면서 발의 걸림을 없앴으며 바닥에 가까이 부착하여 물 배수시 잔량이 적습니다.



<그림5>

5) 욕조 바깥의 조절식 밸브(그림5)  
바깥쪽의 조절식 밸브로 사용이 편리하게 제작되었습니다.



<그림6>



<그림7>



<그림8>



<그림9>

6) 조절식 샤워헤드로(그림6)

손잡이 옆부분에서 물을 조절할수 있습니다.( 분사, 비데, 잠김 기능)

7) 5m의 메탈호스와(그림7)

수도꼭지나 샤워꼭지에 간편하게 조립이 가능한 호스와 호스조임 부속을 사용 하였습니다.  
(일반수도, 여러 가지 종류의 물공급 장치에 응용이 가능합니다.)

8) 직경 25mm의 배수호스 길이 6m의 꺾이지 않는 타입입니다.

호스길이는 주문사양 입니다.


9) 배수시 배수펌프를 (그림9)와 같이

배수구에 펌프를 연결후 사용하십시오  
반대쪽에는 (그림8)호스를 끼워주십시오

◇사용전, 사용시 주의사항◇

- 평평하고 이물질이 없는 장소에서 사용할 것.
- 안전동작 하중을 초과한 자에게 사용하지 말 것.
- 사용자의 신체상황에 따라 수발자가 옆에 있을 것.
- 욕조를 잡고, 일어나거나 앉지 말 것.
- 좌면이나 바닥에 접하는 부분 미끄러짐 주의.
- 한 번에 한 사람 만 사용할 것.

- 사람이 욕조안에 있을때 적정 물 사용 높이를 지킬것.
- 강한 물리적 압력 등이 가해지지 않도록 할 것.
- 송곳이나 날카로운 도구가 달지 않도록 할 것.
- 배수용 호수를 배수구나 화장실 등에 연결 할 것.
- 사용시 응급상황 발생시 배수밸브를 열어 물을 빼주십시오.
- 사용후 욕조는 매번 세척하십시오.
- 사용하다 이상이 발견되면 본사로(아래 A/S연락처) 연락 할 것.

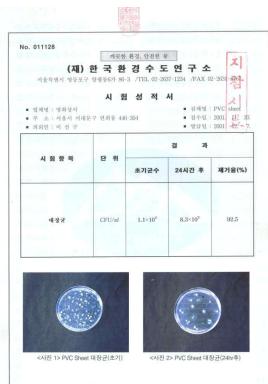

### ◆ 발명특허출원중

- 등받침, 배수구, 2단안전장치, 항균 재질  
미끄럼방지 바닥쿠션

## <항균시험성적서>

### ◇제품 보증서◇

제품명	이동식욕조	모델명	YH-2013
제조국/제조사	한국 / 영화의료기	제조년월일	년 월 일
제품의무게	4.8 kg	안전동작하중	250 kg
제품 보증기간	구입후 1년	A/S 연락처	02-337-4707
소비자		구입년월일	
주소	서울시 서대문구 연희동 446-304		
홈페이지	<a href="http://www.yhmedical.co.kr">www.yhmedical.co.kr</a>		