

경사로 (실내용)

R-7615M

이 제품은 실내와 실외 바닥의 작은 높낮이 차이를 없애 안전하게 이동할 수 있게 해 주는 경사로(실내용)입니다.


- 이 제품을 사용하기 전에 사용자와 보호자는 이 사용 설명서를 주의하여 읽고 적절히 사용해야 합니다. 또한 항상 확인할 수 있도록 이 설명서를 안전한 장소에 보관하십시오.

용도

이 제품은 실내와 실외 바닥의 작은 높낮이 차이를 없애 안전하게 휠체어를 이동하거나 가볍게 걸을 수 있게 해주는 경사로(실내용)입니다. 이 제품의 제작 목적을 벗어난 용도로 사용하지 마십시오.

사용방법

- 1 바닥의 높낮이 차이를 확인하고 하단의 규격표를 참조하여 높낮이 차이와 동일한 높이의 경사로(실내용)를 선택하십시오.
- 2 높낮이 차이가 있는 곳에 빈틈이 남지 않도록 제품을 밀착해 놓으십시오.

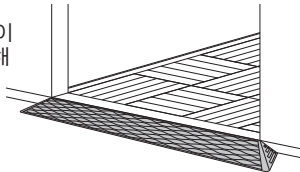

바닥에 고정할 때

제품이 설치면에서 움직이기 쉬운 경우 제품 뒷면에 부착되어있는 양면테이프를 설치면에 부착하여 고정하시기 바랍니다.

관리방법


주기적으로 경사로(실내용)의 표면의 먼지 등을 제거하십시오.

- 부드러운 털솔이나 천을 사용하여 물로 씻으십시오. 뜨거운 물(60℃이상)을 사용하지 마십시오.
- 일반 가정용 세제(중성세제)를 사용하여 청소하십시오. 유기용제(예: 시너, 벤젠), 강알칼리 또는 강산이 포함된 세제를 사용하지 마십시오.
- 소독하는 경우 알코올 소독제를 사용하십시오.

보관방법

보관할 때 먼지를 제거하고 평평하게 놓으십시오. 세워놓으면 제품이 변형될 수 있습니다. 직사광선이나 고온의 장소에 제품을 방치하지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.

규격

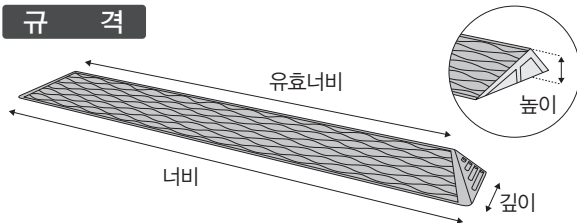

제품 규격

제품명	높이 cm	너비 cm	유효너비 cm	깊이 cm	무게 g
R-7615M	1.5	76	71	6.1	300

재질 : PVC(폴리염화비닐)

주의사항

- 제품에 모래나 눈이 있으면 사용하기 전에 반드시 제거하십시오.
- 젖어 있는 경사로(실내용)를 사용하지 마십시오.
- 경사로(실내용)가 설치면에서 움직이지 않도록 고정하십시오.
- 평평하고 단단한 바닥에 제품을 설치하십시오.
- 제품을 직사광선과 열을 피해 두십시오.
- 제품을 구부리거나 제품에 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 물이 고이거나 흐르는 장소에 사용하지 마십시오.
- 제품은 부드러운 휠체어 이동과 보호자의 보행을 전제로 디자인되어 있습니다. 뛰어 밟거나 비틀거나 던져서 제품에 충격을 주어서는 안됩니다.
- 햇볕 아래에서 장시간 사용하며 제품의 색상이 나빠질 수 있지만 사용상 문제는 없습니다.

	단체표준명(품명)	단체해소기
	단체표준번호	KSPA-1019-1953
	인증번호	제658호 (20200207-1) R-7615M
	모델명 및 모델 고유번호	R-7615M
	제조년월	별도표기
	수입자명	주식회사 대아
	A/S 전화번호	031-947-9596
제조국명		중국
품 질 보 증		
본 제품을 단체표준인증단체인 당 협회에서 단체표준제품임을 보증함. (사)한국고령친화용품산업협회		

제품보증서

■ 제품보증에 관하여

1. 본 제품에 이상이 있을 시 구입 후 1년간 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
2. 아래의 경우에는 무상 A/S를 받으실 수 없습니다.
 - 사용자의 취급 부주의로 발생한 고장
 - 사용자 임의의 내/외부 개조로 인한 고장
 - 천재지변에 의한 고장 (화재, 수해 등)
 - 소모성 부품의 마모 또는 수명이 다한 경우
 - 당사가 지정한 기사가 아닌 사람이 수리한 경우

■ 서비스를 요청하시기 전에...

1. 사용설명서를 다시 한번 잘 확인해 주십시오.
2. 확인 후 이상이 있을 때는 구입처에 연락 하시거나 당사 고객 센터에 연락해 주시면 신속 정확한 A/S를 받으실 수 있습니다.

■ 준수 사항에 관하여

1. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
2. 보증서를 보관하지 못한 경우 불이익을 당할 수 있습니다.

제 품 명	구 입 일 자
R-7615M	

(주)Dae-A

A/S문의
경기도 파주시 탄현면 검산로459
TEL: 031-947-9596 FAX: 031-947-9508

경사로 (실내용)

R-7620M

이 제품은 실내와 실외 바닥의 작은 높낮이 차이를 없애 안전하게 이동할 수 있게 해 주는 경사로(실내용)입니다.


- 이 제품을 사용하기 전에 사용자와 보호자는 이 사용 설명서를 주의하여 읽고 적절히 사용해야 합니다. 또한 항상 확인할 수 있도록 이 설명서를 안전한 장소에 보관하십시오.

용도

이 제품은 실내와 실외 바닥의 작은 높낮이 차이를 없애 안전하게 휠체어를 이동하거나 가볍게 걸을 수 있게 해주는 경사로(실내용)입니다. 이 제품의 제작 목적을 벗어난 용도로 사용하지 마십시오.

사용방법

- 1 바닥의 높낮이 차이를 확인하고 하단의 규격표를 참조하여 높낮이 차이와 동일한 높이의 경사로(실내용)를 선택하십시오.
- 2 높낮이 차이가 있는 곳에 빈틈이 남지 않도록 제품을 밀착해 놓으십시오.

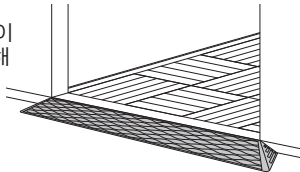

바닥에 고정할 때

제품이 설치면에서 움직이기 쉬운 경우 제품 뒷면에 부착되어있는 양면테이프를 설치면에 부착하여 고정하시기 바랍니다.

관리방법


주기적으로 경사로(실내용)의 표면의 먼지 등을 제거하십시오.

- 부드러운 털솔이나 천을 사용하여 물로 씻으십시오. 뜨거운 물(60℃이상)을 사용하지 마십시오.
- 일반 가정용 세제(중성세제)를 사용하여 청소하십시오. 유기용제(예: 시너, 벤젠), 강알칼리 또는 강산이 포함된 세제를 사용하지 마십시오.
- 소독하는 경우 알코올 소독제를 사용하십시오.

보관방법

보관할 때 먼지를 제거하고 평평하게 놓으십시오. 세워놓으면 제품이 변형될 수 있습니다. 직사광선이나 고온의 장소에 제품을 방치하지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.

규격

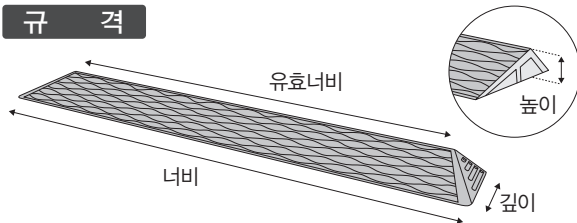

제품 규격

제품명	높이 cm	너비 cm	유효너비 cm	깊이 cm	무게 g
R-7620M	2.0	76	69	8.1	600

재질 : PVC(폴리염화비닐)

주의사항

- 제품에 모래나 눈이 있으면 사용하기 전에 반드시 제거하십시오.
- 젖어 있는 경사로(실내용)를 사용하지 마십시오.
- 경사로(실내용)가 설치면에서 움직이지 않도록 고정하십시오.
- 평평하고 단단한 바닥에 제품을 설치하십시오.
- 제품을 직사광선과 열을 피해 두십시오.
- 제품을 구부리거나 제품에 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 물이 고이거나 흐르는 장소에 사용하지 마십시오.
- 제품은 부드러운 휠체어 이동과 보호자의 보행을 전제로 디자인되어 있습니다. 뛰어 밟거나 비틀거나 던져서 제품에 충격을 주어서는 안됩니다.
- 햇볕 아래에서 장시간 사용하며 제품의 색상이 나빠질 수 있지만 사용상 문제는 없습니다.

	단체표준명(품명)	단체해소기
	단체표준번호	KSPA-1019-1953
	인증번호	제659호 (20200207-2) R-7620M
	모델명 및 모델 고유번호	R-7620M
	제조년월	별도표기
	수입자명	주식회사 대아
	A/S 전화번호	031-947-9596
제조국명		중국
품 질 보 증		
본 제품을 단체표준인증단체인 당 협회에서 단체표준제품임을 보증함. (사)한국고령친화용품산업협회		

제품보증서

■ 제품보증에 관하여

1. 본 제품에 이상이 있을 시 구입 후 1년간 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
2. 아래의 경우에는 무상 A/S를 받으실 수 없습니다.
 - 사용자의 취급 부주의로 발생한 고장
 - 사용자 임의의 내/외부 개조로 인한 고장
 - 천재지변에 의한 고장 (화재, 수해 등)
 - 소모성 부품의 마모 또는 수명이 다한 경우
 - 당사가 지정한 기사가 아닌 사람이 수리한 경우

■ 서비스를 요청하시기 전에...

1. 사용설명서를 다시 한번 잘 확인해 주십시오.
2. 확인 후 이상이 있을 때는 구입처에 연락 하시거나 당사 고객 센터에 연락해 주시면 신속 정확한 A/S를 받으실 수 있습니다.

■ 준수 사항에 관하여

1. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
2. 보증서를 보관하지 못한 경우 불이익을 당할 수 있습니다.

제 품 명	구 입 일 자
R-7620M	

(주)Dae-A

A/S문의
경기도 파주시 탄현면 검산로459
TEL: 031-947-9596 FAX: 031-947-9508

경사로 (실내용)

R-7630M

이 제품은 실내와 실외 바닥의 작은 높낮이 차이를 없애 안전하게 이동할 수 있게 해 주는 경사로(실내용)입니다.


- 이 제품을 사용하기 전에 사용자와 보호자는 이 사용 설명서를 주의하여 읽고 적절히 사용해야 합니다. 또한 항상 확인할 수 있도록 이 설명서를 안전한 장소에 보관하십시오.

용도

이 제품은 실내와 실외 바닥의 작은 높낮이 차이를 없애 안전하게 휠체어를 이동하거나 가볍게 걸을 수 있게 해주는 경사로(실내용)입니다. 이 제품의 제작 목적을 벗어난 용도로 사용하지 마십시오.

사용방법

- 1 바닥의 높낮이 차이를 확인하고 하단의 규격표를 참조하여 높낮이 차이와 동일한 높이의 경사로(실내용)를 선택하십시오.
- 2 높낮이 차이가 있는 곳에 빈틈이 남지 않도록 제품을 밀착해 놓으십시오.

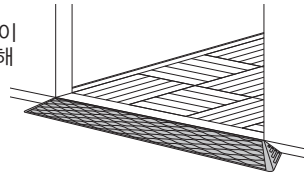

바닥에 고정할 때

제품이 설치면에서 움직이기 쉬운 경우 제품 뒷면에 부착되어있는 양면테이프를 설치면에 부착하여 고정하시기 바랍니다.

관리방법


주기적으로 경사로(실내용)의 표면의 먼지 등을 제거하십시오.

- 부드러운 털솔이나 천을 사용하여 물로 씻으십시오. 뜨거운 물(60℃이상)을 사용하지 마십시오.
- 일반 가정용 세제(중성세제)를 사용하여 청소하십시오. 유기용제(예: 시너, 벤젠), 강알칼리 또는 강산이 포함된 세제를 사용하지 마십시오.
- 소독하는 경우 알코올 소독제를 사용하십시오.

보관방법

보관할 때 먼지를 제거하고 평평하게 놓으십시오. 세워놓으면 제품이 변형될 수 있습니다. 직사광선이나 고온의 장소에 제품을 방치하지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.

규격

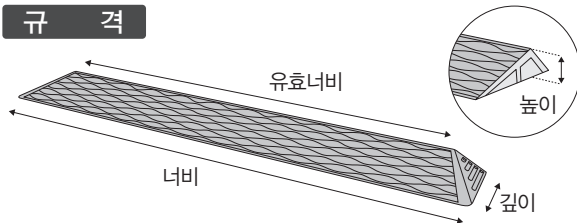

제품 규격

제품명	높이 cm	너비 cm	유효너비 cm	깊이 cm	무게 g
R-7630M	3.0	76	65	12.1	900

재질 : PVC(폴리염화비닐)

주의사항

- 제품에 모래나 눈이 있으면 사용하기 전에 반드시 제거하십시오.
- 젖어 있는 경사로(실내용)를 사용하지 마십시오.
- 경사로(실내용)가 설치면에서 움직이지 않도록 고정하십시오.
- 평평하고 단단한 바닥에 제품을 설치하십시오.
- 제품을 직사광선과 열을 피해 두십시오.
- 제품을 구부리거나 제품에 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 물이 고이거나 흐르는 장소에 사용하지 마십시오.
- 제품은 부드러운 휠체어 이동과 보호자의 보행을 전제로 디자인되어 있습니다. 뛰어 밟거나 비틀거나 던져서 제품에 충격을 주어서는 안됩니다.
- 햇볕 아래에서 장시간 사용하며 제품의 색상이 나빠질 수 있지만 사용상 문제는 없습니다.

	단체표준명(품명)	단체해소기
	단체표준번호	KSPA-1019-1953
	인증번호	제660호 (20200207-3) R-7630M
	모델명 및 모델 고유번호	R-7630M
	제조년월	별도표기
	수입자명	주식회사 대아
	A/S 전화번호	031-947-9596
제조국명		중국
품 질 보 증		
본 제품을 단체표준인증단체인 당 협회에서 단체표준제품임을 보증함. (사)한국고령친화용품산업협회		

제품보증서

■ 제품보증에 관하여

1. 본 제품에 이상이 있을 시 구입 후 1년간 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
2. 아래의 경우에는 무상 A/S를 받으실 수 없습니다.
 - 사용자의 취급 부주의로 발생한 고장
 - 사용자 임의의 내/외부 개조로 인한 고장
 - 천재지변에 의한 고장 (화재, 수해 등)
 - 소모성 부품의 마모 또는 수명이 다한 경우
 - 당사가 지정한 기사가 아닌 사람이 수리한 경우

■ 서비스를 요청하시기 전에...

1. 사용설명서를 다시 한번 잘 확인해 주십시오.
2. 확인 후 이상이 있을 때는 구입처에 연락 하시거나 당사 고객 센터에 연락해 주시면 신속 정확한 A/S를 받으실 수 있습니다.

■ 준수 사항에 관하여

1. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
2. 보증서를 보관하지 못한 경우 불이익을 당할 수 있습니다.

제 품 명	구 입 일 자
R-7630M	

(주)Dae-A

A/S문의
경기도 파주시 탄현면 검산로459
TEL: 031-947-9596 FAX: 031-947-9508

경사로 (실내용)

R-7640M

이 제품은 실내와 실외 바닥의 작은 높낮이 차이를 없애 안전하게 이동할 수 있게 해 주는 경사로(실내용)입니다.


- 이 제품을 사용하기 전에 사용자와 보호자는 이 사용 설명서를 주의하여 읽고 적절히 사용해야 합니다. 또한 항상 확인할 수 있도록 이 설명서를 안전한 장소에 보관하십시오.

용도

이 제품은 실내와 실외 바닥의 작은 높낮이 차이를 없애 안전하게 휠체어를 이동하거나 가볍게 걸을 수 있게 해주는 경사로(실내용)입니다. 이 제품의 제작 목적을 벗어난 용도로 사용하지 마십시오.

사용방법

- 1 바닥의 높낮이 차이를 확인하고 하단의 규격표를 참조하여 높낮이 차이와 동일한 높이의 경사로(실내용)를 선택하십시오.
- 2 높낮이 차이가 있는 곳에 빈틈이 남지 않도록 제품을 밀착해 놓으십시오.

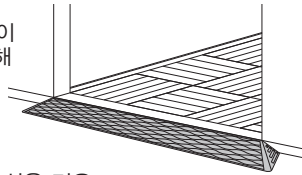

바닥에 고정할 때

제품이 설치면에서 움직이기 쉬운 경우 제품 뒷면에 부착되어있는 양면테이프를 설치면에 부착하여 고정하시기 바랍니다.

관리방법


주기적으로 경사로(실내용)의 표면의 먼지 등을 제거하십시오.

- 부드러운 털솔이나 천을 사용하여 물로 씻으십시오. 뜨거운 물(60℃이상)을 사용하지 마십시오.
- 일반 가정용 세제(중성세제)를 사용하여 청소하십시오. 유기용제(예: 시너, 벤젠), 강알칼리 또는 강산이 포함된 세제를 사용하지 마십시오.
- 소독하는 경우 알코올 소독제를 사용하십시오.

보관방법

보관할 때 먼지를 제거하고 평평하게 놓으십시오. 세워놓으면 제품이 변형될 수 있습니다. 직사광선이나 고온의 장소에 제품을 방치하지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.

규격

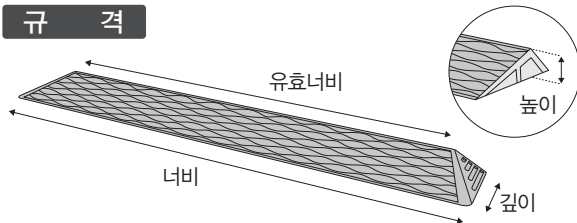

제품 규격

제품명	높이 cm	너비 cm	유효너비 cm	깊이 cm	무게 g
R-7640M	4.0	76	66	16.1	1,500

재질 : PVC(폴리염화비닐)

주의사항

- 제품에 모래나 눈이 있으면 사용하기 전에 반드시 제거하십시오.
- 젖어 있는 경사로(실내용)를 사용하지 마십시오.
- 경사로(실내용)가 설치면에서 움직이지 않도록 고정하십시오.
- 평평하고 단단한 바닥에 제품을 설치하십시오.
- 제품을 직사광선과 열을 피해 두십시오.
- 제품을 구부리거나 제품에 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 물이 고이거나 흐르는 장소에 사용하지 마십시오.
- 제품은 부드러운 휠체어 이동과 보호자의 보행을 전제로 디자인되어 있습니다. 뛰어 밟거나 비틀거나 던져서 제품에 충격을 주어서는 안됩니다.
- 햇볕 아래에서 장시간 사용하며 제품의 색상이 나빠질 수 있지만 사용상 문제는 없습니다.

	단체표준명(품명)	단체해소기
	단체표준번호	KSPA-1019-1953
	인증번호	제661호 (20200207-4) R-7640M
	모델명 및 모델 고유번호	R-7640M
	제조년월	별도표기
	수입자명	주식회사 대아
	A/S 전화번호	031-947-9596
제조국명		중국
품 질 보 증		
본 제품을 단체표준인증단체인 당 협회에서 단체표준제품임을 보증함. (사)한국고령친화용품산업협회		

제품보증서

■ 제품보증에 관하여

1. 본 제품에 이상이 있을 시 구입 후 1년간 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
2. 아래의 경우에는 무상 A/S를 받으실 수 없습니다.
 - 사용자의 취급 부주의로 발생한 고장
 - 사용자 임의의 내/외부 개조로 인한 고장
 - 천재지변에 의한 고장 (화재, 수해 등)
 - 소모성 부품의 마모 또는 수명이 다한 경우
 - 당사가 지정한 기사가 아닌 사람이 수리한 경우

■ 서비스를 요청하시기 전에...

1. 사용설명서를 다시 한번 잘 확인해 주십시오.
2. 확인 후 이상이 있을 때는 구입처에 연락 하시거나 당사 고객 센터에 연락해 주시면 신속 정확한 A/S를 받으실 수 있습니다.

■ 준수 사항에 관하여

1. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
2. 보증서를 보관하지 못한 경우 불이익을 당할 수 있습니다.

제 품 명	구 입 일 자
R-7640M	

(주)Dae-A

A/S문의
경기도 파주시 탄현면 검산로459
TEL: 031-947-9596 FAX: 031-947-9508