
TacaoF

BSU11 사용설명서

이 제품을 구매해 주셔서 대단히 감사드립니다. 제품을 안전하고 올바르게 사용하시기 위하여 사용하시기 전에 반드시 이 사용설명서를 읽어 주시기 바랍니다. 또한, 읽으신 후에는 잘 보관하여 주시기 바랍니다

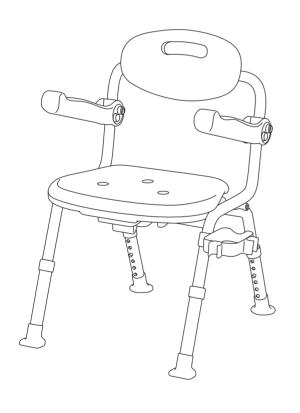

목 차

사용전 주의사항 ······ 1 P
사용상 주의사항 $1\sim 2\mathrm{P}$
손질방법 ······2P
보관방법2P
각부의 명칭 및 제품사양 ··········· 3 P
사용방법 ····· 4P
조립방법 · 접이방법5P
좌면 높이 조절 방법 ······6P
패드 탈착방법 ······6P
샤워 트레이 사용방법 ······ 7 P
팔걸이 높이 조절방법 ····· 8P
팔걸이 탈착 방법 ····· 9P
팔걸이 사용예 ······10P

사용전 주의사항

▲ 경고 잘못된 방법으로 사용할 경우, 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있으므로 아래의 사항을 만드시 지켜 주십시오.

- 각 부위에 곰팡이나 부식, 나사가 풀려 있는 등 문제가 없는지 확인하여 사용해 주십시오.
- 파이프에 변형이 없는지 다리고무에 금이 가거나 파손, 마모로 인한 이상이 없는지 반드시 점검하여 주십시오.
- 다리 고무가 확실하게 부착되어 있는지 확인해 주십시오.
- 연장파이프가 모두 같은 높이에 설정되어 있는지 확인하여 주십시오.
- 4개의 다리가 모두 같은 위치인 것을 확인하고 사용해 주십시오.
- 케어 시에는 사용자의 상태를 충분히 파악하고 사용해 주십시오.

사용상 주의사항

▲ 경고 잘못된 방법으로 사용할 경우, 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있으므로 아래의 사항을 만드시 지켜 주십시오.

- 구매시에는 전문가와 구매처 등에 적절한 선택이나 피팅에 대해서 상담해 주십시오.
- 사용자가 자신의 신체를 안정시키지 못하는 경우에는 보호자와 함께 사용해 주십시오.
- 발받침으로 사용하거나 위에서 뛰지 마십시오.
- 욕실내의 평평하고 안정된 장소에서 놓고 사용해 주십시오.
- 좌면을 눌러보고 흔들림이 없는지 확인하고 만일 흔들림 있는 경우에는 좌면 및 연장 파이프가 확실히 고정되어 있는지 확인해 주십시오.
- 최대 사용자 체중을 반드시 지켜주십시오.
- 목욕의자 외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 등받이, 팔걸이를 난간 용도로 사용하지 마십시오.
- 몸을 과도하게 뒤로 젖혀서 등받이에 강한 체중을 싣지 마십시오. 또한 한쪽 팔걸이에만 체중을 싣지 마십시오.
- 좌면 끝, 등받이, 팔걸이에 앉는 등 좌면 중앙 이외에는 앉지 마십시오. 제품이 파손되거나 전도될 위험이 있습니다.
- 두명 이상이 동시에 앉지 마십시오. 전도될 위험이 있습니다.
- 욕실 이외의 장소에서 사용하지 마십시오.
- 수리, 개조는 하지 마십시오. 본체의 기능이 발휘하지 못하여 부상의 원인이 됩니다.
- 상체를 후방으로 과도하게 기울여서 팔걸이에 체중을 가하지 마십시오. 전도될 위험이 있습니다.
- 옆으로 강한 힘을 가하지 마십시오. 전도되어 부상의 위험이 있습니다.
- 고의로 흔들지 마십시오. 전도되어 부상의 위험이 있습니다.
- 제품을 접이시에는 손가락이 끼지 않도록 주의해 주십시오. 부상의 위험이 있습니다.
- 좌면의 물빠짐 구멍에 손가락이나 발가락을 넣지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다.
- 좌면이 확실하게 잠금상태인지 확인하여 사용해 주십시오. 전도되어 부상의 위험이 있습니다.

사용상 주의사항

▲주의 ^{잘못된} 방법으로 사용할 경우, 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있으므로 아래의 사항을 만드시 지켜 주십시오.

- 입욕시 신체를 충분히 안정시키고 천천히 실시해 주십시오.
- 팔걸이만 잡고 잡아당기거나 들어 올리지 마십시오.
- 뜨거운 물을 닿게 하지 마십시오. 제품의 변형. 화상의 원인이 됩니다.
- 사우나 등 고온의 장소에서 사용하지 마십시오. 또한 직사광선 등이 닿게 하지 마십시오. 패드가 변형될 수 있습니다.
- 미끄러운 장소에서 사용하지 마십시오.
- 비누.물. 샴푸 등으로 좌면과 목욕의자가 미끄러지므로 주의해 주십시오.
- 사람이 앉아 있는 상태에서 이동시키지 마십시오.
- 물 안에 넣고 사용하거나 씻지 마십시오.
- 간혹 녹이 발생 될 수 있습니다. 발생된 경우에는 꼼꼼히 관리하여 주십시오.
- 온천수나 유황계의 입욕제를 사용하지 마십시오. 부식의 원인이 되어 파이프나 수지가 파손되어 부상의 위험이 있습니다.
- 화기가 있는 장소에 두지 마십시오. 화재와 변형의 원인이 됩니다.


손질방법

- 부드러운 천이나 스펀지로 희석시킨 욕실용 중성세제를 묻혀 오염을 닦아내고 깨끗한 물로 세제를 씻어 주십시오. 그 다음 그늘에서 말리거나 마른 천으로 닦아서 마무리해 주십시오.
- 수세미나 연마제가 들어간 스펀지, 연마분 등은 사용하지 마십시오.
- 염소계 세제, 시너, 크레졸 등은 절대로 사용하지 마십시오. 플라스틱 부분의 열화 및 파손의 원인이 됩니다.

보관방법

- 바닥의 재질 표면가공 등에 따라서 다리의 고무가 바닥에 부착, 이염, 변색되는 경우가 있습니다. 장시간 보관하는 경우에는 바닥에 고무가 닿지 않도록 해주십시오.
- 야외에 방치하거나 직사광선 밑에 두지 마십시오. 열화 및 변색의 원인이 됩니다.
- 제품을 접이한 상태에서 보관하는 경우 세워서 보관하는 경우 …… 평평한 장소에서 보관해 주십시오. 눕혀서 보관하는 경우 …… 본체 위에 무거운 물건을 올리지 마십시오.
- 욕실 건조기의 가까이에 보관하지 마십시오. 패드의 변형으로 인해 탈부착이 안될 수 있습니다.

각부의 명칭 및 제품사양

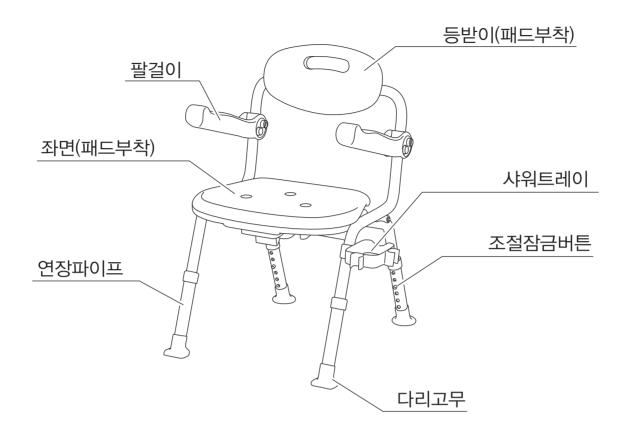

사용시사이즈	가로465×세로495~575×높이650~750 mm			
접이시사이즈	가로465×세로230×높이820 mm			
좌 면 높 이	- 면 높 이 320~420 mm(6단계)		좌 면 사 이 즈	가로425×세로335mm
팔 걸 이 높 이 (좌 면 에 서)	1단계 : 230 mm	2든	<u>난</u> 계: 200 mm	3단계: 170 mm
최대사용자 체중	95 kg		중 량	4.5 kg
재 질	파이프 : 알루미늄 합금 좌면·등받이 : 폴리에틸렌		패드 : EVA수지 다리고무 : EVA 수 지	

[※]구입시 팔걸이 높이는 2단계입니다.

사용방법

욕실에서 샤워를 하거나 몸을 씻는 경우에 사용해 주십시오.

또한 팔걸이를 위로 올릴 수 있으므로 앉은 상태에서 몸의 방향을 바꿔 간편하게 이동이 가능합니다.

몸 상태에 맞춰서 좌면의 높이와 팔걸이 높이를 조절해 주십시오.

좌면의 높이는 6page 좌면의 높이조절 방법, 팔걸이 높이는 8page 팔걸이 높이의 조절 방법을 확인해 주십시오.

■욕조 안으로 이동방법



- 목욕의자를 최대한 욕조 가까이 붙여 욕조 쪽의 팔걸이를 올려 주십시오.
- 2 몸의 방향을 바꿔 한발씩 천천히 욕조 안으로 넣어 주십시오.


▲주의

- 미끄러운 작은 타일의 바닥에서는 사용하지 마십시오.
- 욕조 안으로 이동시에는 몸을 안정시킨 다음 천천히 움직여 주십시오.


조립방법 : 접이방법

■조립방법

등받이를 잡고 좌면을 화살표 방향으로 내려 주십시오.

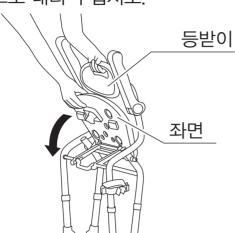

2 좌면이 수평이고 잠금 상태인지 확인해 주십시오.

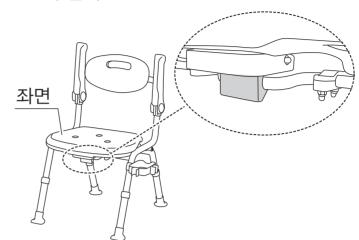

3 좌면을 위에서 누르고 좌우의 팔걸이를 내려 주십시오.



■접이방법

1 좌우의 팔걸이를 올려 주십시오.





2 좌면 끝의 잠금장치를 잡고 좌면을 화살표 방향으로 올려 주십시오.




·**쇼**주의·

- 손이나 손가락이 끼지 않도록 주의해 주십시오.
- 좌면이 확실히 내려가 있고 잠금 상태인지 확인하여 사용해 주십시오.
- 접이시에는 먼저 팔걸이를 올리고 접이해 주십시오.
- 제품을 이동 시킬 때에는 잠금장치를 잡지말고 등받이를 잡고 옮겨 주십시오.

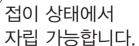

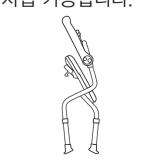

좌면높이조절방법

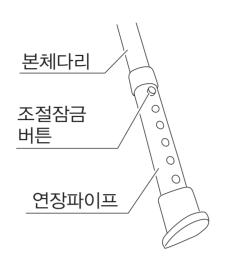

【연장파이프 설치방법】

본체 다리의 조절 잠금 버튼을 누르면서 연장 파이프를 본체 다리에 넣어주십시오.

제거시에는 조절 잠금 버튼을 누르면서 연장 파이프를 당겨서 제거해 주십시오.

【높이 조절방법】


조절 잠금 버튼을 누르면서 연장파이프를 위아래로 움직여서 설정하고 싶은 높이의 구멍에 맞춰주십시오. 조절 잠금 버튼이 확실하게 구멍에 고정되어 있는지 확인해 주십시오.

▲주의

- 연장파이프가 고정되어 있는지 반드시 확인하여 사용해 주십시오.
- 연장파이프가 모두 같은 높이로 설정되어 있는지 반드시 확인해 주십시오.

패드의 탈착방법

등받이, 좌면의 패드는 팔, 부착하여 세척 가능합니다.

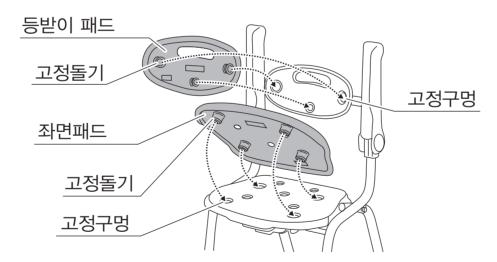

■패드 해제방법

등받이, 좌면 각각의 뒷면에서 고정 돌기를 눌러서 떼어 주십시오.

■패드 설치방법


패드의 고정돌기를 등받이, 좌면 각각의 고정 구멍에 맞춰서 눌러 넣어 패드의 가장자리부터 씌워 주십시오.

▲주의

- 패드의 앞뒤가 맞는지 주의해 주십시오.
- 패드가 확실히 부착되어 있는지 확인해 주십시오.

샤워트레이 사용방법

샤워트레이는 일반적인 샤워기 헤드를 걸거나 타올, 스펀지, 비누 등을 놓을 수 있습니다. 필요에 따라 샤워트레이를 탈착하여 사용해 주십시오.

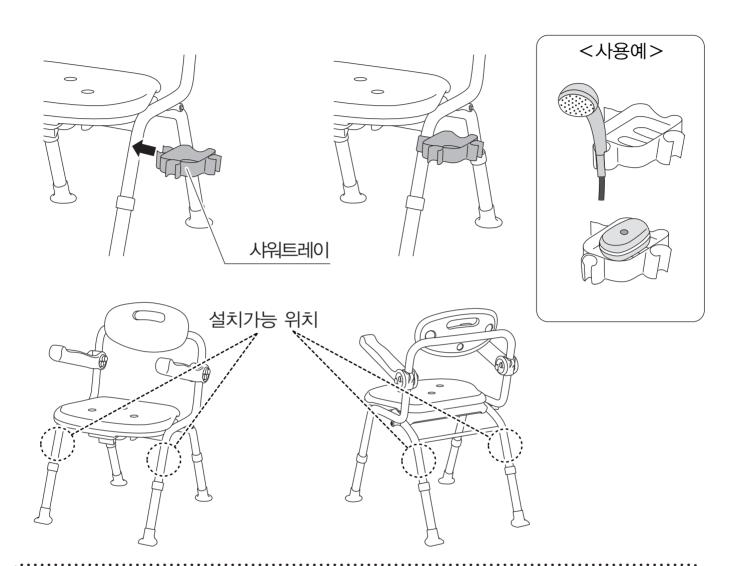


- 손이나 손가락이 끼지 않도록 주의해 주십시오.
- 설치 가능한 위치 이외의 위치에 설치하기 마십시오. 파손 및 부상의 위험이 있습니다.

▲주의


- 샤워기 헤드를 설치하는 경우에는 물을 끄고 걸어 주십시오. 샤워기 헤드가 샤워트레이에서 빠질 가능성이 있습니다.
- 입욕후에는 샤워트레이는 샤워기 헤드를 고정시킨 상태로 보관하지 마십시오. 파손 및 변형의 원인이 됩니다.
- 본체를 접이시에는 샤워트레이에 물건을 놓지 마십시오. 파손 및 변형의 원인이 됩니다.

팔걸이 높이조절 방법


팔걸이의 원형 나사를 부속 육각 렌치로 풀고 팔걸이를 해제해 주십시오.

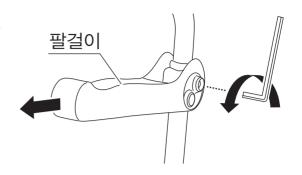

2 팔걸이 고정 수지를 위아래 방향으로 조절하여 앞다리 프레임에서 설정하고 싶은 높이의 구멍에 맞춰 주십시오.

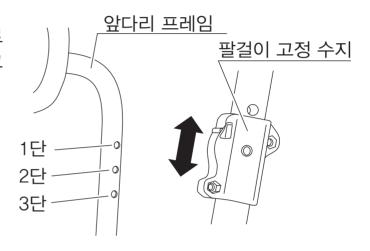


3 팔걸이의 구멍과 팔걸이 고정 수지의 구멍과 맞춰서 팔걸이의 원형 나사를 부속 육각 렌치로 고정해 주십시오.

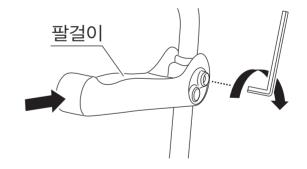


팔걸이 탈착방법


- ■팔걸이 해제방법
- 팔걸이의 원형 나사를 부속 육각렌치로 풀고 팔걸이를 해제해 주십시오.

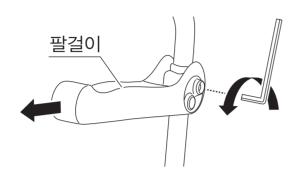

2 팔걸이 고정 수지의 나사 2개를 +드라이버를 이용하여 제거하여 팔걸이 고정 수지를 제거해 주십시오.

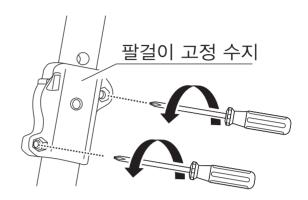

3 팔걸이 고정 수지의 그림과 같이 앞다리 프레임에서 제거해 주십시오.

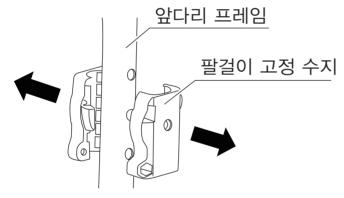


■팔걸이 설치방법 팔걸이 해제 방법의

 $1\sim3$ 을 역순으로 설치해 주십시오.


▲주의

● 팔걸이를 설치하고 팔걸이에 흔들림은 없이 확실하게 설치 되었는지 확인해 주십시오. 팔걸이가 파손되어 부상의 위험이 있습니다. 흔들거림이 있는 경우 팔걸이의 원형 나사를 늘려서 고정해 주십시오.


팔걸이 사용예

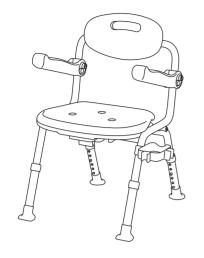

팔걸이 있음

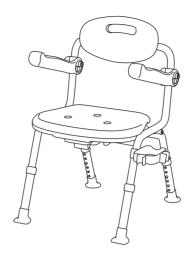


팔걸이 최대높이

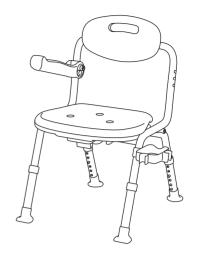


팔걸이 한쪽 사용



팔걸이 없음

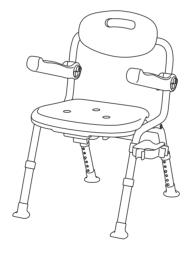

팔걸이 최저높이

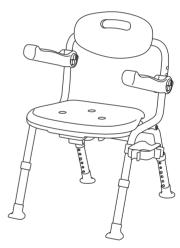

팔걸이 좌우 다른높이로 사용



단체표준명(품명)	목욕의자
단체표준번호	KSPA 2003
인증번호	
모델명 및 모델 고유번호	BSU11
제조년월	별도표기
수입자명	(주)케어맥스코리아
A/S 전화번호	1588-4624
제조국명	중국

품질보증

본 제품을 단체표준인증단체인 당 협회에서 단체표준제품임을 보증함. (사)한국고령친화용품산업협회



제품보증서



제품보증에 관하여

- 1. 본 제품에 이상이 있을 시 구입 후 1년간 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
- 2. 아래의 경우에는 무상 A/S를 받으실 수 없습니다.
 - 사용자의 취급 부주의로 발생한 고장
 - 사용자 임의의 내/외부 개조로 인한 고장
 - 천재지변에 의한 고장 (화재.수해 등)
 - 소모성 부품의 마모 또는 수명이 다한 경우
 - 당사가 지정한 기사가 아닌 사람이 수리한 경우

서비스를 요청하시기 전에...

- 1. 사용설명서를 다시 한번 잘 확인해 주십시오.
- 2. 확인 후 이상이 있을 때는 구입처에 연락 하시거나 당사 고객 센터에 연락해 주시면 신속 정확한 A/S를 받으실 수 있습니다.

준수 사항에 관하여

- 1. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
- 2. 보증서를 보관하지 못한 경우 불이익을 당할 수 있습니다.

제 품 명	구 입 일 자
BSU11	





www.caremaxkorea.com

A/S문의

경기도 파주시 야동동 244-9번지 TEL:1588-4624 FAX:031-911-0192

