

목욕의자 사용설명 (MTCA)

(안락의자 겸용)



목욕의자를 안전하게 사용하기 위하여 필히 본 사용 설명서를 잘 읽어주세요.

다음에 표시된 안전관련 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상하지 못한 사고를 사전에 방지하기 위함입니다. 읽으신 후에 반드시 사용하시는 분들이 항상 볼 수 있는곳에 보관하시기 바랍니다.

사용방법에 관하여 본 사용설명서는 기본적인 사항에만 중점을 두었으므로 특별한 사용방법은 필히 전문가와 상담하여 주세요.

지시 사항을 지키지 않았을 경우 의자에 탑승한 사람이 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

안전상에 주의

! 위험 이 표시를 무시하고 잘못 사용하면 사람이 사망 또는 중대한 부상의 위험성이 있는 내용을 기재하였습니다.

! 주의 이 표시를 무시하고 잘못 사용하면 사람이 상해를 입거나 물적피해가 발생하는 내용을 기재하였습니다.

이승기기
수출전문



민택산업
MINTECH INDUSTRIES CO.




제원

- ① 중량 : 약 11.5kg
- ② 재질 : 스텐레스스틸 파이프(STS304) + 분체도장
시트 재질 : 발포PER (polymer environment friendly resin)
- ③ 크기 : 배면각도1단 115cm(높이) × 49cm(폭) × 75cm(길이)
배면각도5단 67cm(높이) × 49cm(폭) × 118cm(길이)
좌면높이 : 약 49cm

! 위험

- ① 100 kg 이상의 체중을 가지신 분은 사용을 하지마시고 사용중 탑승자의 발을 들지 않도록 주의하세요. 뒤로 전도될 위험이 있습니다.
- ② 목적 이외에 사용하지 마세요.
- ③ 경사진 곳에서 사용을 금하고 정지 상태에서는 항상 4곳의 브레이크를 체결하시고 시용시 앞뒤로 전도방지를 위하여, 앞바퀴는 앞쪽으로, 뒤바퀴는 뒤쪽 방향이 되도록 고정하시고 사용하세요.
- ④ 문턱이나 전선 등을 넘을 때는 앞으로 전도가 되지 않도록 주의하세요.
- ⑤ 이동 중에는 필히 안전 벨트를 착용하여 주세요.(안전벨트는 별매품)
- ⑥ 배면의 손잡이를 잡고 일어서거나 좌면이나 발판을 발로 밟고 일어서거나 배면을 누른 상태에서 탑승자의 다리를 들어올리면 매우 위험합니다. 특히 어린이는 가까이 접근하지 않도록 각별히 주의를 하시바랍니다.
- ⑦ 강한 충격을 가하면 파손의 원인이 됩니다.

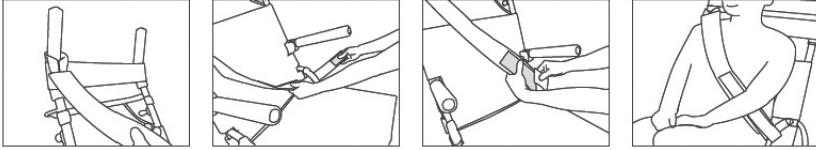

〈안전벨트 착용방법〉

! 주의

- ① 직사 광선을 피하세요. 시트의 노화 우려가 있습니다.
- ② 시트는 60도 이상의 온수에 넣지마세요. 경화될 우려가 있습니다.
- ③ 시트는 자주세척을 하시고 세척할 때 중성세제를 사용하세요.
- ④ 시트를 너무 강하지 않도록 메어주세요.
- ⑤ 시트는 소모품이므로 매일 확인하시고 이상이 있으면 신제품으로 교환하여 주세요.
(벨트고정 클립 및 매직의 접착력 약화, 발포시트의 손상 등)
- ⑥ 사용자의 신체적인 상황에 따라 수발자가 옆에 있어 주세요.

사용전 점검

- ① 캐스터의 나사가 풀려있는지 점검하여 주세요.
- ② 배면, 좌면, 발판 시트의 매직(벨크로)이 잘 부착되어 있는지 확인하여 주세요.
- ③ 배면의 각도조절 레바가 스톱퍼 구멍에 잘 끼여있는지 확인하여 주세요.

사용하시는 분

A. 배면각도조절 방법


배면각도조절레바를 좌우 동시에 당기면 스톱퍼가 해제됩니다.(각도조절은 5단계 조절가능 103도,113도,123도,148도,165도)

※ 배면에 이용자의 체중이 실리므로 조작에 자신이 없으면 미리 각도를 조정하여 사용 하십시오.

B. 좌면시트고정 방법

※ 시트를 세팅하기 전에 시트를 양쪽으로 펼쳐주세요.

1. 좌면 벨트고정 클립의 벨트를 조금씩 느슨하게 조정하고 매직을 고정하세요.
2. 안쪽부터 차례로 매직을 조금씩 풀어 전체적인 장력이 균등하게 세팅합니다.
3. 이 작업을 1~3회하여 바닥이 안락하게 장력이 조절되었는지 확인하여 주세요.

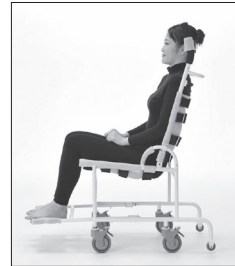

〈본 그림은 보조바퀴 옵션사양임〉

C. 배면시트고정 방법

1. 등을 기댄 상태에서 장력이 가장 센 부분의 매직을 조금씩 느슨하게 합니다.
2. 다음은 4분의 벨트 중에 장력이 센부분의 매직을 조금씩 느슨하게 합니다.
3. 이 작업을 1~3회하여 등이 안락하게 장력이 조절되었는지 확인하여 주세요.

D. 헤드레스트(보조벨트) 조절

1. 뒷머리 아래에 헤드레스트 벨트의 장력을 조절해주세요.

2. 머리를 감을때는 등쪽으로 조금 눕히면 머리 감기가 쉽습니다.

! 주의

신장 180cm이상으신 분은
헤드레스트(보조벨트)를
사용하지 마세요.



E. 좌면 연장 바와 보조벨트고정 방법(옵션판매 · 주문생산)

1. 파이프 캡의 나사를 풀고 연장 바를 조립합니다.
2. 보조 벨트는 보다 안락한 자세가 되도록 사용합니다.

F. 단차(문턱)을 넘을 때

뒷쪽바퀴를 회전중심으로 앞쪽바퀴를 들어올려주세요. 바퀴가 크므로 쉽게 낮은 문턱을 넘을 수 있습니다. 그래도 어려우면 배면을 눕히시고 배면 손잡이를 약간 들면서 후진으로 이동하세요. 휠체어처럼 뒤로 젖히시면 고장의 원인입니다.

G. 긴급발생시 조치요령

사용중에 사용부주의나 고장 등으로 긴급한 문제가 발생하면 우선 탑승자의 상태를 관찰하시고 주위의 도움이 필요하면 지체없이 도움을 요청하시기 바랍니다.

H. 기타(옵션)

1. 헤드써포트

키가 낮으신 분이거나 어린이는 머리를 바쳐주는 헤드써포트를 선택할 수 있습니다.

2. 보조바퀴

낮은 문턱을 쉽게 넘을 수 있습니다.(주문생산)



보수 점검

- ① 바퀴에 모발 등이 끼이면 움직임이 무거워집니다. 청소를 하고 기름을 칠해주세요.
- ② 배면 각도조절 구멍으로 스톱퍼 작동음이 동시에 발생하는지 확인하시기 바랍니다.
- ③ 시트의 클립과 매직(벨크로)의 접착강도와 벨트의 장력은 매일 확인해주세요.
- ④ 여분의 시트를 준비하시어 자주 교환하시든가 사용 후 그늘에서 자주 말려서 사용하세요. 장시간 젖어있으면 곰팡이가 발생하여 변색되므로 미관에 좋지 않습니다.
- ⑤ 볼트 체결부위는 매일 점검하시고 이완되어 있으면 지급되는 드라이버로 꼭 체결하시고 사용하세요. 분실의 우려가 있습니다.

! 주의

시트, 안전벨트, 보조벨트는 소모품입니다.


팔걸이에 첩착된 보호시트커버는 쉽게떨어지므로 사용에 주의하시고 첩착부분이 떨어지면 첩착제로 첩착하여 사용하시기 바랍니다.

시트류는 사전에 점검을 하시어 교환하여 사용하세요.



조립

출하시 손잡이부가 분해되어 출하됩니다.

사용시 스프링을 파이프 내부의 봉에 끼우고 좌, 우측 손잡이를 삽입하고 볼트를 조립하세요. 이때 볼트를 처음부터 너무 세게 체결하지 마시고 처음 1개의 볼트는 한바퀴만 체결하시고 나머지 1개 볼트를 체결하세요. 다시 처음 체결한 나사를 세게 체결하세요. 느슨하게 체결하시면 볼트가 풀려 분실우려가 있습니다.(스텐레스볼트 M4 × 6)

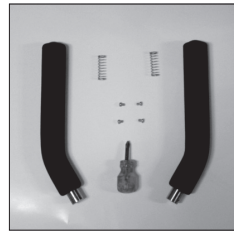

스프링

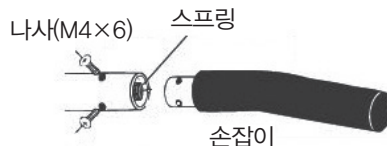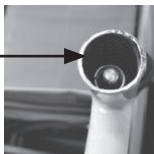

나사(M4×6)

스프링

손잡이

A/S 기간 및 연락처

① 무상보증의 경우

본 제품 구입 후 제품에 문제로 발생한 고장은 구입하신 날로부터 1년은 무상으로 수리를 해드립니다.

② 유상 수리의 경우

- 무상보증기간이 지났을 때
- 천재지변으로 고장이 났을 때
- 고객의 부주의로 고장이 났을 때
- 시트부분은 날카로운 물체로 쉽게 손상 됩니다.

이런 부품은 소모성 부품이므로 A/S기간이내라도 사용자 과실로 발생되었으면 유상 구입을 하셔야 합니다.

- A/S 연락처 : 민택산업 032)564-9610



단체표준명(품명) : 목욕의자
단체표준번호 : KSPA 2003
인증번호 : 제023호(20080318-2)
모델명 및 제조년월 : 별도표기
제조자명 : 민택산업
A/S전화번호 : 032)564-9610
제조국명 : 한국

품질보증

본 제품은 단체표준인증단체인 당 협회에서 단체표준제품임을 보증함
(사)한국고령친용품화산업협회

이승기기
수출전문



민택산업
MINTECH INDUSTRIES CO.

본사 및 공장 인천시 서구 대곡동 517-4

TEL. 032) 564-9610 FAX. 032) 564-9611

E-mail. nkb2392@hanmail.net 홈페이지. www.mintechlift.co.kr