

보증서

당사의 제품은 국제규격 ISO9001의 엄격한 품질 기준에 준하여 생산된 제품이므로 안심하고 사용하셔도 좋습니다.

저희 미키코리아(주) 모든제품은 사용설명서에 따라 사용한 상태에서 1년 이내에 고장이 발생한 경우에는 무상으로 A/S를 받을 수 있습니다.

- ① 수리는 구입하신 판매점에 상담해 주시기 바랍니다. 수리시 본 보증서를 제시 또는 첨부해 주시기 바랍니다.
- ② 구입하신 판매점의 이전 등으로 수리 의뢰를 하실 수 없는 경우는 본사에 상담해 주시기 바랍니다.
- ③ 단 아래사항은 무상 A/S에서 제외됩니다.
 - 제품의 용도 이외에 사용하여 고장이 발생한 경우
 - 사용상의 잘못 혹은 개조, 비 자격자의 부적절한 수리, 조정에 의해 발생한 경우
 - 구입후 운반, 이용, 낙하 등 부적절한 취급에 의해 발생한 경우
 - 화재, 수해, 기타 천재지변에 의해 발생한 경우

성명		연락처	
주소			
구입일자		모델명	
구입처			



미키코리아(주)
MIKIKOREA CO., LTD.

본사 및 공장 | 대구광역시 서구 와룡로 66길 35(서대구공단 내)
TEL:053-562-6500~3 FAX:053-562-6506

서울총판 | 미키메디칼
서울특별시 강남구 봉은사로 625(경희빌딩 101호)
TEL:02-3444-8009 FAX:02-3444-8322
케어라이프
서울특별시 강동구 선사로 50 1F
TEL:02-455-0858~9 FAX:02-455-0853

2020.11.09

목욕의자

사용설명서



PT-300
(바퀴형 목욕의자)

※ 본 사용설명서는 고객여러분의 편의와 안전을 위하여 반드시
읽어보시고 내용을 숙지하신 후 사용하시기 바랍니다.

MK

미키코리아(주)

알림

본 제품을 구입하여 주신데 대해서 진심으로 감사를 드립니다.
본 제품은 노약자 및 거동이 불편한 분을 위하여 제작되었으며
사용방법에 대한 정확한 이해없이 사용하여서는 안됩니다.
사용설명서를 반드시 읽어보시고 이해하기 어려운분은 구입처의
도움을 요청하시고 설명을 충분히 이해 하신 후에 사용하여 주십시오.

목 차

1. 제품의 구성	3
2. 안전한 사용을 위한 길잡이	4
3. 제품설명 및 사양	5
4. 기능별 조작방법 및 사용주의사항	6
5. 사용 후 손질방법	9
6. 보증서	12

※ 본서의 내용은 제품 개선 경우 개정 변경될 수 있습니다.

1

제품의 구성



- ① 방석: 사용자가 편안하게 앉을 수 있는 장치
- ② 팔받이: 팔을 편안하게 올려놓을 수 있는 부위
- ③ 등받이: 사용자가 편안하게 등을 기대 수 있는 부위
- ④ 앞바퀴: 방향을 잡아주는 바퀴
- ⑤ 뒷바퀴: 본체를 지지해 주는 바퀴
- ⑥ 손잡이: 본체를 이동할때 보호자가 편리하게 잡는 부위
- ⑦ 브라켓트카바 : 사용자의 안전을 위한 보호카바
- ⑧ 브레이크 : 뒷바퀴를 고정, 정지시키는 장치
- ⑨ 발판 : 발을 올려놓는 부위
- ⑩ 발걸이띠 : 발이 미끄러져 내려오지 않게 지탱시켜 주는 부위
- ⑪ 팔받이 작동레바 : 팔받이를 작동할때 사용하는 레바
- ⑫ 목 받침대 : 사용자의 머리 세발시 목을 받치는 부위
- ⑬ 등판조절레바 : 등판 각도 조절시 사용하는 레바
- ⑭ 목 받침대 조절레바: 목 받침대 높낮이 조절시 사용하는 레바

2 안전한 사용을 위한 길잡이

※ 아래의 항목들은 소비자들의 안전을 위한 최소한의 안전 수칙이오니 반드시 준수하여 주십시오.
안전수칙을 무시한 사고에 대해서는 당사에서 법적 책임이 없습니다.

- 기기에 무리한 압박과 과도한 충격을 가하지 말아주시기 바랍니다.
- 장시간 사용하지 않은 기기를 사용할 때는 사전 점검을 한 후에 정상작동이 되는지 확인하고 사용해 주시기 바랍니다.
- 사용자의 신체 상황에 따라 보호자가 항상 살펴주시기 바랍니다.
- 사용하지 않을 때에는 통풍이 잘되고 그늘진 곳에 보관하시기 바랍니다.
- 체중이 95kg을 상회하시는 분은 사용을 자제해 주시기 바랍니다.
- 사용시에 바닥이 평평하고(수평), 미끄럽지 않은 곳에서만 사용해 주시기 바랍니다. **⚠주의**
- 제품의 구성품을 해체하지 말아 주시기 바랍니다.
- 제품의 등받이를 잡고 일어나거나 앉지 말아주시기 바랍니다.
- 제품은 앉은 상태로 사용하도록 제작되었습니다.
서 있는 상태로 사용하지 말아 주시기 바랍니다.
- 제품을 세척할 경우 신나, 벤젠 등 용제를 사용하지 마시기 바랍니다.
제품을 손상시킬 위험이 있습니다.
- 사용시에 앞바퀴와 뒷바퀴에 부착된 제동장치를 이용하여 반드시 고정된 후 사용하시기 바랍니다. **⚠주의**

※ 본 사용설명서는 사용자가 언제든지 읽을 수 있도록 제품 근처나 눈에 잘 보이는 곳에 보관하여 주시기 바랍니다.

3 제품 설명 및 사양

1) 제품명 및 형명

- 제품명 : 목욕의자
- 형명(모델명) : PT-300(바퀴형 목욕의자)

2) 사용목적

- 사용자의 목욕을 도와주는데 사용하는 기구

3) 제품의 소개

- 본체 프레임과 팔받이(윙기능), 등받이, 방석, 브레이크부, 목 받침대, 보조손잡이, 앞바퀴, 뒷바퀴로 구성되어 있습니다.

4) 제품의 특징

- 목욕실에서 안전하고 쉽게 이용하실 수 있습니다.
- 바퀴가 부착되어 있어 쉽게 이동이 편리합니다.
- 뒷바퀴는 한번의 동작으로 양쪽바퀴를 고정할 수 있습니다.
- 좌면에 구멍이 있어 물이 고이지 않고 물빠짐이 용이합니다.
- 등판 각도조절이 가능하여 편안함과 머리세발이 용이합니다.
- 보조손잡이 부착으로 등부위 세신시 안전하고 편리합니다.
- 목 받침대가 있어 편리합니다.

5) 제품 사용 및 성능

- 전체 높이 : 1050mm
- 전체 폭 : 500mm
- 전체 길이 : 870mm
- 중량 : 9.7kg
- 재질 : 고강도 알루미늄, 폴리 우레탄, EPDM RUBBER
- 최대 사용체중 : 95kg
- 원산지 : 대한민국
- 좌면 높이 : 425mm
- 방석 폭 : 400mm
- 팔받이 높이 : 210mm

6) 권장 신체 사이즈

- 신장 : 155 ~ 180cm 사용가능

4 기능별 조작방법 및 사용주의사항

1) 등판, 목 받침 사용방법

① 등판부를 세운다.



② 등판부 조절레바를 고정시킨다.

⚠ 주의 레바핀을 구멍에 확실히 고정 시키십시오. 위험합니다.



③ 목 받침대를 사용자의 신체에 맞게 맞춘다.



④ 목 받침대 조절레바를 고정시킨다.

⚠ 주의 목 받침대 조절 레바를 시계방향으로 돌려서 확실히 고정시키십시오.



⑤ 방석(우레탄패드)를 결합한다.

■ 방석부 패드를 본체에 맞추어 결합한다.



2) 팔받이 사용방법

① 팔받이레바를 본체와 해체한다.

- 팔받이 레바를 눌러서 본체와 분리시킨다.



② 팔받이를 뒤로 넘긴다.


- 사용시 필요성에 의해 자연스럽게 뒤로 넘긴다.



3) 브레이크 장치


① 브레이크 고정

- 브레이크를 발로 밟으면 (아래로)

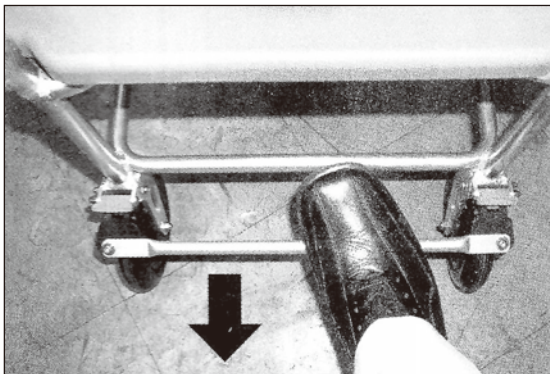

② 브레이크 해지

- 브레이크바를 발로 들면 (위로)

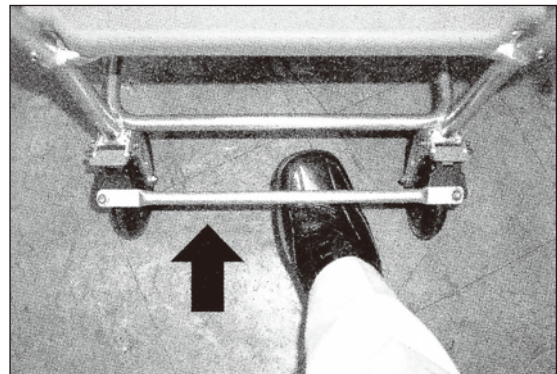

⚠ 위험 사용시 브레이크를 반드시 고정한 후 사용하십시오. 대단히 위험합니다.

4) 등판 각도조절

- ① 등판, 고정레바를 상방향으로 들어 올린다.
- ② 등판을 뒤로 눕힌다.
- ③ 등판 고정레바를 하방향으로 내려서 핀이 구멍에 “딸깍” 소리가 나면서 고정시킨다.



⚠ 주의 등판조절레바핀이 구멍에 확실히 고정됨을 확인하십시오. 후방전도의 위험이 있습니다.

5) 목 받침대 높낮이조절

- ① 목 받침 고정레바를 시계반대방향으로 2바퀴정도 돌린다.
- ② 목 받침을 사용자의 목부위에 맞추어 조절한다.
- ③ 목 받침 고정레바를 시계방향으로 돌려서 고정시킨다.



⚠ 주의 목 받침대 조절 레바를 시계방향으로 돌려서 확실히 고정시키십시오.

6) 사용자의 머리세발시

- 등판과 목 받침대를 조절하여 (그림)과 같이 사용합니다.

⚠ 위험 세발시 후방전도의 위험으로 주의하십시오.



(그림)

5 사용 후 손질방법

1) 방석/등받이(우레탄패드)의 손질방법

- 중성세제의 옅은 액을 스폰지나 부드러운 천에 묻혀 더러움을 제거한 뒤 깨끗한 물로 씻어 내리고 그늘진 곳에 말리거나 마른수건으로 닦아 주시면 됩니다.

주의

1. 수세미나 연마제 성분이 들어가 있는 스폰지는 사용하지 말아 주시기 바랍니다.
2. 염소계세제, 산성, 알칼리, 신나, 벤젠, 크레졸 등은 절대 사용하지 말아 주시기 바랍니다.

위험 (목 받침대)



 해제시 두바퀴 이상 회전하지 마세요

메 모

메 모