

목욕의자 WB-C100

당사 제품을 구매해 주셔서 대단히 감사드립니다.
제품을 안전하고 올바르게 사용하기 위하여 사용하기 전에
반드시 이 사용설명서를 읽어주시기 바랍니다.
또한, 읽으신 후에는 잘 보관하여 주시기 바랍니다.



목차 / CONTENTS

사용 전 주의사항	1P
사용상 주의사항	1P
사용방법	2P
좌석 높이 조절 방법	2P
손질방법	3P
패트 탈·부착 방법	3P
각부의 명칭 및 제품사양	4P
조립방법·접이방법	5P



WORLD CARE
(주) 월드케어



Venture for
Tomorrow

사용 전 주의사항

- 파이프에 변형이 없는지, 다리 고무에 금·파손·마모에 의한 이상이 없는지 등 각 부분을 반드시 점검하여 주십시오.
- 다리 고무가 확실하게 부착되어 있는지 여부를 확인하여 주십시오.
- 연장 파이프가 모두 같은 높이에 설정되어 있는지 여부를 확인하여 주십시오.
- 수발 시에는 사용자의 상태를 충분히 파악한 다음 사용하여 주십시오.

사용상 주의사항

! 경고 잘못된 방법으로 사용할 경우, 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있으므로 아래의 사항을 반드시 지켜 주십시오.

- 사용자가 자신의 신체를 충분히 안정 시킬수 없는 경우에는 보호자가 수발하여 주십시오. 발판으로 사용한다든지, 뛰어 올라 타지마십시오.
- 욕실내의 평평하고 안정된 장소에서 설치하고 사용하여 주십시오.
- 좌석을 꼭 눌러보아 흔들림이 없는지 확인하고, 만일 흔들릴 경우에는 좌석 및 연장 파이프가 확실하게 고정되어 있는지 여부를 확인하여 주십시오.
- 안전동작하중 체중을 반드시 지켜 주십시오.
- 목욕용 의자 이외의 용도로는 사용하지 마십시오.
- 등받이나 팔걸이를 붙잡고 일어서지 마십시오.
- 몸을 과도하게 뒤로 젖혀 등받이에 체중을 실지 마십시오. 또한, 한쪽의 팔걸이에만 과도한 체중을 실지 마십시오.


! 주의 잘못된 방법으로 사용할 경우, 상해를 입거나 물적손해가 발생할 가능성이 있으므로 아래의 사항을 반드시 지켜주십시오.

- 입욕동작은 신체를 충분히 안정시키고, 천천히 행하여 주십시오.
- 팔걸이만을 잡고서 잡아 당기거나, 들어 올리지 마십시오.
- 뜨거운 물에 닿게 하지 마십시오. 제품의 변형이나 화상의 원인이 됩니다.
- 패드의 내열온도는 50°C 입니다.
그 이상 온도의 물을 사용할 경우 변형될 수 있습니다.
- 미끄러운 바닥에서는 사용하지 마십시오.
- 비눗물 또는 샴푸 등으로 좌석이나 바닥에 닿는 부분이 미끌어질 수 있으므로 주의하여 주십시오.
- 사람이 앉은 상태에서 이동시키지 마십시오.
- 사용하지 않을 경우 직사광선이 드는 곳에 두지 마십시오.

사용방법

욕실에서 샤워를 하거나 몸을 씻을 때 사용하여 주십시오. 또한 팔걸이를 위로 올릴 수 있으므로 앉은 채로 손쉽게 몸의 방향을 바꿔서 이동할 수 있습니다.

■ 욕조 안으로의 이동 방법

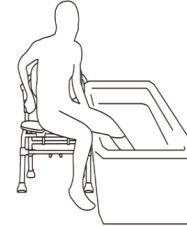

- 1 욕욕의자를 가능한한 욕조 가까이에 붙이고 욕조 가까이에 있는 팔걸이를 올려 주십시오.
- 2 몸의 방향을 바꿔 한쪽 다리씩 천천히 욕조 안으로 넣어 주십시오.

! 경고

- 반들반들하고 작은 타일이 설치된 장소에서는 사용하지 마십시오.
- 욕조안으로의 이동은, 신체를 확실하게 안정시킨 다음 천천히 행하여 주십시오.

좌석 높이 조절방법



좌석높이는 5단계로 조절할 수 있습니다. 높이 조절 버튼을 안쪽으로 누른 상태에서 연장 파이프를 아래·위로 움직여 조절하고 싶은 높이 눈금에 맞춘 다음 높이 조절 버튼을 놓아 주십시오. 높이 조절 버튼이 확실하게 고정되었는지 여부를 확인하여 주십시오.

! 경고

- 연장 파이프가 모두 같은 높이로 되어 있고 확실하게 고정되어 있는지 반드시 확인하여 주십시오.

손질방법

- 부드러운 천이나 스폰지로 욕실용 중성세제를 묻혀 오염을 닦아낸 다음 맑은 물로 세제를 씻어 주십시오. 그 다음 그늘에서 말리거나 마른 천으로 잘 닦아 주십시오.
- 수세미나 연마제가 들은 스폰지, 마사 등은 절대로 사용하지 마십시오.
- 염소계 세제·시너·크레졸 등은 절대로 사용하지 마십시오. 플라스틱 부분의 열화 및 파손의 원인이 됩니다.

패드의 탈·부착 방법



※ 등받이, 좌석의 패드는 떼어 내어 씻을 수 있습니다

■ 패드 떼는 방법

등받이, 좌석의 각각 뒤쪽에서 고정 돌기를 밀어 내십시오.

■ 패드 부착 방법

패드의 고정 돌기를 등받이, 좌석 각각의 패드 고정 구멍에 맞춘 다음 눌러서 끼운 후 패드의 가장자리를 좌석·등받이에 씌워 주십시오.



- 경고**
- 패드의 앞뒤가 바뀌지 않도록 주의하여 주십시오.
 - 패드가 확실하게 부착되어 있는지 확인하여 주십시오.

각부의 명칭 및 제품사양



모 델 명	WB-C100		
사 이 즈	약 W51xD55~63xH69~78 (cm)		
좌석 높이	약 H38~47 (cm)	좌석 사이즈	약 W42xD35 (cm)
최대 안전 동작하중	약 95 kg	중 량	약 2.8 kg
재 질	알루미늄 외		

■ 조립방법



좌석을 위쪽에서 꺾 누른 다음 좌우의 팔걸이를 내려 주십시오.

■ 접이방법



좌우의 팔걸이를 위로 올린 다음, 등받이를 잡고 좌석을 화살표 방향으로 올려 주십시오.

접은 상태에서 세워줍니다.



주의

- 손이나 손가락이 끼이지 않도록 충분히 주의하여 주십시오.
- 좌석이 완전하게 내려가 있는지 확인한 다음 사용하여 주십시오.

제품보증서

☐ 제품보증에 관하여

1. 본 제품에 이상이 있을 시 구입 후 1년간 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
2. 아래의 경우에는 무상 A/S를 받으실 수 없습니다.
 - 사용자의 취급 부주의로 발생한 고장
 - 사용자 임의의 내/외부 개조로 인한 고장
 - 천재지변에 의한 고장 (화재, 수해 등)
 - 소모성 부품의 마모 또는 수명이 다한 경우
 - 당사가 지정한 기사가 아닌 사람이 수리한 경우

☐ 서비스를 요청하시기 전에...

1. 사용설명서를 다시 한번 잘 확인해 주십시오.
2. 확인 후 이상이 있을 때는 구입처에 연락 하시거나 당사 고객센터에 연락해 주시면 신속 정확한 A/S를 받으실 수 있습니다.

☐ 준수 사항에 관하여

1. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
2. 보증서를 보관하지 못한 경우 불이익을 당할 수 있습니다.

제 품 명	구 입 일 자
WB-C100	

[판매원]



WORLD CARE

(주) 월드케어

주소: 경상남도 김해시 인제로 197, B동 412,414호
(인제대학교, 창조관)

Tel: 055) 724-2587 . Fax: 070-4325-2587

