

성인용보행기의 혁신! 코지워커 사용설명서

MODEL-P02



COZY WALKER
The Innovative Rollator

성인용보행기 일반 사용상 주의사항

◆ 아래 주의사항은 성인용보행기 사용시 사용자 안전을 위한 일반적인 주의사항입니다.
반드시 읽어 보시고 지켜 주시기 바랍니다.

! 성인용보행기 일반 사용 주의사항 !

다음과 같은 장소에서는 절대 사용하지 마십시오.

눈, 비, 동결된 곳 등 미끄러지기 쉬운 곳
계단이나 단 차이가 있는 곳, 에스컬레이터
버스 및 기차 등 이동수단의 내부

사용상 주의 사항

- 제품에 무리하게 힘을 가하여 사용할 경우 위험이 발생할 수 있습니다.
- 제품을 처음 조립할 때에는 반드시 본 사용설명서를 충분히 읽어 이해하시고 조립하시기 바랍니다.
- 가급적 보호자와 같이 조립하시기 바랍니다
- 조립 후 반드시 브레이크의 사용법을 숙지하시고 사용 전 테스트 바랍니다.
- 도랑, 움푹 파여 바퀴가 빠지는 곳에서는 전도될 위험성이 있으니 피해서 이동하시기 바랍니다.
- 모래, 진흙, 웅덩이 에서는 사용하지 마십시오.
- 핸드브레이크를 잡은 상태 혹은 주차브레이크가 걸린 상태에서 보행하지 마십시오.
- 브레이크는 한정된 능력만 갖고 있으니 과신하지 말고 사용하시기 바랍니다.
- 가파른 경사로에는 진입하지 마십시오
- 경사로에 세워 두지 마십시오. 브레이크를 걸어도 움직일 수 있습니다.
- 교통이 혼잡한 지역, 건널목, 야간 보행의 경우 충분히 조심하여 보행하십시오.
- 좌석 면에 걸터앉거나 올라서지 마십시오.
- 비탈진 경사면에서 보행기에 앉지 마십시오.
- 최대 사용자 체중은 80kg입니다.
- 사용 후 손질하여 마른 상태에서 실내에 보관하여 주시기 바랍니다.
- 바퀴가 많이 마모되면 브레이크가 안전하게 걸리지 않을 수 있습니다.
이런 경우에는 반드시 바퀴를 새로 교체하시고 사용하셔야 합니다

- 당사사이트(www.cozycare.co.kr)에서 사용설명서 및 사용안내 동영상을 보실 수 있습니다. 참고하시면 쉽게 사용하시는데 도움이 됩니다.
- 분해하거나 수리는 반드시 당사 지정 장소에서 하시고 제품에 대한 불확실한 점등은 당사로 문의하시기 바랍니다.

본 제품을 구매해 주셔서 대단히 감사합니다.

본 제품은 보행 가능한 노약자 및 고령자가 보다 안정되게 보행할 수 있도록 사용하는 보행보조기구입니다. 자립보행이 불가능 하신 분께는 사용이 적합하지 않을 수 있습니다. 전문 복지용구 상담원 등에게 상담 후 사용하시기 바랍니다. 본 사용설명서는 반드시 숙지 하시고 보관하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.

코지워커 사양안내

제품사양			
제품명	보행차	모델명	코지워커 P02
규격	W520 x L640 x H 880~1000		
권장사용신장	155~170cm	최대사용체중	80 KG
재질	알루미늄 , 합성수지	제품중량	9 KG NET
바퀴형식	4륜형	브레이크	좌우 레버타입 , 양방향 조작형
의자	접이식 45 x 26.5cm	접이방식	좌우 X자 접이방식
원산지	국내산		
주요부품	핸들부 회동 클램프 / 하박거치대 / 안전벨트 등		

코지워커 특징 및 사용안내

코지워커는 일반 성인용보행기와 달리

- 1) 운행 중 신체의 하중을 분산시켜 편안하고 안전한 보행을 하실 수 있도록 해줍니다. → 팔받침대 사용안내 참조
- 2) 사용자의 신체적 특성과 보행능력에 따라 신체맞춤 조절기능이 있습니다. → 핸들부 사용안내 참조
- 3) 처음 사용하시기 전에 반드시 본 사용설명서를 잘 읽어 보시고 사용자 신체에 알맞게 조절하여 주신 후 사용하시기 바랍니다.

제품 각 부분의 설명(P02)



코지워커 사용 예



© 제품은 개선을 위하여 사양의 일부가 고지 없이 변경될 수 있습니다. ©

1. 제품 구성



박스에는 ①차체와 ②팔받침대 그리고 ③수납가방과 ④사용설명서가 들어있습니다. 박스를 개봉하시고 모든 품목이 이상 없는지 먼저 확인하여 주십시오.

팔받침대 사용안내

팔받침대는 테이프로 표시된 위치에 자연스럽게 팔(하박)을 위치시키고, 손은 핸들과 브레이크레버를 잡고 사용 하십시오.

2. 조립 (빠른 사용안내)

본 제품의 차체는 모두 조립 완료된 상태로 아래와 같은 순서로 간단하게 조절하여 바로 사용하실 수 있습니다.

1) 차체 펼치기와 팔받침대 좌측으로 빼내기

차체를 좌우로 벌려 이 때 <그림 1>과 같이 차체를 완전히 펼치지 않은 상태에서 팔받침대를 손으로 잡고 좌측 바깥쪽으로 이동시켜 <그림 2>와 같이 팔받침대를 차체 바깥쪽으로 빼내어 위치시킵니다. (팔받침대는 아래방향 혹은 반대로 위로도 빼내실 수 있습니다.)




<그림 1>



<그림 2>

2) 의자 고정하기

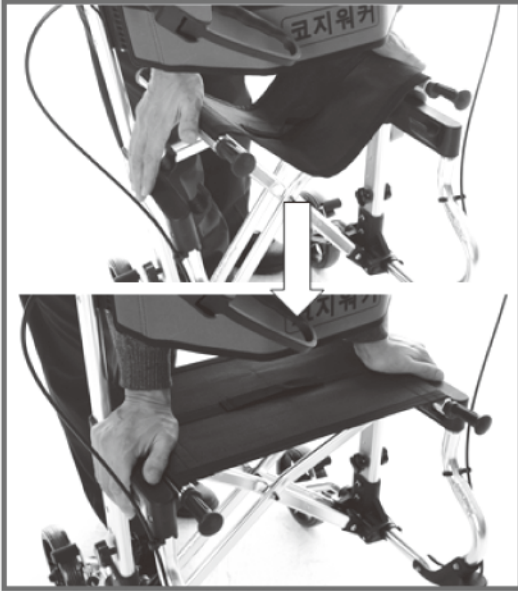

〈그림 3〉

팔받침대를 좌측으로 빼낸후 〈그림 3〉과 같이 의자를 양손으로 눌러 차체에 완전하게 고정시킵니다. 차체가 완전히 펼쳐지게 되며 의자 면이 그림과 같이 일직선으로 평평하게 됩니다.

의자가 완전하게 제 위치에 고정이 되지 않으면 팔받침대가 좌우 거치봉에 맞게 결합이 되지 않습니다.

주의 : 의자를 양손으로 고정시 손이 끼지 않도록 주의 하십시오.

3) 팔받침대 고정하기

〈그림 4〉와 같이 팔받침대를 회전시킨 후 〈그림 5〉와 같이 오른쪽 팔받침대 거치봉에 끼워 고정시킵니다.



〈그림 4〉




〈그림 5〉

4) 핸들부의 구성과 핸들 고정하기

핸들부의 구성

- ① 핸들
- ② 브레이크 레버
- ③ 핸들봉
- ④ 고무링
- ⑤ 고정클램프

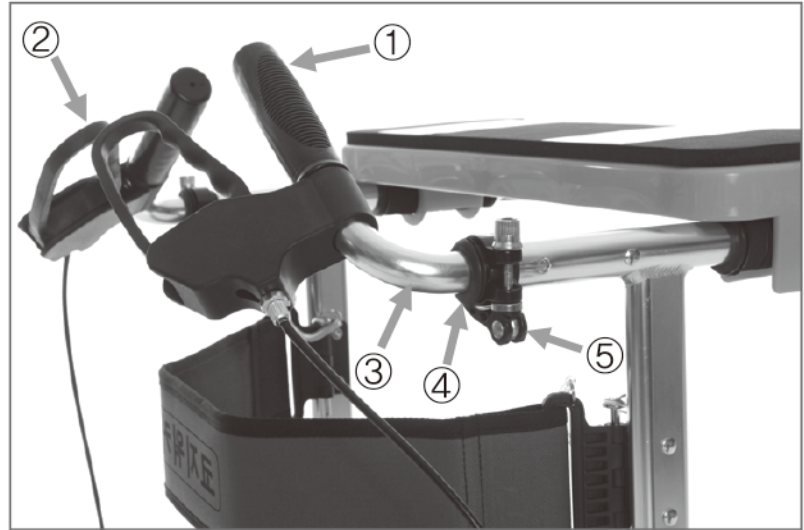

핸들의 고정

왼쪽 핸들은 고정된 상태에서 출고되며 따라서 오른쪽 핸들만 조절한 후 고정하시면 됩니다.

〈그림 6〉과 같이 고정클램프의 손잡이가 아래로 향하여 열린 상태에서 핸들을 돌려서 왼쪽 핸들과 동일한 높이로 좌우 핸들이 대칭의 상태가 되는 상태에서, 〈그림 7〉과 같이 고정클램프 손잡이를 위쪽 방향으로 올려 고정시킵니다. 〈그림 8〉은 고정클램프가 닫혀 고정된 상태입니다.

(* 왼쪽의 고정클램프를 참조하시면 쉽게 알 수 있습니다.)



〈그림 6〉



〈그림 7〉





〈그림 8〉

주의 사항



핸들은 왼쪽그림과 같이 좌우로 회전만 시켜 사용합니다. 핸들을 앞으로 당겨 빼내면 다시 결합하기 어려우니 고무링이 있는 위치까지 삽입된 상태에서 빼내지 마시기 바랍니다.

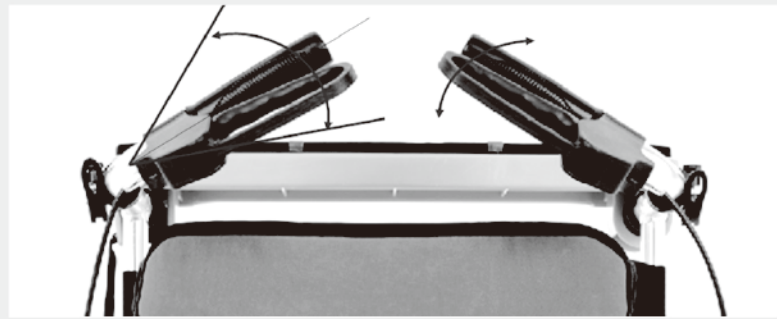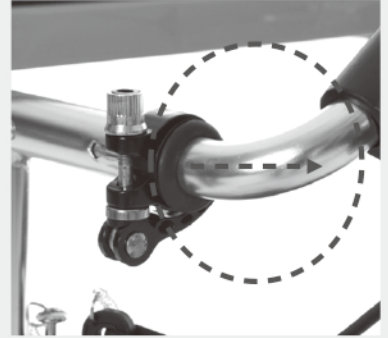


핸들부 맞춤조절

좌우 핸들은 원하시는 각도로 조절하여 사용하실 수 있습니다. 신체적 조건에 따라 가장 편하신 각도로 고정하여 사용하시기 바랍니다.

5) 높이 조절하기

사용자의 키 및 신체조건에 따른 높이 조절은 매우 중요합니다. 보행 시 가장 편안한 높이로 조절하시어 사용하시기 바랍니다.

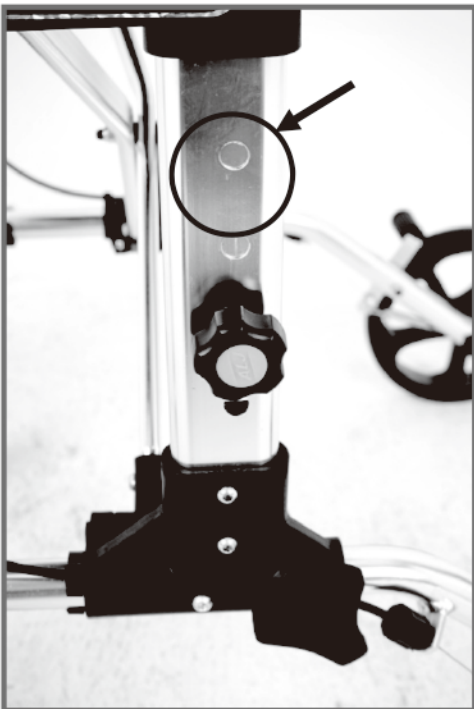

앞쪽과 뒤쪽의 높이조절노브를 풀러 원하시는 높이의 구멍에 위치시키고 다시 앞뒤로 완전히 조여 고정시킨 후 사용하시면 됩니다.


고정클램프의 구성과 조절



조절노브를 시계방향으로 돌리면 클램프가 조여지고 따라서 삽입된 핸들파이프가 더욱 강하게 조여집니다.

주의

- 1) 고정클램프는 손잡이를 아래 위로만 작동하여 사용하기 바랍니다.
- 2) 고정클램프는 반드시 잠긴 상태에서 사용 하셔야 합니다.
- 3) 고정클램프 조절노브가 완전히 빠지지 않도록 주의하시기 바랍니다. 완전히 빠지면 클램프 손잡이 등 부속이 빠져 잊어버리실 수 있습니다.
- 4) 너무 강하게 조이면 고정클램프 손잡이를 작동하기 어려우며 클램프의 파손 및 고장 위험이 있습니다.

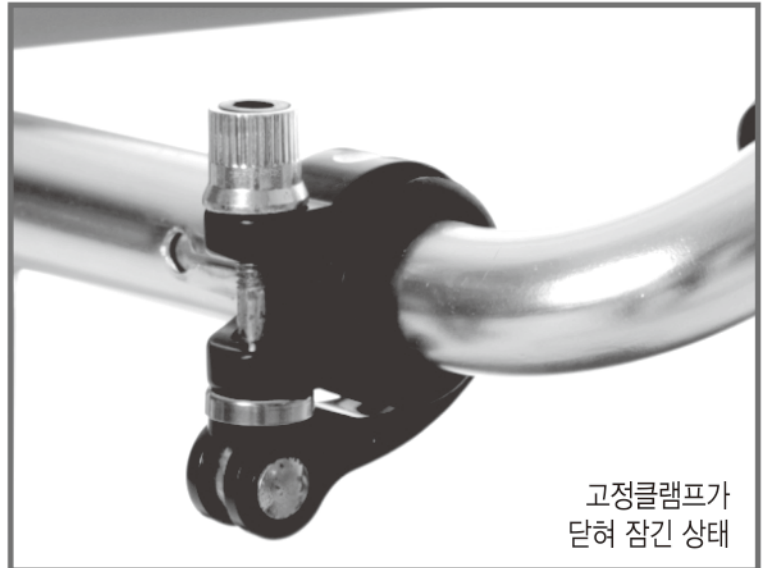

고정클램프를 열어 오픈시키는 경우

- ① 보행기를 접을 때
한 쪽 고정클램프만 열고 핸들을 아래방향으로 위치 시킨 상태에서 접으시면 됩니다.
- ② 좌석에 앉을 때
양 쪽 고정클램프를 열고 양쪽 핸들을 위로 위치 시키면 보다 편하게 앉으실 수 있습니다.

1. 보행

높이조절을 한 후 팔(상박)을 팔받침대에 편하게 위치시킨 후 아래 <그림 9>와 같이 핸들과 브레이크 레버를 가볍게 잡고 보행합니다.



<그림 9>




<그림 10>



<그림 11>

그 외 보행능력과 상황에 따라 <그림 10>, <그림 11>과 같이 다양하게 이용하실 수 있습니다. 그러나, 경사가 있는 곳이나 보행속도가 빠른 경우에는 반드시 브레이크 레버를 잡은 상태에서 보행하십시오.

2. 브레이크 사용안내

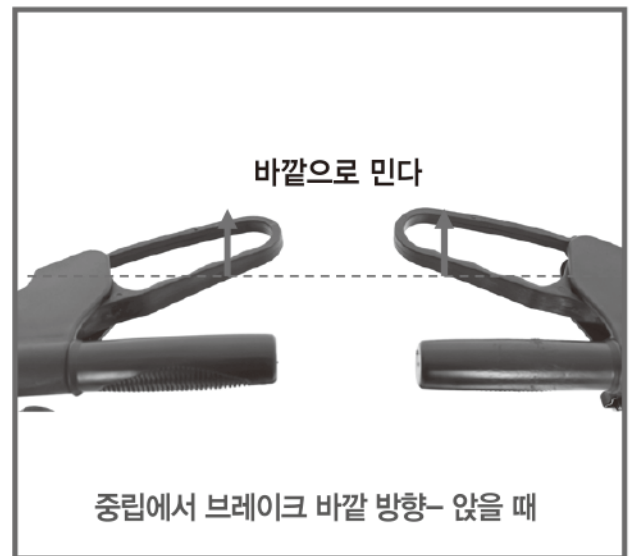

주의 : 의자에 앉을 때에는 반드시 좌 우 양 쪽 브레이크를 모두 아래 방향으로 완전히 밀어 좌 우 양쪽 바퀴가 모두 제동된 상태로 사용하셔야 합니다.

3. 의자에 앉기


의자에 앉으시기 전에 반드시 브레이크를 바깥쪽으로 밀어 고정시킨 후 팔받침대를 회전시키고 좌석에 앉으십시오. <그림 12>와 같이 핸들로 인해 등이 불편하실 때에는 핸들부를 <그림 13>과 같이 고정클램프를 풀고 핸들을 바깥쪽으로 회전 시킨 후 앉으시면 보다 편안하게 앉으실 수 있습니다.



<그림 12>



<그림 13>

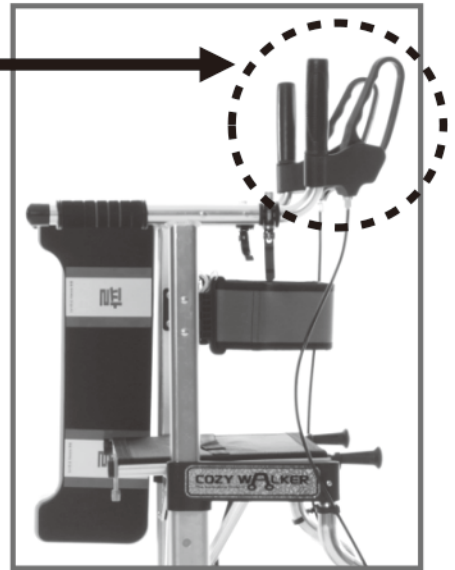

4. 보행기 접기

보행기를 접어 보관하거나 차량에 적재 시 아래와 같이 팔받침대를 왼쪽으로 돌려 내리고, 고정클램프를 열고 한 쪽 핸들을 아래로 내린 후 의자손잡이를 잡아 당겨 접으시면 됩니다.



이 때 한 쪽 팔로 차체를 누르면서 손잡이를 당기면 쉽게 접으실 수 있습니다.

제품보증서

- 제조 결함에 의한 무상서비스는 구입일로부터 1년 입니다.
- 사용자 과실에 의한 서비스 및 부품의 정상마모에 따른 서비스는 유료 입니다.
 - 사용자의 부주의에 의한 고장
 - 당사 지정 장소 외에서 분해 및 수리, 개조에 의한 고장
 - 정상 사용에 따른 마모 및 수명이 다한 경우
 - 화재 및 수해 등 천재지변에 의한 경우
- 본 제품은 전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙에 따른 안전확인신고를 필한 제품이며, 생산물 배상책임보험에 가입한 제품으로 소비자 피해보상을 받을 수 있습니다.
- 바퀴와 핸들부 부품의 교환은 정격 사양에 맞는 제품으로 정상교환하시고 가급적 당사 및 구입처에서 A/S받으십시오.
- 사용 중 이상이나 의문이 있으시면 당사 혹은 구입처로 문의 하십시오.

제품명	구입일자
코지워커 P02	



본 제품은 특허청 특허 및 디자인 등록/ 상표등록을 마친 제품으로 불법복제 및 무단 사용은 법적으로 처벌을 받을 수 있습니다.



어르신을 위한 기업 **코지케어**
경기도 파주시 조리읍 고봉로 918-2 2동
TEL : 031-944-3326 www.cozycare.co.kr