

## E:ZO (이조)



### 외부선 노출을 최소화한 더 안전한 구조

- 선 걸림 위험성 원천 제거
- 보행차 이용 시 안전성 강화



### 세련되고 우아함을 살린 심플한 디자인

- 건강한 기능에 고급스러움을 더한 세련된 디자인

제품을 받으시면 제품의 비닐 포장을 제거한 후  
다음과 같이 차체를 펼쳐주세요



- 1 폴딩바 가운데를 잡고 화살표 방향으로 당깁니다
- 2 폴딩바 양쪽 끝이 그림과 같이 집니다
- 3 그 상태로 차체를 앞으로 가볍게 밀어줍니다



펼치기 전



펼친 후

## 제품 품질 보증서

### 교환 / 환불 / AS정책

- 본 제품에 이상이 있을 경우 구입 후 1년간 무상 보증수리를 받으실 수 있습니다.
- A/S 요청시 본 보증서가 필요합니다.

#### ※무상 A/S 대상이 아닌 경우

- 사용자 부주의로 인한 제품 손상
- 사용자의 제품 임의 개조로 인한 고장
- 천재지변에 의한 고장
- 차체의 자연노화
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 제조사가 지정한 A/S 담당자가 아닌 자가 수리한 경우

#### ※교환/환불/AS 불가능한 경우

- 단순 변심
- A/S 정식 접수없이 임의로 반송한 경우

### 제품 및 AS문의 (CONTACT)

(주)올비트앤 ORBITN Co., Ltd.

08501  
서울특별시 금천구 가산디지털1로 233, 에이스하이엔드9차, 816  
#816, Acehighend -Tower, 233, Gasan digital 1ro,  
Geumcheon -gu, Seoul, Korea

T. 02)6116-6190 (+82-2-6116-6190)  
E. sales@orbitn.co.kr



한국시스템인증원(주)으로부터 KS Q ISO 9001과  
KS I ISO 14001 표준에 따라 인증 받은 품질 및  
환경 경영시스템에 의해 제조된 (E:ZO(이조))는  
생산물배상책임 보험에 가입된 제품입니다.



안전확인신고필증번호:  
B191A001-19001

[품 명]	고령자용보행보조차
[종 류]	일체식
[모 델 명]	E:ZO(이조)
[제조년월]	별도표기
[제조국명]	대한민국
[제조자명]	(주)올비트앤

# E:ZO [이조] 취급설명서



고령친화우수제품(M06090164001)

- 이 제품은 실내사용을 포함하여 주로 고령자가 **외출할 때 보행이나 운반 및 휴식에 이용하는 제품으로 자립 보행할 수 없는 사람** (예 : 손잡이 등을 붙잡지 않으면 보행할 수 없는 사람)의 **사용에는 적합하지 않습니다.**
- **사용전에 본 취급설명서를 반드시 읽으시고, 읽으신 후에는 잘 보관해주시고.**

### 사용상 주의

- 본 제품의 최대사용 체중(100kg)을 지켜 주시기 바랍니다.
- 사용 전에 각부를 점검하고, 특히 핸드브레이크의 성능에 대해서 충분히 확인해서 사용하십시오.
- 단차나 도랑이 있는 곳에서의 사용은 충분히 주의하십시오.
- 교통이 혼잡한 곳 및 야간에서의 사용은 충분히 주의하십시오.
- 핸들에 기대어 차체만 앞으로 움직이지 않도록 주의하십시오.
- 주차 브레이크의 경우는 잠김 상태에서 운행 시 바퀴에 손상을 줄 수 있습니다.
- 경사로 및 내리막길은 핸드 브레이크를 조절하면서 운행하십시오.
- 보관 시에는 바구니의 내용물을 비운 상태로 사용하십시오.

### 조립 또는 조절, 접이 등의 방법 또는 주의사항

- 무리한 힘을 주어 조작하면 고장의 원인이 됩니다.
- 높이조절, 차체 접이 시 신체 일부분이 끼이지 않도록 충분히 주의를 기울여 주십시오.
- 차체의 높이조절은 좌우 동일한 높이에서 높이조절 클러치의 덮개를 확실히 닫히고 핸들이 잘 고정되어 있는지 확인 후 사용하십시오.
- 바구니에 짐을 넣어둔 채 차체를 접지 마십시오.
- 차체를 접은 후 의자에 앉거나 하중을 가하지 마십시오.

### 주차용 브레이크 및 핸드브레이크 조작방법

- 핸드 브레이크를 잡거나 주차 브레이크를 작동시킨 상태에서 보행하지 마십시오.
- 주차 브레이크를 작동시키고 뒷바퀴가 움직이지 않는 것을 확인하고 사용하십시오.

### 의자 사용방법

- 의자에 앉을 때는 반드시 주차 브레이크를 작동시켜 뒷바퀴가 고정되어 있음을 확인하고 천천히 앉으십시오.
- 의자를 발판으로 사용하지 마십시오.
- 앉을 때 몸의 중심을 과도하게 등받이 쪽 혹은 좌, 우로 향하게 하면 중심을 잃을 수 있으니 주의하십시오.
- 의자에서 일어설 때에는 차체가 움직이지 않는지 확인한 후 천천히 일어나십시오.
- 경사진 면에서는 사용하지 마십시오.

### 바구니 사용방법

- 바구니의 최대 적재량(5kg) 이상의 짐을 실지 마십시오.
- 바구니에 영유아를 싣거나, 의자 위에 사람을 태운 채 이동하지 마십시오.

### 보관방법 및 손질방법

- 직사광선, 눈, 비 등을 피하여 보관하십시오.  
고온 다습한 환경은 고장이나 변형의 원인이 될 수 있습니다.
- 타이어 및 브레이크 마찰을 주기적으로 확인하시고 필요시 보수해 주시기 바랍니다.
- 화기 근처에 두지 마십시오. 모양이 변형될 수 있습니다.
- 비 등으로 젖은 곳은 마른 천으로 닦아내십시오. 진흙 등이 묻었을 때는 살짝 물에 묻힌 천으로 닦아낸 후 마른 천으로 닦아내십시오.
- 염소계세제 등은 제품의 파손을 야기할 수 있으므로 사용하지 마십시오.

### 제 원 (폭\*너비\*높이 / 폭\*너비 / 단위 : mm)

[차체크기]	510*580*824(~913)	[보관크기]	510*410*886
[차체중량]	6.5kg	[적재중량]	5kg
[의자높이]	430	[의자치수]	360*230
[차체소재]	알루미늄, 플라스틱	[높이조절]	824~913
[색 상]	실버(s)	[바퀴직경]	187(폴리프로필렌)

### 정면 사진



### 1 차체 높이조절

- ▶ 핸들 양쪽 덮개를 각각 열어줍니다.
- ▶ 핸들의 **좌우측 끝을 잡고 동시에** 위로 당기거나 아래로 밀어 원하는 높이에 맞춥니다. (발로 바퀴 사이의 서포트바를 가볍게 누른 채로 시행합니다. 높이조절 시 다소 뽁뽁함이 있을 수 있습니다.)
- ▶ 원하는 높이를 맞추고 덮개를 홈에 맞추어 딸깍 소리가 나도록 닫습니다.



### 2 핸드 브레이크



▶ 위 그림과 같이 위쪽으로 당겨서 사용합니다.

### 3 주차 브레이크



▶ 양손으로 브레이크바 양끝을 아래 방향으로 힘껏 누르면 딸깍하는 소리가 나면서 고정됩니다.  
▶ 바퀴가 움직이지 않는지 확인합니다.

### 4 차체 접기

한 손으로 핸들을 잡아서 차체를 고정시킨 채로 다음 순서를 따라 하세요.

- 1 폴딩바 가운데를 잡고 화살표 방향으로 당깁니다.
- 2 폴딩바 양쪽이 그림과 같이졌는지 확인하세요.
- 3 그 상태로 서포트바를 발등을 이용하여 **위쪽방향**으로 들어올립니다.
- 4 차체가 그림처럼 접히면 폴딩바에서 손을 놓습니다.



### 5 조향장치

- ▶ 차체의 앞 바퀴를 그림과 같이 놓습니다.
- ▶ 조향 장치를 손가락을 이용하여 위쪽 방향으로 들어올려 T자 홈에 끼워 넣으면 앞 바퀴가 회전하지 않습니다. (직진용)
- ▶ 조향 장치를 아래 방향으로 내려 원래 위치에 놓으면 바퀴가 360도 회전합니다.

