

# 사용설명서

성인용 보행기

뉴 라이트 스텝



가방 색상

측광 바퀴  
적용



(주)삼주유니콘

10064 경기도 김포시 양촌읍 석모로16번길 80  
Tel : 031) 988-4363~5 Fax : 031) 988-3864

E-mail : samjococo@hanmail.net / Homepape : www.sj4363.com

## 성인용 보행기

# 뉴 라이트 스텝

당사의 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다.

제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 숙지하시고, 제품의 기능과 조작방법을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다.

본제품의 주로 고령자분의 외출 시 보행등에 사용하기 위해 제작된 것으로 자립보행이 불가능한 분들이 사용하시기에 적합하지 않습니다.

사용중 문제점 발생 시에는 구입처 및 (주)삼주유니콘으로 연락해주시기 바랍니다.

### ■ 사고나 고장의 방지를 위하여 아래의 주의사항을 꼭 지켜 주십시오.

1. 반드시 제품의 편 후 사용해 주시기 바랍니다.
2. 유아나 어린이 조작하지 않아야 합니다.
3. 2인 이상의 동시 사용은 불가합니다.
4. 의자에 사람이 앉아있는 상태에서 운행하지 마십시오.
5. 의자 위에 올라서지 마십시오.
6. 비, 눈, 얼음 등 미끄러지기 쉬운 장소에서는 사용하지 마십시오.
7. 에스컬레이터에서는 사용하지 마십시오.
8. 버스, 전철 등 교통수단의 실내에서는 사용하지 마십시오.
9. 주차시 주차 브레이크 **노란색 레버**를 눌러서 잠김 상태에 사용해 주십시오.

### ■ 사용전 주의(점검)사항

1. 제품의 정확히 펼쳐있는지 확인하여 주십시오.
2. 제품의 기능 및 작동방법에 대해 정확 숙지 후 사용해 주십시오.
3. 펼때나 접을 때 손가락 등이 끼지 않도록 주의해 주십시오.

### ■ 사용중 주의사항

1. 비나 바람등 기상조건이 나쁠때에는 사용을 삼가하여 주십시오.
2. 모래나 흙, 자갈길, 물 웅덩이가 있는 곳에서는 가능한 사용을 자제 해 주세요.(녹이나 작동불량의 원인이 됩니다.)
3. 교통이 혼잡한 곳, 오르막 길이나 선로의 횡단또는 야간의 사용시에는 충분한 주의해 주십시오.
4. 불 근처에 방치해 두지 마십시오.
5. 가방 이외의 곳에는 짐을 넣거나 걸지 마십시오.

### ■ 관리방법

1. 비를 맞게 한다거나 제품에 모래나 흙이 묻은 상태로 방치하지 마십시오.
2. 비를 맞았을 경우나 더러워졌을 경우에는 부드럽고 마른 천으로 깨끗이 닦아 주세요.
3. 가방이 더러웠을 경우에는 부드러운 천으로 닦아주거나, 분리하여 세탁 하십시오
4. 여름 더운날 이나 추운 겨울날에는 밖에 방치 하지 말고, 비닐이나 천이 햇빛으로 인해 변색되거나 추위로 딱딱해져서 파손될 우려가 있습니다.
5. 윤활유나 신나 또는 벤젠 등 휘발성의 용제를 사용하지 마십시오.
6. 임의로 분해하거나 개조하지 마십시오

# 성인용 보행기

## 뉴 라이트 스텝

### ■ 뉴라이트 스텝 각부명칭 ■



# 성인용 보행기

## 뉴 라이트 스텝

### ■ 접고 펴는 방법 ■

① 접이장치를 화살표 방향으로 올림



③ 팔걸이를 화살표 방향으로 내림



② 바퀴가 옆으로 벌어짐

### ■ 바퀴회전조절장치 사용법 ■



■ 제품 출고시에는(사진①)에는 직진으로 조정되어 있습니다.

사진②처럼 90도로 내리면 좌·우 35도 회전합니다.

사진③처럼 180도로 내리면 360도 회전합니다.

양쪽 바퀴조절장치를 모두 조정해 주셔야 하며, 급급적 직진 또는 35도 회전가능상태로 사용하시기를 권장합니다.

# 성인용 보행기 뉴 라이트 스텝


## ■ 핸드브레이크 및 주차브레이크 버튼 ■

### 핸드브레이크



- 핸드브레이크를 몸쪽으로 당기면 브레이크가 작동합니다

### 주차브레이크

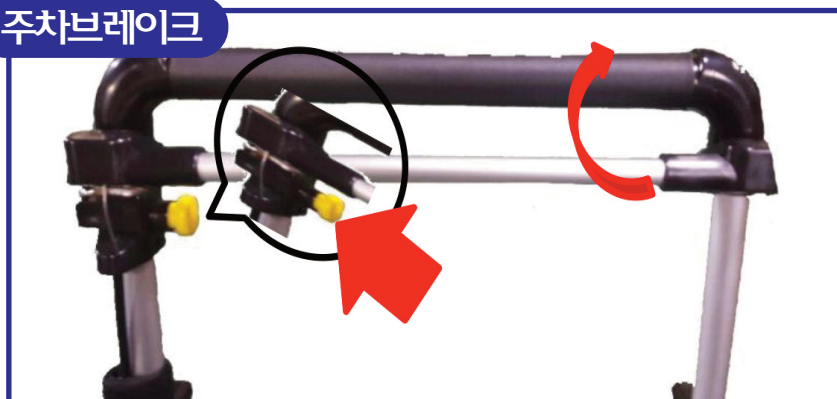

- 주차브레이크 장치를 누르면 주차브레이크가 작동합니다.
- 핸드브레이크를 몸쪽으로 당기면 주차브레이크가 풀립니다.

# 성인용 보행기

## 뉴 라이트 스텝

### ■ 핸들 높이 조절 ■



사진 ①



사진 ②



사진 ③

- 사진①의 버튼을 누르면(사진②) 사진③처럼 높이가 3단계로 변경됩니다.
- 양쪽의 높이조절장치를 동시에 움직이셔야 합니다.
- 체형에 맞는 높이로 사용하십시오.

### ■ 제품 사양 ■

차	제	앞바퀴회 전차(캐스터)/주차스톱퍼/의자/핸드브레이크 부착
중	량	7.0Kg(±0.2 증감될 수 있음)
가	방 색 상	블루,핑크(색상 및 디자인 변경될 수 있음)
사	용 시 규 격	높이 855/895/935 앞뒤폭 570 좌우폭 490(mm)
보	관 시 규 격	높이 910/950/990 앞뒤폭 345 좌우폭 490(mm)
의	자 규 격	높이 470 가로 318 세로 315
적	재 중 량	가방 : 10Kg 이하 의자 : 100Kg 이하
품	질 보증 기간	구입일로부터 1년

## 성인용 보행기

# 뉴 라이트 스텝

### 보증 기준

1. 본 제품의 보증기간은 구입일로 부터 1년입니다.
2. 보증기간 내에는 제품의 결함에 대해서는100%무상 수리가 가능하나 사용자의 책임에 의한 것은 실비가 청구됩니다.
3. 다음의 사항은 무상 서비스에서 제외 됩니다.
  - 가) 잘못된 사용법이나 손질 불량에 따른 것
  - 나) 바퀴의 자연 마모
  - 다) 사용자의 개조 또는 변형에 의한 것
  - 라) 재해, 사고 등에 의한 것
4. 사용한 제품에 대해서는 교환할 수 없습니다.
5. 제품에 대한 각종 문의는 구입점 또는 제조사에 직접 연락해주시시오.

### 구입시 기재사항

- 구 입 일 시 :           년           월           일
- 구입대리점 주 소 :
- 구입대리점 전화번호 :

#### ■ 제조일자

제조일자는 구입시 박스의 상부에 표기되어 있습니다.

#### ■ 사용설명서를 반드시 읽은 후 보관하세요.



(주)삼주유니콘

10064 경기도 김포시 양촌읍 석모로16번길 80  
Tel : 031) 988-4363~5 Fax : 031) 988-3864

E-mail : samjococo@hanmail.net / Homepape : www.sj4363.com