

사용설명서

성인용 보행기 SC-700

Handiness , Comfortable , Hunmanism Design



당사 제품을 구매해 주셔서 대단히 감사드립니다.
제품을 안전하고 올바르게 사용하기 위하여 사용하기 전에
반드시 이 사용설명서를 읽어주시기 바랍니다.
또한, 읽으신 후에는 잘 보관하여 주시기 바랍니다.

목차 / CONTENTS

사용전 주의사항	1P
사용상 주의사항	1~2P
손질방법	2P
보관방법	2P
각부의 명칭 및 제품사양	3P
차체의 접이방법	3P
그립 사용방법	4P
지팡이걸이 사용방법	4P
좌석 사용방법	5P
원·투·쓰리 캐스터 사용방법	5P
핸드·주차 스톱퍼(브레이크)사용방법	5P

전도 및 사고방지를 위하여 아래의 사항은 반드시 지켜주시기 바랍니다.

사용전 주의사항

- 조립시에는 주위에 사람이 없는지 확인하여 주십시오.
- 조립, 접이 및 조절은 확실하게 행하여 주십시오. 또한 손가락 등이 끼이지 않도록 주의하여 주십시오.
- 핸드 스톱퍼(브레이크)와 주차 스톱퍼(브레이크)의 사용시 뒷바퀴 양쪽이 확실하게 고정되는지 여부 및 해제하였을 경우 뒷바퀴가 부드럽게 회전하는지 여부를 확인하여 주십시오.
- 나사 등이 느슨해지지 않았는지, 그림이 고정되어 있는지 여부를 확인하여 주십시오.
- 바퀴 및 스톱퍼(브레이크)의 마모가 없는지 확인하시고 필요에 따라 교환하여 주십시오. 교환하실 경우에는 구입판매점 또는 당사 고객센터로 연락하여 주시기 바랍니다.
- 제품을 사용하실 때에는 반드시 자신의 몸상태를 확인하시고 안전하게 사용하실 수 있는 지 없는지 판단하여 주십시오. 몸상태에 따라 전도 등 생각치 않은 사고로 이어질 위험성이 있습니다.

경고 아래의 장소에서는 절대로 사용하지 마십시오

- 버스·전철의 안이나 에스컬레이터
- 비·눈·빙판 등으로 미끄러 지기 쉬운 장소

주의 아래의 장소에서는 충분히 주의하여 사용하십시오

- 경사진 길·도랑·단차가 있는 장소, 교통량이 많은 장소 및 혼잡한 장소를 지날 경우
- 야간에 외출할 경우
- 모래·진흙이 있는 장소, 물웅덩이를 지나는 경우

사용상 주의사항

경고 잘못된 방법으로 사용할 경우, 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있으므로 아래의 사항을 반드시 지켜 주십시오.

- | | |
|-------------|---|
| 보
행
시 | ● 그림이외의 부분을 잡고 보행하지 마십시오. |
| | ● 그림을 한손으로 조작하지 마십시오. |
| | ● 그림에 몸을 기대거나, 물건을 매달아 두지 마십시오. 차체가 앞으로 움직이거나 전도될 수 있어 위험합니다. |
| | ● 핸드 스톱퍼(브레이크)를 사용하실 경우에는 양쪽을 동시에 잡아 주십시오. |

- | | |
|-----------------------|--|
| 좌
석
사
용
시 | ● 좌석에 앉으실 때에는 반드시 주차 스톱퍼(브레이크)를 걸어 주십시오. |
| | ● 좌석에 앉거나 일어서실 때에는 차체가 움직이지 않는 것을 확인하신 다음 천천히 몸을 움직여 주십시오. |
| | ● 최대사용자 체중을 반드시 지켜주십시오. |

- 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오

주의

잘못된 방법으로 사용할 경우, 상해를 입거나 물적손해가 발생할 가능성이 있으므로 아래의 사항을 반드시 지켜 주십시오.

- | | |
|-------------|--|
| 보
행
시 | ● 핸드 스톱퍼(브레이크)를 잡은 상태, 혹은 스톱퍼(브레이크)를 걸은 상태에서 보행하지 마십시오. |
| | ● 보행시에는 반드시 좌석을 펴 주십시오. |
| | ● 차체에서 떠나실 경우에는 반드시 스톱퍼(브레이크)를 걸어 주십시오. 또한 비상구·소화기·소화전의 앞에 방치하지 마십시오. |
| | ● 스톱퍼(브레이크)는 자동차의 스톱퍼(브레이크)와 구조적으로 다르므로 과신하지 마십시오. |
| | ● 경사로에는 주차하지 마십시오. 경사로에서는 스톱퍼(브레이크)가 걸려 있어도 움직일 가능성이 있어 대단히 위험합니다. 부득이한 경우에는 움직이지 않도록 충분히 주의하여 주십시오. |
| | ● 건널목 같은 고랑을 넘을 경우에는 앞바퀴가 끼이지 않도록 충분히 주의하여 주십시오. |



- | | |
|-----------------------|---|
| 좌
석
사
용
시 | ● 뒷쪽 고정 스톱퍼(브레이크)가 잘 고정되어 있는지 확인 후 앉아 주십시오. |
| | ● 경사로 같은 경사진 곳에서는 앉지 말아 주십시오. |
| | ● 좌석 끝에 살짝 걸터 앉지 마십시오. |
| | ● 차체를 발판용으로 사용하지 마십시오. |

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 바
구니
사
용
시 | ● 바구니 적재하중 이상의 무거운 물건을 넣지 마십시오. |
| | ● 바구니에 물건을 넣은 채로 접지 마십시오. |
| | ● 바구니 안에 유아를 태우지 마십시오. |

손질방법

- 비 등으로 젖은 경우에는 마른 천으로 닦아 주십시오. 진흙이나 먼지가 묻은 경우에는 물에 적신 천을 꼭 짜서 닦아 내신 다음 마른 천으로 닦아 주십시오.
- 바구니가 더러워졌을 경우에는 물에 적신 천을 꼭 짜서 닦으신 다음 잘 말려 주십시오.
- 염소계 세제·시너·크레졸 등은 절대로 사용하지 마십시오. 플라스틱 부분의 열화 및 파손의 원인이 됩니다

보관방법

- 실내에서 보관하여 주십시오. 장기간 사용하지 않는 경우에는, 청소 후 보관하여 주십시오.
- 고온 다습한 장소에는 보관하지 마십시오. 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

각부의 명칭 및 제품사양



사용시 규격	W62*D50*H85-95(cm)	최대 사용자 체중	80(kg)
접이식 규격	W62*D28*H85-95(cm)	바구니 적재 하중	5(kg)
제품 중량	6(kg)	재질	알루미늄 외

차체 접이방법



【펼치는방법】

그립과 좌석을 반대 방향으로 펼치면 고정 레버가 딱 소리가 나면서 고정이 됩니다.

⚠주의

- 주위에 사람이 없는지 확인하고 나서 조립-접이를 행하여 주십시오.
- 손가락 등이 끼이지 않도록 주의하여 주십시오.
- 확실히 조립되어 있는지 여부를 확인하고 나서 사용하여 주십시오.

그립 사용방법

좌우의 그립을 잡고 천천히 보행하십시오.

⚠주의

- 그립이외의 부분을 잡고 사용하지 마십시오.
- 한손으로 조작하지 말아 주십시오. 균형이 무너져 위험합니다.



【그립 높이 조절방법】



- ① 그립 높이 조절 버튼을 동시에 잡고 안쪽으로 눌러 고정을 해제하여 주십시오.
- ② 그 상태로 그립을 아래·위로 움직여 원하는 높이에서 그립 높이 조절버튼을 놓으십시오.
- ③ 그립 높이 조절버튼이 원위치로 될 때까지 그립을 아래·위로 움직여 주십시오.

⚠주의

- 그립 높이조절 버튼이 바깥쪽으로 되어 있어 그립이 확실히 고정되어 있는지 확인하여 주십시오.
- 손가락 등이 끼이지 않도록 주의하여 주십시오.
- 높이 조절은 최대 신장의 위치 이하로 조절하여 주십시오.

지팡이걸이 사용방법



- ① 지팡이 받침대에 지팡이를 놓아 두십시오.
- ② 지팡이 고정벨트로 지팡이를 고정해 주세요.

⚠주의

- 지팡이가 확실히 고정되어 있는지 확인하여 주십시오. 흔들림이 있을 경우 주행 중 지팡이가 떨어질 수 있어 위험합니다.

* 지팡이는 소비자의 아래를 돕기 위해 만든것으로 제품에 불포함입니다.

좌석의 사용방법



※ 주차 캐스터(브레이크)가 걸린상태

⚠ 주의

- 주차 캐스터(브레이크)가 걸려 있는지를 확인 후 좌석의 중앙에 앉아 주십시오.

원·투·쓰리 캐스터 사용방법

앞바퀴가 움직이는 방향을 상황에 맞게 단계로 설정하실 수 있습니다.



0° 회전



90° 회전



360° 회전

⚠ 주의


- 좌우의 앞바퀴 슬라이드 커버가 같은 위치에 있는지 반드시 확인해 주십시오.
- 손가락 등이 본체에 끼이지 않도록 주의하여 주십시오.

브레이크 사용방법



【 핸드 스톱퍼(브레이크) 】

- 그립을 잡고서 좌우의 핸드 스톱퍼(브레이크)를 동시에 잡아 주십시오.
- 해제 하실 때에는 핸드 스톱퍼(브레이크)를 놓아 주십시오.

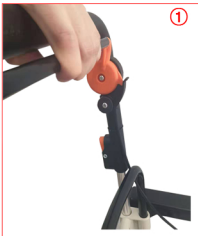

①



②

【 주차 스톱퍼(브레이크) 】

- ① 핸드 스톱퍼(브레이크)를 잡고 있는 상태에서 왼쪽에 있는 고정걸이 레버를 올려서 고정시킨다.
- ② 오른쪽 주황색 판을 발로 아래로 내리면 주차 스톱퍼(브레이크)가 걸립니다.

※ 해제 하실 때에는 주황색판을 위로 올리면 해제됩니다.

제품보증서

제품보증에 관하여

1. 본 제품에 이상이 있을 시 구입 후 1년간 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
2. 아래의 경우에는 무상 A/S를 받으실 수 없습니다.
 - 사용자의 취급 부주의로 발생한 고장
 - 사용자 임의의 내/외부 개조로 인한 고장
 - 천재지변에 의한 고장 (화재, 수해 등)
 - 소모성 부품의 마모 또는 수명이 다한 경우
 - 당사가 지정한 기사가 아닌 사람이 수리한 경우

서비스를 요청하시기 전에...

1. 사용설명서를 다시 한번 잘 확인해 주십시오.
2. 확인 후 이상이 있을 때는 구입처에 연락 하시거나 당사 고객센터에 연락해 주시면 신속 정확한 A/S를 받으실 수 있습니다.

준수 사항에 관하여

1. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.
2. 보증서를 보관하지 못한 경우 불이익을 당할 수 있습니다.

제 품 명	구 입 일 자
SC-700	

[판매원]



(주) 에스앤에프

주소 : 경상남도 김해시 생림면 장재로 429번길 49-6

Tel: 055)325-5596 . Fax: 05)325-5598



1억원 생산물 배상 책임보험 가입