

배포용

성인용 보행기 (롤레이터)

# SPACE



# 사용설명서

(주)엔티바이오



# Contents

1. 제품의 구성	3P
2. 안전한 사용을 위한 길잡이	4P
3. 사용방법	5P
4. 제품의 장점	6P
5. 기재사항	7P
6. 보증서 & 인증 현황	8P
7. A/S신청서	9P

- 사용설명서를 숙지한 뒤 제품을 사용해 주시고, 추후 필요한 경우 다시 보실 수 있도록 잘 보관해 주시기 바랍니다.

# 1. 제품의 구성



**구성품**  
 완제품 1대, 가방, 등받이, 우산꽂이, 설명서, 수리키트

## 2. 안전사용을 위한 길잡이

- 아래의 항목들은 소비자들의 안전을 위한 최소한의 안전 수칙 이오니 준수하여 주시기 바랍니다.
- 안전수칙을 무시해 발생하는 모든 법적 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.
- 본 제품으로 신체를 지지하여도 보행이 불가능할 경우 사용을 금합니다.

- 본 제품은 정상적인 보행에 지장이 있으신 분들의 보행을 돕기 위한 보행 보조 제품입니다.
- 제품의 본래 목적 이외의 용도로 사용을 금합니다.
- 제품 사용 시 손잡이에 기대어 차체만 움직이지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- 경사가 심한 곳, 지면이 고르지 않거나 물이나 기름이 덮인 미끄러운 곳에 서는 사용하지 마십시오.
- 사용 전 사용자의 체형에 맞게 손잡이를 조절하십시오.  
핸들의 높이를 조절하는 것은 자세에 영향을 주기 때문에 매우 중요합니다.  
허리가 굽어 통증이 생길 수 있고, 제품의 전복이 발생할 수 있습니다.  
허리를 편 자세로 사용할 수 있도록 조절하여 주시기 바랍니다.
- 의자에 앉기 전에는 안전을 위해 항상 브레이크를 아래로 내려 바퀴를 고정해주시기 바랍니다.
- 임의로 제품을 분해하거나 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 보관 시 구동 부위의 이물질 제거 후 보관하시기 바랍니다.
- 제품 관리 시 휘발성 물질을 사용하지 마시고, 세척은 부드러운 천을 이용하시기 바랍니다.
- 수시로 바퀴와 브레이크를 점검하고, 필요 시 교체하여 주시기 바랍니다.
- 고장 시 임의로 수리하지 마시고, 판매점 등에 문의하여 주시기 바랍니다.
- 야간 사용 시의 안전을 위해 반사테이프와 반사경을 가리지 않도록 유의해 주시기 바랍니다.

# 7. A/S 신청서

성 명	
연 락 처	
주 소	
모 델 명	
구 입 일 자	
구 입 처	
증 상	

(주) 엔티바이오

본사 : 경기도 포천시 가산면 정금로 255번길 4-49  
고객문의 : 031)532-5987 - 8

## 6. 보증서 & 인증현황

### 배상책임보험 1억원가입

#### 품질보증서

당사의 제품은 국제규격 ISO 9001, 14001 및 국가 공인시험기관(KOLAS) 시스템의 엄격한 품질 기준에 준하여 생산된 제품이므로 안심하고 사용하셔도 좋습니다.

저희 (주)엔티바이오의 모든 제품은 1년 이내의 자체 결함시 무상으로 A/S를 보장받을 수 있습니다.

(주) 엔티바이오 임직원 일동



제품명 : 성인용 보행기

모델명 : SPACE


안전확인신고번호 : B201H003-19001

# 3.사용방법

1. 빨간색 버튼을 눌러 잠금을 해제합니다.



2. 안장 좌우 프레임을 누르며 ‘딸깍’ 소리가 날 때까지 펴줍니다. 이 때, 손은 반드시 프레임 위에 위치해야 합니다. 제품이 정상적으로 펼쳐지면 아래 그림과 같이 폴딩레버가 결합됩니다.

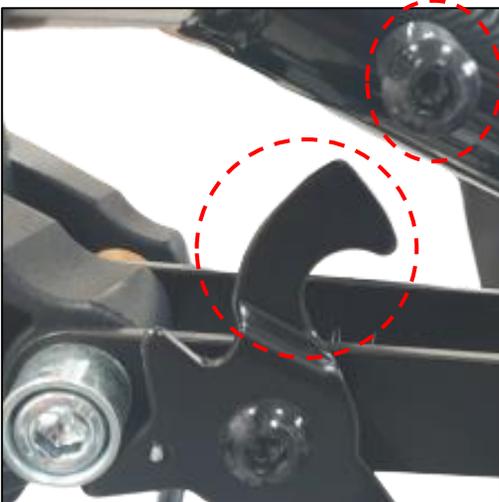

(제품이 완전히 펼쳐지면, 안장프레임 좌측 하단 폴딩레버가 결합됩니다.)

3. 제품을 접을 때에는 펼 때와 반대의 과정으로 안장의 손잡이를 당겨준 뒤 빨간색 버튼이 잠길 때까지 안장 좌우 프레임을 안쪽으로 밀어줍니다.

## 4. 제품의 장점





- 6단계 까지 조절 가능한 높이 조절 장치

- 편하게 기대 수 있는 등받이



- 걸음걸이에 따라 속도 조절 가능

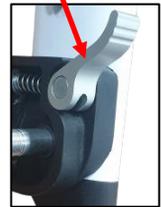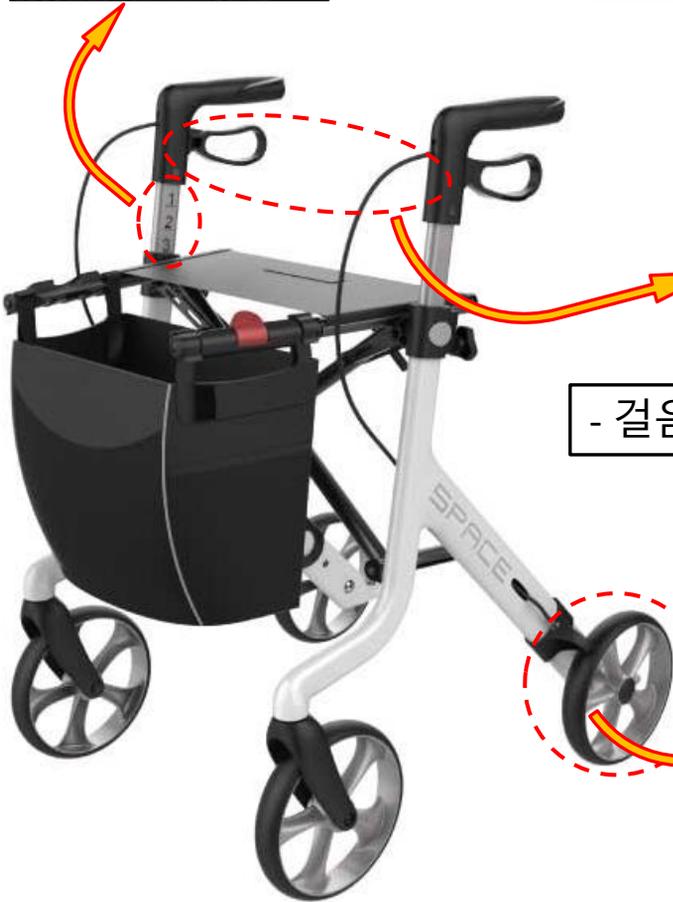

- 5.6kg의 가벼운 무게

- 나사 오른쪽 회전 : 잠금(바퀴 속도 천천히)  
- 나사 왼쪽 회전 : 풀림(바퀴 속도 빠르게)  
- 레버 올림 : 풀림  
- 레버 내림 : 잠금  
레버를 올려놓을 경우 나사의 상태가 잠금이더라도 영향을 받지 않습니다.

## 5. 기재사항



### Space

최대 체중	100Kg
시트높이	53cm
시트 폭	46cm
규격	62.5(W) × 65.5(D) × 78-92(H) cm
가방 사이즈	34 × 26 × 20cm
가방 최대적재하중	5kg
무게(+가방)	5.62Kg(+0.34)