

사용설명서

성인용 보행기

실버카-KS130

거리에 지팡이가 사라진다!!



삼주 실버카는
옆으로 앉으시면
안전합니다.



(주)삼주유니콘

10064 경기도 김포시 양촌읍 석모로16번길 80
Tel : 031) 988-4363~5 Fax : 031) 988-3864

E-mail : samjococo@hanmail.net / Homepage : www.sj4363.com

“의자 사용 시 옆으로 앉으시면 안전합니다”

성인용 보행기

실버카-KS130

당사의 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다.

제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 숙지하시고, 제품의 기능과 조작방법을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다.

본 제품은 주로 고령자분들의 외출 시 보행등에 사용하기 위해 제작된 것으로 자립보행이 불가능한 분들이 사용하시기에는 적합하지 않습니다.

사용 중 문제점 발생 시에는 구입처 및 (주)삼주유니콘으로 연락해 주시기 바랍니다.

■ 제품설명서를 반드시 읽고, 사용 및 보관하여 주십시오.

■ 사고나 고장의 방지를 위하여 아래의 주의사항을 꼭 지켜 주십시오.

- ① 반드시 제품을 편 후 사용해 주시기 바랍니다.
- ② 유아나 어린이가 조작하지 않아야 합니다.
- ③ 2인 이상의 동시 사용은 불가합니다.
- ④ 의자에 사람이 앉아있는 상태에서는 운행하지 마십시오.
- ⑤ 의자 위에 올라서지 마십시오.
- ⑥ 비, 눈, 얼음 등 미끄러지기 쉬운 장소에서는 사용하지 마십시오.
- ⑦ 에스컬레이터에서는 사용하지 마십시오.
- ⑧ 버스, 전철 등 교통수단의 실내에서는 사용하지 마십시오.
- ⑨ 주차시 주차브레이크 빨간색 레버를 잠김에 놓고 사용하셔야 합니다.

“의자 사용 시 옆으로 앉으시면 안전합니다”

성인용 보행기 실버카-KS130

■ 사용전 주의(점검)사항

- ① 제품이 정확히 펼쳐있는지 확인하여 주십시오.
- ② 제품의 기능 및 작동방법에 대해 정확히 숙지 후 사용해 주십시오.
- ③ 펼때나 접을 때 손가락 등이 끼지 않도록 주의해 주십시오.

■ 사용중 주의사항

- ① 비나 바람등 기상조건이 나쁠때에는 사용을 삼가하여 주십시오.
- ② 모래나 흙, 자갈길, 물 웅덩이가 있는 곳에서는 가능한 사용을 하지 마십시오. (녹이나 작동불량의 원인이 됩니다.)
- ③ 교통이 혼잡한 곳, 오르막 길이나 선로의 횡단 또는 야간의 사용시에는 충분히 주의해 주십시오.
- ④ 불 근처에 방치해 두지 마십시오.
- ⑤ 가방 이외의 곳에는 짐을 넣거나 걸지 마십시오.

❖ 의자에 앉으실 경우에는 팔지지대(핸들)에 한쪽 어깨를 걸치고 옆으로 앉으십시오.



■ 관리방법

- ① 비를 맞게 한다가거나 제품에 모래나 흙이 묻은 상태로 방치하지 마십시오.
- ② 비를 맞았을 경우나 더러워졌을 경우에는 부드럽고 마른 천으로 깨끗이 닦아 주세요.
- ③ 가방이 더러워졌을 경우에는 부드러운 천으로 닦아주거나, 분리하여 세탁하십시오.
- ④ 여름 더운날이나 겨울 추운날에는 밖에 방치하지 말아 주세요. 비닐이나 천이 햇빛으로 인해 변색되거나 추위로 딱딱해져서 파손될 우려가 있습니다.
- ⑤ 윤활유나 신나 또는 벤젠 등 휘발성의 용제를 사용하지 마십시오.
- ⑥ 임의로 분해하거나 개조하지 마십시오.

“의자 사용 시 옆으로 앉으시면 안전합니다”

성인용 보행기

실버카-KS130

■ KS130 각부명칭 ■



“의자 사용 시 옆으로 앉으시면 안전합니다”

성인용 보행기 실버카-KS130

■ 접고 펴는 방법 ■



핸들 및 팔지지대를 잡고 접이장치를 끝까지 올리면 펴집니다.
핸들 및 팔지지대를 잡고 접이장치를 끝까지 내리면 접힙니다.

■ 바퀴회전조절장치 사용법 ■



제품 출고시에는(사진①)에는 직진으로 조정되어 있습니다.
사진②처럼 90도로 내리면 좌·우 35도 회전합니다.
사진③처럼 180도로 내리면 360도 회전합니다.
양쪽 바퀴조절장치를 모두 조정해 주셔야 하며, 가급적 직진 또는 35도 회전가능상태로 사용하시기를 권해드립니다.

“의자 사용 시 옆으로 앉으시면 안전합니다”

성인용 보행기

실버카-KS130

■ 주차브레이크 및 핸드브레이크 ■

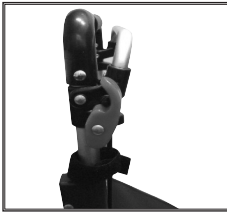


사진 ①

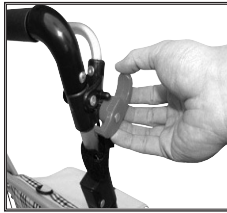


사진 ②

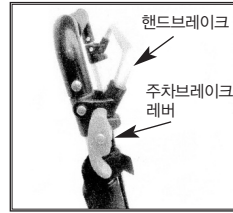


사진 ③

• 주차브레이크 거는 법

사진②와 같이 브레이크 로크를 아래로 반회전 시켜 사진③과 같이 완전히 고정하시면 주차브레이크가 걸립니다. (의자 사용시나 장시간 세워둘 시 사용하십시오)

• 주차브레이크 푸는 법

사진③의 상태에서 위로 반회전 시켜 사진①과 같이 고정하시면 주차브레이크가 풀어집니다.

주행시에는 사진①과 같은 상태에서 핸드브레이크만 사용하십시오.

“의자 사용 시 옆으로 앉으시면 안전합니다”

성인용 보행기 실버카-KS130

■ 핸들 높이조절 ■



사진 ①

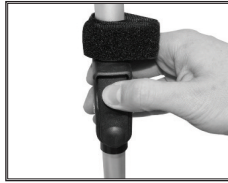


사진 ②

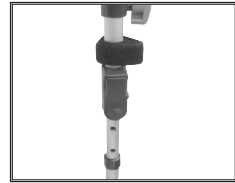


사진 ③

사진①의 버튼을 누르면(사진②) 사진③처럼 높이가 3단계로 변경됩니다.

양쪽의 높이조절장치를 동시에 움직이셔야 합니다.

체형에 맞는 높이로 사용하십시오.

■ 제품 사양 ■

차	제	앞바퀴 회전차(캐스터) / 주차스톱퍼 / 의자 / 핸드브레이크 부착		
중	량	4.9kg		
사	용	높이 820/860/900	앞뒤폭 550	좌우폭 490(mm)
접	었	높이 880	앞뒤폭 330	좌우폭 490(mm)
의	자	높이 480	가	로 300
적	재	중		량
		가		방 : 5kg 이하
		의		자 : 100kg 이하
품	질	보증기간		
		구입일로 부터 1년 (자세한 사항은 보증기준 참조)		

“의자 사용 시 옆으로 앉으시면 안전합니다”

성인용 보행기

실버카-KS130

보증 기준

1. 이 제품의 보증기간은 구입일로 부터 1년입니다.
2. 보증기간 내에는 제품의 결함에 대해서는 100% 무상 수리가 가능하나
사용자의 책임에 의한 것은 실비가 청구됩니다.
3. 다음의 사항은 무상 서비스에서 제외됩니다.
 - 1) 잘못된 사용법이나 손질 불량에 따른 것
 - 2) 타이어의 자연 마모
 - 3) 사용자의 개조 또는 변형에 의한 것
 - 4) 재해, 사고 등에 의한 것
4. 사용한 제품에 대해서는 교환할 수 없습니다.
5. 제품에 대한 각종 문의는 구입점 또는 제조사에 직접 연락해 주십시오.

구입시 기재사항

- 구 입 일 시 : 년 월 일
- 구입대리점 주 소 :
- 구입대리점 전화번호 :

■ 제조일자

제조일자는 구입시 박스의 상부에 표기되어 있습니다.



(주)삼주유니콘

10064 경기도 김포시 양촌읍 석모로16번길 80
Tel : 031) 988-4363~5 Fax : 031) 988-3864

E-mail : samjococo@hanmail.net / Homepape : www.sj4363.com