
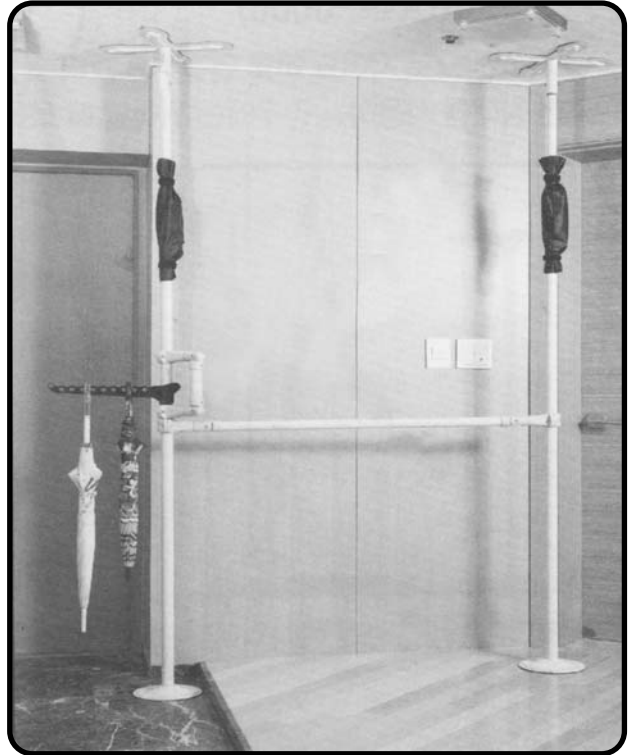


※ 적용 예

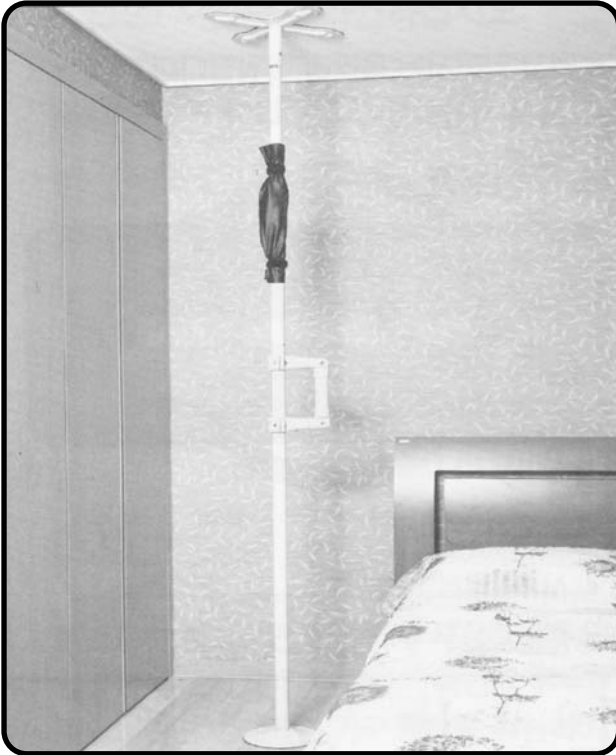

경고

- ★ 사이드 바, 크로스 바에 앉거나 매달리거나 발판으로 하지 마세요.
사이드바와 크로스바에 앉거나 매달리거나 발판으로 하면, 본체가 빠지거나 파손해 넘어져 다칠 위험이 있습니다.
- ★ 사이드바와 크로스바는 꼭 고정시켜 사용하여 주십시오.
사이드바와 크로스바를 고정하는 고정나사는 확실히 고정시켜, 간단히 빠지거나 미끄러지지 않도록 확인하고 사용하세요. 설치가 불충분할 경우 사용중에 빠져서 넘어지거나 다칠 수 있습니다.

※ 청소 방법

1. 청소시는 물이나 중성세제를 폼은 걸레로 닦아 주십시오. 신나나 벤젠류로 닦으면 도장면이 손상될 수 있습니다.
2. 거친 수건이나 연마용 가루등을 사용하지 마십시오. 도장 표면이 손상될 수 있습니다.
3. 직사광선으로 피하십시오.

판매 및 A/S문의

(주)명성실비케어

Tel: (02) 501-4629


제 조 처

(주)대구정공

Tel: (053) 584-6116

안전손잡이 취급설명서

DGP-0005/DGP-0006/DGP-0007

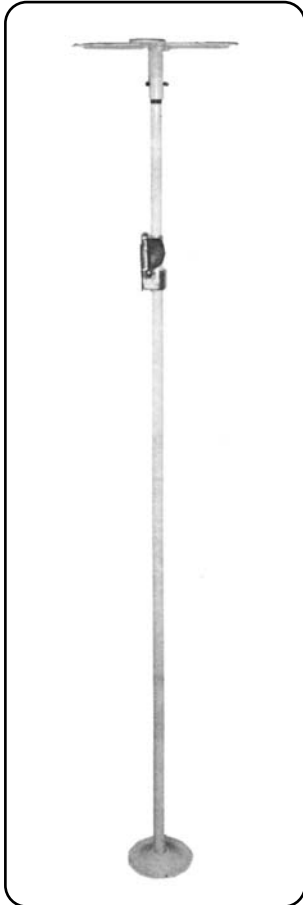

안전하게 사용하기 위해서는...

사용하시기전에 설명서를 잘 읽으신 후 올바르게 사용 해 주십시오. 읽으신 후에도 언제나 볼 수 있는 장소에 소중히 보관해 주시고 사용자의 건강 상태와 몸 상태에 변화가 생기는 경우에는 의사나 간호사 등 전문가와 상담하고 적절한 조치를 취한 후 사용하여 주십시오.



안전상의 주의사항 반드시 지켜주세요.

사용자 및 타인에게 상해 및 재산상의 손해를 미연에 방지하기 위해서 반드시 지켜주실것을 다음과 같이 설명합니다. 안전에 관한 중요한 사항이기 때문에 반드시 지켜 주십시오. 취급설명서 상에 표시되어 있는 기호 및 경고문을 무시하거나 잘못 사용한 경우에 일어나는 손해의 정도를 다음과 같은 표시구분으로 나타냅니다.



경고

사망 또는 중상을 입을 가능성이 있는 경우



주의

장애를 가질 가능성 또는 물적 손해를 발생시킬 가능성이 있는 경우

주의

안전손잡이의 고장을 방지하기 위한 주의사항과 보다 쾌적하게 사용 하시기 위한 보충설명이 쓰여있는 것을 의미합니다.

지켜주실 내용의 종류를 다음의 표시로 구분해 나타내고 있습니다.



이 그림의 표시는 절대해서는 안 될 **“절대금지”**의 표시입니다.



이 그림의 표시는 반드시 실행해야하는 **“절대강제”**의 표시입니다.

※ 주의 사항



- ◆ **천장이 단단하지 않은 곳에 설치하지 말아 주십시오.**
천장이 단단하지 않은 곳에 설치하면 충분한 설치강도를 얻을 수 없고, 사용중에 손잡이가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.
- ◆ **허용범위를 넘는 천정 높이에는 설치하지 마십시오.**
안전손잡이 DGP-0005를 설치할 수 있는 천정높이는 2.1m~2.9m 범위입니다. 허용 범위를 초과 및 밑도는 천정높이에 설치하면 충분한 설치 강도를 얻을 수 없고 사용중에 손잡이가 떨어지거나 넘어져 다칠 위험이 있습니다.
- ◆ **부드러운 바닥이나 방석, 이불, 매트 등의 위에 설치하지 마세요**
부드러운 마룻바닥, 방석, 이불, 매트 위에 설치하면 사용중에 손잡이가 미끌어져 넘어지거나 떨어져서 다칠 위험이 있습니다.
- ◆ **단차 및 경사가 있는 바닥에는 설치하지 마십시오.**
방의 문턱같은 단차가 있는 장소나 비탈같이 경사가 있는 바닥에 설치하지 마세요. 사용중에 손잡이가 미끌어지거나 빠지거나해 넘어지거나 다칠 위험이 있습니다.
- ◆ **비스듬히, 가로로, 상하 반대로 설치하지 마십시오.**
비스듬히, 가로로, 상하 반대로 설치하면 충분한 설치강도를 얻을 수 없어 사용중에 손잡이가 빠져 넘어지거나 다칠 위험이 있습니다.
- ◆ **주변물과의 빈틈에 충분히 주의 하십시오.**
침대 주변이나 벽쪽에 설치할때, 그것들과의 틈새와 주변물과에 있는 가구등과의 틈새에 충분히 주의 하여 주시기 바랍니다.
- ◆ **옥외나 옥실과 같이 바람과 비를 맞거나 물기가 있는 장소에는 설치하지 마십시오.**
DGP-0005는 실내 전용입니다. 옥외나 옥실등 물기가 많은 장소에 설치하면 수분등으로 바닥과 천정이 미끄러워 손잡이가 넘어지거나 떨어질 위험이 있습니다.
- ◆ **클램프 커버를 반드시 설치하여 사용하십시오.**
클램프 커버를 설치하지 않고 사용하면 실수로 클램프 레버가 움직여, 손잡이가 떨어질 위험이 있습니다.
- ◆ **손잡이에 부딪히거나 타오르지 마십시오.**
손잡이에 부딪히거나 올라가면 손잡이에서 미끌어짐, 떨어지거나 넘어져 다칠 위험이 있습니다.
- ◆ **사이드 바, 크로스 바에 앉거나 매달리거나 발판으로 하지마세요**
사이드바와 크로스바에 앉거나 매달리거나 발판으로 하면, 본체가 빠지거나 파손해 넘어져 다칠 위험이 있습니다.
- ◆ **사이드바와 크로스바는 꼭 고정시켜 사용하여 주십시오.**
사이드바와 크로스바를 고정하는 고정나사는 확실히 고정시켜, 간단히 빠지거나 미끄러지지 않도록 확인하고 사용하세요. 설치가 불충분할 경우 사용중에 빠져서 넘어지거나 다칠 수 있습니다.
- ◆ **DGP-0005(안전손잡이) 설치 및 설치장소의 이동은 반드시 구매처에 의뢰 하십시오.**

※ 주의 사항



◆ **베이스와 바닥과의 단차에 끼지않게 충분히 주의하세요.**

베이스와 바닥과의 사이에는 단차가 있습니다. 단차에 끼이거나 걸려서 넘어지지 않도록 충분히 주의 하십시오.

◆ **손잡이 윗부분 신축 파이프에 크로스바 및 사이드바를 설치하지 마세요.**

손잡이 윗부분 신축파이프에 크로스바 및 사이드 바를 설치하면 충분한 강도를 얻지 못해 사용중에 빠져서 떨어지거나 넘어져 다칠 위험이 있습니다.

◆ **손잡이를 위로 들지 마세요.**

손잡이의 윗방향에 힘을 가하면 손잡이가 빠지거나 떨어져서 넘어지거나 다칠 위험이 있습니다.

◆ **화기에 가깝게 하거나, 스토브와 팬히터등의 열기구 옆에서는 사용하지 마세요.**

화기나 스토브, 팬히터등 열기구에 위해 제품의 손상 및 화상의 위험이 있습니다.

◆ **사이드바나 크로스바를 무리하게 돌리지 마세요.**

사이드바 및 크로스바를 무리하게 돌리면 손잡이 본체가 뒤틀려, 손잡이가 빠지거나 떨어져 넘어지거나 다칠 수 있습니다.

◆ **벽에 기대어 세워 두지 마십시오.**

일시적으로 두는 경우, 벽등에 기대어 세우면 본체가 넘어져 망가지거나, 주위 사물을 파손시킬 위험이 있습니다.

◆ **고객님에 의한 분해, 개조, 수리는 하지 마십시오.**

변형, 파손의 원인이 되어 다칠 수 있습니다.

◆ **본래 목적 이외에는 사용하지 마십시오.**


본래의 목적이외에 사용하면 상품이 떨어져 뜻밖에 다칠 수 있습니다.

◆ **유기용제나 스프레이 타입의 살충제등을 직접 뿌리지 마십시오.**

마른걸레질을 하는 경우는 중성세제를 물에 희석시켜 부드러운 천에 묻혀 잘짜서 걸레질 하세요. 그 후 남은 세제를 물에 적셔, 잘 짠 천으로 닦으세요. 마지막으로 마른 천으로 물방울, 습기를 깨끗이 닦으세요.

※ 각부명칭 및 부속내용


♣ 각부의 명칭 및 포함 내용

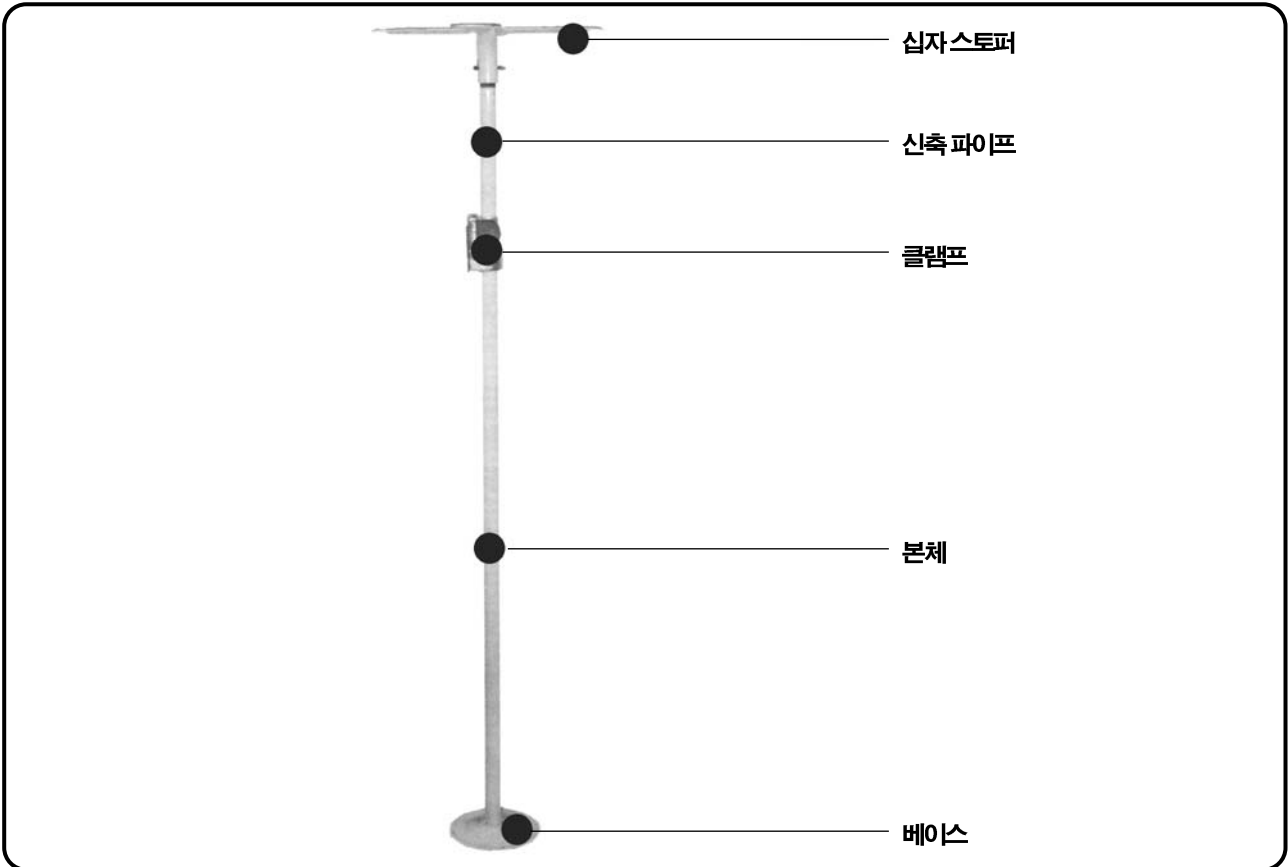


♣ 포함내용

기재된 상품이 전부 갖춰져 있는지 파손, 변형되어 있는지 반드시 확인해 주십시오.
만일 부품의 부족 및 파손이 있을 경우에는 구입하신 구매처에 의뢰하여 주십시오.

- 1) 손잡이 본체 1SET 2) 스톱퍼 1SET 4) 취급설명서

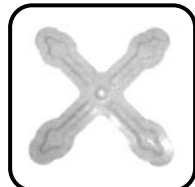

- 3) 가죽 클램프 커버

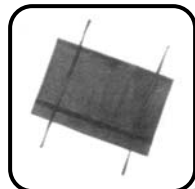


- 5) 제품사양

원 산 지	대한민국
제 품 규 격	40cm × 199cm
중 량	7.95Kg

※ 설치 방법

♥ 십자스토퍼를 천장까지 편다.

십자스토퍼를 천장에 닿을때까지 늘입니다. 이때 정면과 옆 방향으로 부터 수직으로 서 있는지 확인해 주세요.

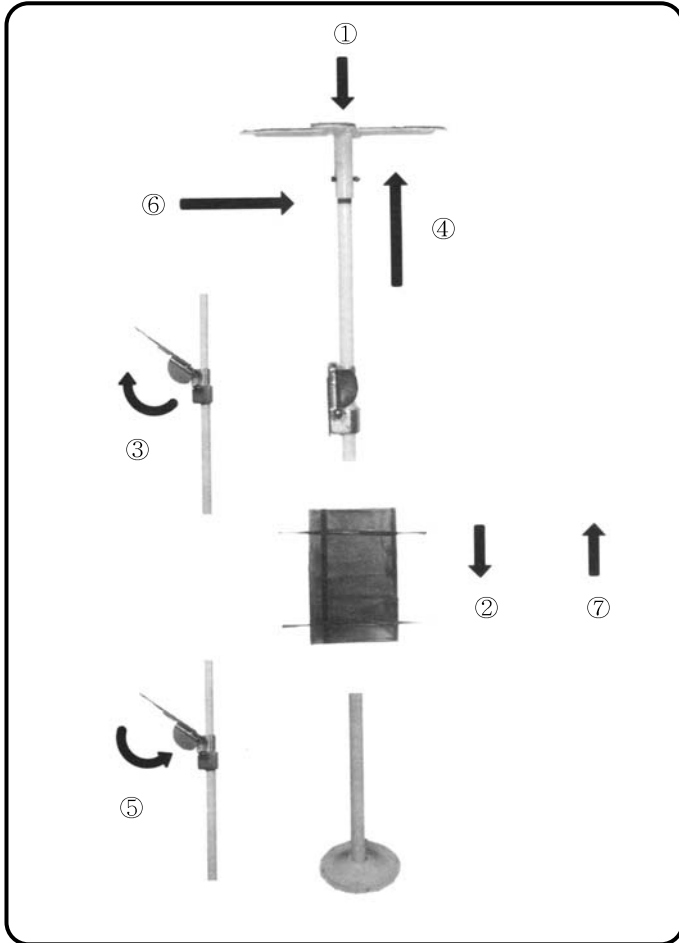

- ① 스토퍼를 본체에 부속품을 사용하여 조립합니다.
- ② 가죽 클램프 커버를 벗긴다.
- ③ 클램프 레버를 위로 엽니다.
- ④ 천장에 닿을때까지 늘입니다.
- ⑤ 클램프 레버를 잠급니다.
- ⑥ 바르게 설치되면 설치강도를 확인하기 위한 적색라인이 보이지 않습니다.
클램프레버를 잠궜도 적색라인이 감춰지지 않는다면 설치가 잘못됐을 가능성이 습니다. 다시 설치해 주세요.
- ⑦ 적색라인이 보이지 않는다면 충분한 강도로 조립이 되었으므로 클램프 커버를 씩웁니다.

! 주의



- ★ 강도의 보증이 될 수 있는 상한높이 2.9M를 넘으면 흑색라인이 보여 상한 높이를 넘었다는 것을 알립니다. 흑색라인이 보이지 않는지를 반드시 확인하세요.
- ★ 설치가 충분하지 않은점을 나타내는 적색라인이 보이면 안전하게 사용하실수 없습니다. 적색이 보이지 않는 것을 반드시 확인해 주세요.
- ★ 쇠장식 사이에 빈틈이 있는 상태로 클램프 레버를 죄이면 적색라인이 보이므로 사용하실 수 없습니다.
- ★ 클램프 커버를 반드시 씌워서 사용하세요.

! 경고

- ★ 제품을 고정해야 할 천장부분은 반드시 단단한 곳에 설치하여 주십시오. 천장이 단단하지 않은 곳에 설치하면 충분한 설치강도를 얻을 수 없고 사용 중에 손잡이가 넘어져 다칠 위험이 있습니다.


※ 설치 및 해체방법

♥ 수직으로 서있는지 확인하십시오.

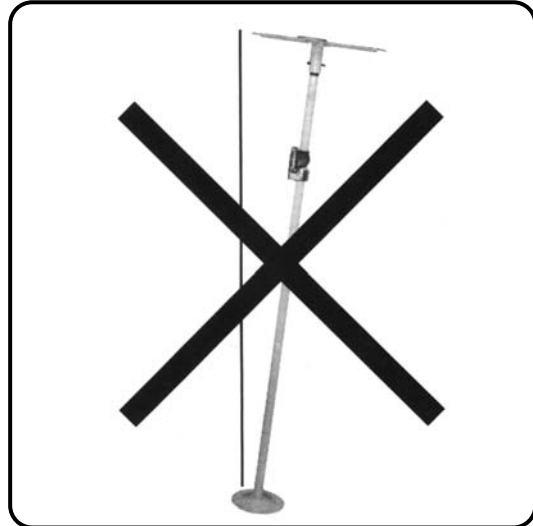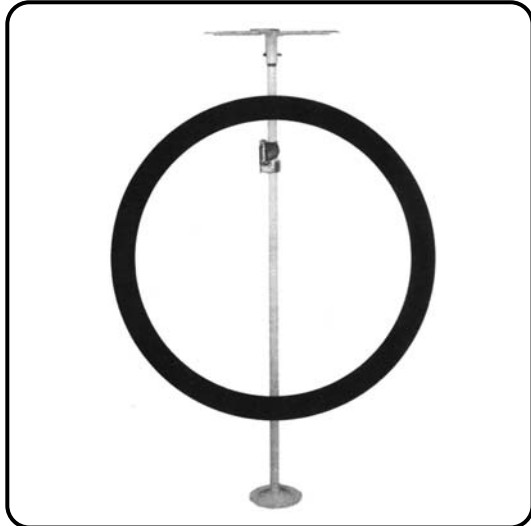


비스듬히 설치하면 안전하게 사용하실 수 없습니다. 설치 후, 손잡이가 수직으로 서있는지를 정면과 옆에서의 두 방향에서 확인해 주세요. 필요하다면 수평확인 기구 등으로 확인하여 주십시오.

♣ 해체방법

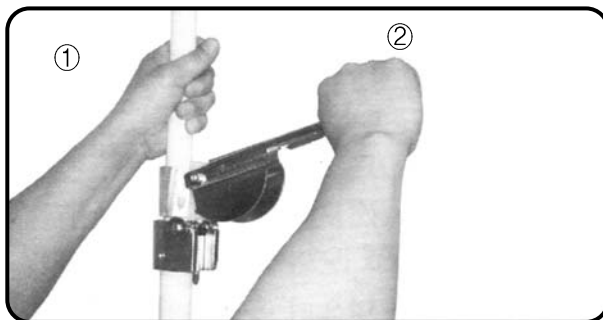

- ① 왼손으로 신축파이프를 꼭 잡니다.
- ② 오른손으로 클램프 레버를 위로 올립니다.
- ③ 왼손은 신축파이프, 오른손은 본체를 잡습니다.
- ④ 왼손을 살짝 감아 쥐면서 신축파이프를 조금씩 놓습니다.

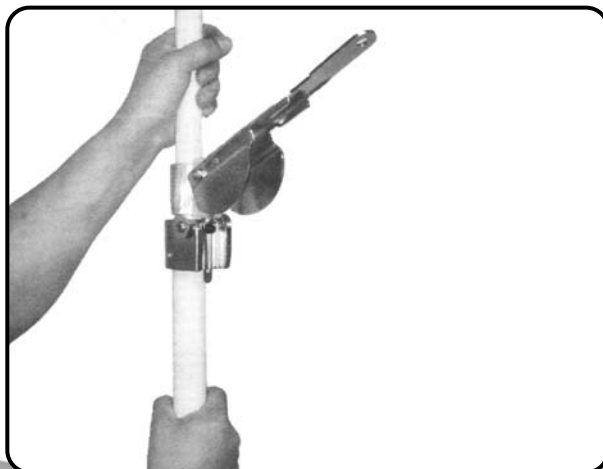


! 주의

★ 해체시에는 반드시 구입처에 의뢰하십시오.


※ 부속품 소개

◆ 사이드바(DGP-0006)

ㄷ자 모양으로 사이드 바를 연결하면 보다 힘을 주기 쉽고 일어서는 동작이 쉬워집니다.
또한 침대를 사용하는 경우에는 뒤척일 때 쓰는 “바”로서 이용하실 수 있습니다.

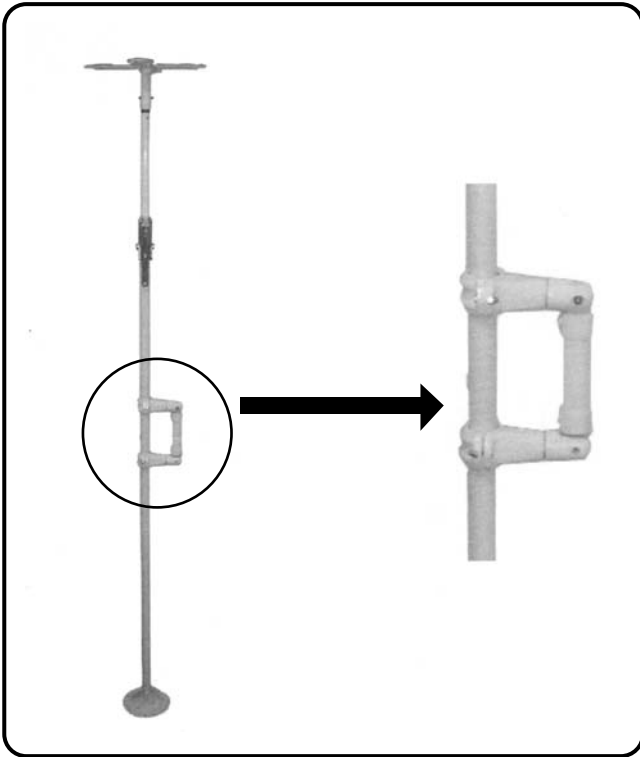

♣ 구성부품

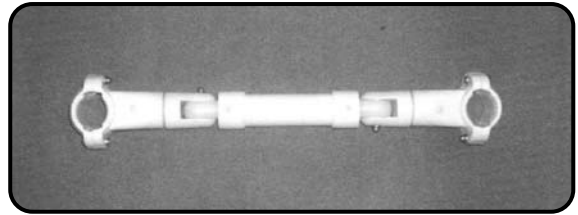

- 1) 사이드 바 1SET(DGP-0006)
- 2) L-렌치 1개
- 3) 사용설명서 1부
- 4) 제품사양


원 산 지	대한민국
제 품 규 격	직경3.5cm, 길이 120cm
중 량	1.61Kg

※ DGP-0005의 본체부분에 사용하시고자 하는 적당한 위치에 조립하여 사용합니다.

◆ 크로스바(DGP-0007)

DGP-0005를 크로스바로 연결하면 오르고 내리는 것뿐만 아니라 보행동작을 보조할 수 있게 됩니다.
복도나 실내의 필요한 공간에 설치할 수 있습니다.

♣ 구성부품

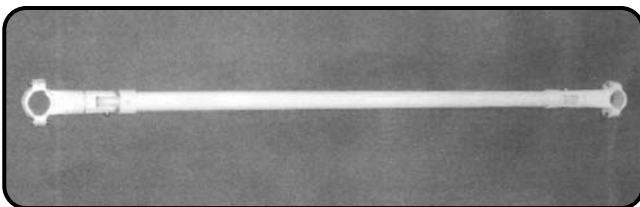

- 1) 크로스바 1SET(DGP-0007)
- 2) L-렌치 1개
- 3) 사용설명서 1부
- 4) 제품사양

원 산 지	대한민국
제 품 규 격	직경3.5cm, 길이 46cm
중 량	0.73Kg