

## 품질보증서

품 목 명	안전손잡이	보증기간
제 품 명	MSH-103	구입일로부터 1년
구 입 일	년 월 일	

고객	주소	성명	
		연락처	
판매점	주소(상호)	담당자	
		연락처	

1. 제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.
2. 본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 생산된 제품입니다.
3. 운송도중 발생한 파손이나 도금형태가 변질되어 사용불능일 경우, 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드립니다.
4. 본 보증서는 재발행되지 않으며, 국내에서만 유효합니다.
5. A/S 및 문의처 : 1577-5195 / 055-323-5195

## 보증규정

고객께서 구입하신 본 제품에 대하여 아래와 같은 조건으로 보증하여 드립니다.

1. 보증기간  
제품의 정상적인 상태에서 발생한 고장에 대하여 1년간 보증하여 드립니다.
2. 보증수리 제외사항
  - 1) 사용자의 취급부주의 및 조작의 잘못으로 인한 고장이나 파손
  - 2) 당사 지정 수리요원 외 제3자가 수리하였거나 부당한 수리개조에 의한 고장이나 파손
  - 3) 보증서를 분실 또는 수탁 판매점의 직인이 없을때
  - 4) 천재지변에 의한 고장 및 파손
3. 보증기간 외의 수리  
보증기간 경과 후의 수리 요청 시에는 소정의 기술료를 징수합니다.
4. 기타  
본 보증규정 이외의 사항에 대하여는 “소비자 기본법”에 의거한 “소비자 분쟁해결기준”에 의해 처리됩니다.

# MSH-103 사용설명서



**MC Tec**

(주)엠씨텍  
 경남 김해시 주촌면 골든루트로66번길 48-1  
 TEL 1577-5195 FAX 055-323-5171  
 www.mctec.co.kr mctec@naver.com

※ 본 제품을 사용하기 전에 이 설명서를 반드시 읽어 보신 후  
 사용하시고 이후 에도 설명서를 잘 보관해 두시기 바랍니다.

※ 본 제품은 환자나 고령자의 편의를 위하여 사용하는  
 안전손잡이입니다.

## 1. 제품사양

- 제품명 : 안전손잡이
- 규격 : L : 520 x W : 630 x H : 685(mm)
- 제품 무게 : 12.7kg
- 최대사용자체중 : 120kg
- 재질 : 스틸, 나일론

## 2. 제품구성



번호	명칭	수량	번호	명칭	수량
1	측면프레임	2	7	원형마개	6
2	U자 프레임	1	8	커버	2
3	팔걸이 프레임	2	9	고정노브캡	2
4	팔걸이커버	2	10	범퍼노브	2
5	받침대노브	4	11	와샤	4
6	고정노브	2	12	고정핀	2



# MSH-103

## 9. 제품의 설치방법



① 제품 상태를 점검한다.

② 범퍼노브가 변기에 닿을때까지 밀착시킨다. 반대쪽 돌기의 밀착상태도 반드시 확인한다.

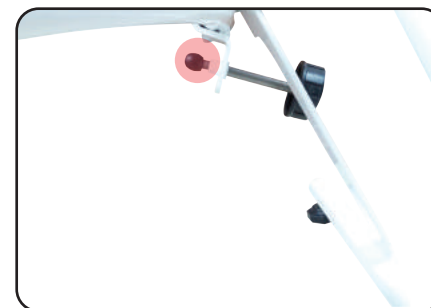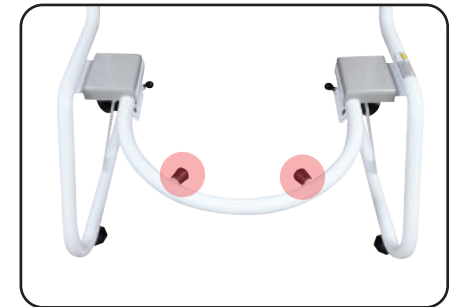

③ 양쪽앞돌기가 변기에 밀착 되도록 고정 노브를 조절하여 변기에 고정 시킨다.

**\* 과도한 고정으로 변기 파손이 되지 않도록 유의합니다.**

# MSH-103

## 5. 제품사용 전 주의사항

- 1) 제품 설치 시 설명서를 잘 읽고 설치하여 주십시오.
- 2) 설치 전 볼트 및 연결부분이 단단히 조립되어 있는지 확인 후 사용하십시오.
- 3) 바닥에 물기를 제거해 주시고 설치하여 주십시오.
- 4) 가급적 평평하고 안정된 장소에서 사용하십시오.
- 5) 본 제품은 좌변기에 갖다 대고 양측면의 고정 노브를 돌려 고정시킵니다.  
(과도한 고정으로 변기 파손이 되지 않도록 유의합니다.)
- 6) 본 제품이 좌변기에 흔들림 없이 조립되어 있는지 확인 후 사용하십시오. 단단히 조립되지 않은 경우 부상의 위험이 발생할 수도 있습니다.
- 7) 과도한 하중이나 충격은 파손의 원인이 되니 주의하십시오.
- 8) 제품에 이상이 있을 경우 제조사에 문의하십시오.  
(Tel. 1577-5195)

## 6. 제품사용 중 주의사항

- 1) 본 제품을 임의로 분해하거나 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 2) 변기에 부착 후 매달리거나 좌우로 흔들어서는 안됩니다.
- 3) 기타 다른 물건을 걸어두거나 장착하지 마십시오.
- 4) 최대 사용자 체중 초과자는 사용하지 마십시오.
- 5) 세척 후 충분히 건조하여 사용하십시오.


## 7. 제품의 점검사항 및 주의사항

- 1) 제품을 좌변기에 설치한 후 고정에 이상이 없는지 반드시 확인 후 사용하십시오.
- 2) 이상이 있다고 판단될 시 사용을 중단하고 반드시 A/S센터 및 제조사로 연락바랍니다.  
( A/S 및 문의사항 : 1577-5195 )

### 8. 제품손질 및 보수방법

- 1) 최대한 물기가 없는 건조한 상태로 사용하시기 바랍니다.
- 2) 사용 중 오염이 된 경우에는 세제 등을 사용하여 세척하시고 마른 수건으로 닦고 충분히 건조하여 주시길 바랍니다.

#### ※ 단체표준인증

	<p>단체표준명(품명) : 안전손잡이          단체표준번호 : KSPA5001          인증번호 : 제434호 (20161219-1)          모델명 및 모델 고유번호 : MSH-103          제조년월 :          제조자명 : (주)엠씨텍          A/S 전화번호 : 1577-5195          제조국명 : 한국</p>
<p>품질보증          본 제품은 단체표준인증단체인 당 협회에서 단체표준제품임을 보증함          한국고령친화용품산업협회</p>	

### 3. 제품소개

- 1) 거동이 불편한 노인, 장애인, 환자분들이 화장실에서 좌변기를 사용할 때 사용할 수 있는 안전손잡이로서, 사용자 스스로 착석과 기립을 할수있도록 보조해 주는 제품입니다.
- 2) 본 제품은 다양한 형태의 좌변기에 장착이 가능하도록 제작되었습니다.

### 4. 제품의 특징

- 1) 본 제품은 간편한 조작으로 설치한 후에 바로 사용이 가능합니다.
- 2) 본 제품은 경사에 맞게 받침대 노브로 수평을 조절할 수 있습니다.
- 3) 본 제품은 팔걸이 각도 조절이 가능합니다.(0°~90°)



※ 사진과 같이 안전핀을 제거 하셔야 팔걸이 각도 조절이 가능합니다.