

MSH-502 사용설명서



MC^TTec

(주)엠씨텍
경남 김해시 주촌면 골든루트로66번길 48-1
TEL 1577-5195 FAX 055-323-5171
www.mctec.co.kr mctec@naver.com


※ 본 제품을 사용하기 전에 이 설명서를 반드시 읽어 보신 후
사용하시고 이후 에도 설명서를 잘 보관해 두시기 바랍니다.

※ 본 제품은 환자나 고령자의 편의를 위하여 사용하는
안전손잡이입니다.

1. 제품사양

- 제품명 : 안전손잡이
- 규격 : L : 505 x W : 645 x H : 715(mm)
- 제품 무게 : 9kg
- 최대사용자체중 : 120kg
- 재질 : 스텐레스, 나일론, 스펀지

2. 제품구성

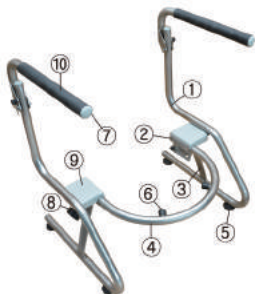

번호	명칭	수량	번호	명칭	수량
1	502 프레임	2	6	범퍼노브	2
2	고정대	2	7	원형마개	2
3	지지대	2	8	고정노브	2
4	U자 프레임	1	9	커버	2
5	받침대 노브	4	10	팔걸이스펀지	2

MSH-502

3. 제품소개

- 1) 거동이 불편한 노인, 장애인, 환자분들이 화장실에서 좌변기를 사용할 때 사용할 수 있는 안전손잡이로서, 사용자 스스로 착석과 기립을 할수있도록 보조해 주는 제품입니다.
- 2) 본 제품은 다양한 형태의 좌변기에 장착이 가능하도록 제작되었습니다.

4. 제품의 특징

- 1) 본 제품은 간편한 조작으로 설치한 후에 바로 사용이 가능합니다.
- 2) 본 제품은 경사에 맞게 받침대 노브로 수평을 조절할 수 있습니다.
- 3) 본 제품은 팔걸이 각도 조절이 가능합니다.(0°~75°)

5. 제품사용 전 주의사항

- 1) 제품 설치 시 설명서를 잘 읽고 설치하여 주십시오.
- 2) 설치 전 볼트 및 연결부분이 단단히 조립되어 있는지 확인 후
사용하십시오.
- 3) 바닥에 물기를 제거해 주시고 설치하여 주십시오.
- 4) 가급적 평평하고 안정된 장소에서 사용하십시오.
- 5) 본 제품은 좌변기에 갖다 대고 양측면의 고정 노브를 돌려
고정시킵니다.
(과도한 고정으로 변기 파손이 되지 않도록 유의합니다.)
- 6) 본 제품이 좌변기에 흔들림 없이 조립되어 있는지 확인 후
사용하십시오. 단단히 조립되지 않은 경우 부상의 위험이
발생할 수도 있습니다.
- 7) 과도한 하중이나 충격은 파손의 원인이 되니 주의하십시오.
- 8) 제품에 이상이 있을 경우 제조사에 문의하십시오.
(Tel. 1577-5195)

6. 제품사용 중 주의사항

- 1) 본 제품을 임의로 분해하거나 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 2) 번기에 부착 후 매달리거나 좌우로 흔들어서는 안됩니다.
- 3) 기타 다른 물건을 걸어두거나 장착하지 마십시오.
- 4) 최대 사용자 체중 초과자는 사용하지 마십시오.
- 5) 세척 후 충분히 건조하여 사용하십시오.

7. 제품의 점검사항 및 주의사항

- 1) 제품을 좌변기에 설치한 후 고정에 이상이 없는지 반드시 확인 후 사용하십시오.
- 2) 이상이 있다고 판단될 시 사용을 중단하고 반드시 A/S센터 및 제조사로 연락바랍니다.
(A/S 및 문의사항 : 1577-5195)

8. 제품손질 및 보수방법


- 1) 최대한 물기가 없는 건조한 상태로 사용하시기 바랍니다.
- 2) 사용 중 오염이 된 경우에는 세제 등을 사용하여 세척하시고
마른 수건으로 닦고 충분히 건조하여 주시길 바랍니다.

9. 제품의 설치방법



1. 제품 상태를 점검한다.

2. 범퍼노브가 변기에 닿을때까지 밀착시킨다. 반대쪽 범퍼노브의 밀착상태도 반드시 확인한다.

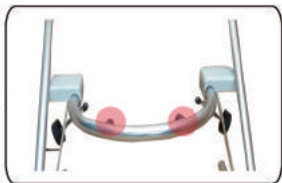

3. 양쪽 고정 노브캡이 변기에 밀착 되도록 고정 노브를 조절하여 변기에 고정시킨다.

* 과도한 고정으로 변기 파손이 되지 않도록 유의합니다.

품질보증서

품 목 명	안전손잡이	보증기간
제 품 명	MSH-502	구입일로부터 1년
구 입 일	년 월 일	

고객	주소	성 명	
		연락처	
판매점	주소(상호)	담당자	
		연락처	

1. 제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.
2. 본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 생산된 제품입니다.
3. 운송도중 발생한 파손이나 도금형태가 변질되어 사용불능일 경우, 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드립니다.
4. 본 보증서는 재발행되지 않으며, 국내 에서만 유효합니다.
5. A/S 및 문의처 : 1577-5195 / 055-323-5195

보증규정

고객께서 구입하신 본 제품에 대하여 아래와 같은 조건으로 보증하여 드립니다.

1. 보증기간
제품의 정상적인 상태에서 발생한 고장에 대하여 1년간 보증하여 드립니다.
2. 보증수리 제외사항
 - 1) 사용자의 취급부주의 및 조작의 잘못으로 인한 고장이나 파손
 - 2) 당사 지정 수리요원 외 제3자가 수리하였거나 부당한 수리개조에 의한 고장이나 파손
 - 3) 보증서를 분실 또는 수락 판매점의 직인이 없을때
 - 4) 천재지변에 의한 고장 및 파손
3. 보증기간 외의 수시
보증기간 경과 후의 수리 요청 시에는 소정의 기술료를 징수합니다.
4. 기타
본 보증규정 이외의 사항에 대하여는 "소비자 기본법"에 의거한 "소비자분쟁해결기준"에 의해 처리됩니다.