


### ◎ 사후관리(A/S)

- 무상보증기간은 구입일로부터 1개월이며 내구연한은 3개월입니다.
- 본 제품은 소모품으로 장기간 사용했을 경우 표면이 마모가 되어 성능이 저하되므로 마모가 되었을 경우에 무리한 사용은 하지마시고 재구매하여 주시기 바랍니다.
- 제품 개봉 후 파손이나 구성품이 없을 경우 교환 또는 환불해드리며 소비자 실수로 인한 파손에는 책임을 지지 않습니다.


### ◎ 품질보증서

품 명	미끄럼방지용품		
모 델 명	덧신S		
보증기간	구입일로부터 1개월		
구매일자			
<input type="checkbox"/> 고객	성 명		연락처
	주 소		
<input type="checkbox"/> 판매처	업체명		연락처
	주 소		

### ◎ 제품인증 및 성적서

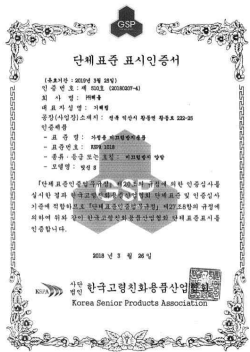

단체표준 표시인증서  
( 인증번호 : 제510호 )

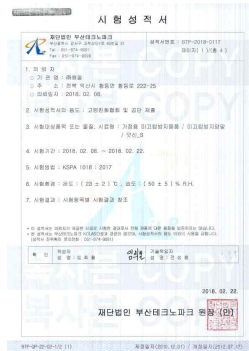

시험성적서  
( 시험번호 : STP-2018-0117 )



제조물생산책임보험

# 미끄럼방지용품 (양말)

## 덧신S



제품설명서는 반드시 읽으신 후 사용하시기 바라며 눈에 잘 보이는 장소에 두고 제품과 함께 보관 및 사용하시기 바랍니다.

## (주) 해 올



이용시간 : 평일 09:00~18:00  
전화 : 1688-8652 / 팩스 : 063-851-8653  
주소 : 전북 익산시 황등면 황등로 222-25

## ◎ 제품규격(사양)

모델번호	덧신S
구 성	1 켄레
색 상	노랑
사 이 즈	9.5*24*5.5cm
재 질	MELANGE FLEECE, 접밴드, 년슬립
중 량	약 27g

## ◎ 원단의 특징

- 가볍고 부드러우며 따뜻해 착용감이 우수합니다. 구김이 가지 않고 강도가 높으며 내약품성과 내열성이 우수하고 필링이 생기지 않아 관리하기 편합니다. 바람은 막아주고 공기는 안으로 통과시켜주며, 땀과 수증기는 밖으로 배출하여 쾌적함을 주는 기능성 원단으로 아기 및 어르신 섬유 제품에 적합하고, 촘촘한 직조로써 진드기가 살기 어려워 피부가 약한 분들이 사용하기에도 좋습니다.

## ◎ 기능 및 용도

- 바닥에 미끄럼 방지 처리가 되어 있어 일상생활에서 미끄러지기 쉬운 장소(장판, 마루바닥 등)에서 미끄럼사고를 예방 할 수 있습니다.
- 특히, 거동이 불편한 노인, 장애인 또는 기타 다리에 힘이 없거나 몸의 균형을 잡지 못하는 분들이 신으시면 좋습니다.
- 미끄럼방지를 위해 밑면을 내구성이 우수한 재질로 도트(DOT) 처리 하였습니다.

## ◎ 사용방법

- 미끄러지기 쉬운 장소, 거실, 방, 마루바닥, 공공장소 등에서 양말을 대신하여 신으시면 됩니다.
- ※ 사용전에 반드시 환자의 상태에 따라 수발자(간병인)의 도움을 받으시기 바랍니다.)

## ◎ 사용상의 주의사항 및 관리방법

- 제품의 사용용도 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 사용대상자의 신체상황에 따라 수발자(간병인)의 보호가 필요합니다.
- 사용대상자(고령자)가 사용 시 미끄러짐이나 낙상에 주의하여 주십시오
- 양말의 바닥은 항상 청결하게 유지시켜 주십시오  
(먼지나 오물 등이 바닥에 묻어있을 경우 미끄럼방지기능이 저하되거나 상실 할 수 있습니다.)
- 화기근처에 보관 및 사용은 하지 마시고 사용후 세탁이나 소독하시기 바랍니다.

## ◎ 세탁방법

- 30°C의 미온수에서 중성세제(울상푸 등) 손빨래를 하시고 염소표백제(락스등)을 사용하여 세탁하지 말아주세요. 또한, 세제 물에 오래 담가두시면 탈색 및 변색의 원이 될 수 있습니다.
- 다림질을 할 경우 바닥은 피해주시고 세탁 후 건조시 통풍이 잘되는 그늘에서 말리시기 바랍니다.(화기근처, 건조기, 뜨거운 햇볕에 직접 말릴 경우 미끄럼방지 기능이 크게 저하되거나 훼손될 수 있습니다.)

## ◎ 응급시 대처요령

- 사용중 미끄러져 넘어지거나 낙상이 발생했을 경우 가까운 병원에 연락하거나 응급구조를 요청하여 주시기 바랍니다.