

배포용

# [주]엔티바이오 미끄럼방지매트

## 사용 설명서



NT-3001

***New Technology for Bio-Solution***

(주)엔티바이오

# 알림

(주)엔티바이오의 미끄럼방지매트를 구입하여 주셔서  
진심으로 감사를 드립니다.

이 미끄럼방지매트는 노약자, 장애인 및 환자를 위한 고령친화제품으로서,  
사용방법에 대한 정확한 이해 없이 사용을 금합니다.  
사용설명서를 반드시 읽어 보시고 숙지하신 후에 사용하여 주시기 바랍니다.

## 사용목적

고령자의 경우, 신체의 약해짐과 인지능력 저하로 인하여 혹은, 거동이 불편한 경우  
보행 이동 시 침실, 주방, 욕실 등에서 미끄러짐에 의한 충돌 및 낙상사고가 발생하여  
경상 또는 심할 경우 중상으로까지 이어지는 경우가 발생 수 있습니다.

(주)엔티바이오의 미끄럼방지 매트는 이러한 부분을 고려하여 만들어진 제품으로 고객의  
안전을 최우선으로 생각합니다.

## 기능 및 용도


- ▶ 어느 바닥에서나 뛰어난 밀착 기능
- ▶ 단차로 인한 걸림 방지 효과
- ▶ 어디에나 어울리는 디자인
- ▶ 물 흐름을 차단하는 X자 무늬
- ▶ 강한 마찰력으로 미끄럼 방지

## ● 사용예

- ▶ 미끄러운 세면대 앞
- ▶ 변기 및 샤워부스
- ▶ 싱크대
- ▶ 화장실 입구
- ▶ 현관

### □ 제품사용(Specification)

모 델 명	NT-3001
구 성	미끄럼방지 매트
색 상	연두
사 이 즈	915 × 615 × 3mm ±5%
재 질	실리콘
중 량	약 3kg ±5%

	단체표준명(품명): 가정용미끄럼방지용품
	단체표준번호 : KSPA 1018
	인증번호 : 제683호(20200213-1)
	모델명 및 모델 고유번호 : NT-3001
	코드번호 :
	제조년월일 : 20 년 월
	제조사명 : (주)엔티바이오
A/S 전화번호 : (031)-532-5987~8	
제조국명 : 대한민국	
품질보증	
본 제품은 단체표준인증단체인 당 협회에서 단체표준제품임을 보증함	
(사)한국고령친화용품산업협회	

### □ 사용상의 주의사항

- ▶ 매트를 보관 시 반드시 세척 및 건조 후 보관합니다.
- ▶ 단차 부분이 상측이므로 상, 하를 정확히 구분하여 사용하시기 바랍니다.
- ▶ 세척 후에는 서늘한 그늘에서 말려 주시기 바랍니다.
- ▶ 보관 시 제품을 구부리거나 접지 마십시오.
- ▶ 표면 돌출부 마모 시 미끄럼방지 기능이 떨어지므로 매트를 교환하시기 바랍니다.
- ▶ 매트를 사용하기 전 바닥에 물기를 제거한 후 사용하시기 바랍니다.

# 현대해상 배상책임보험 1억원가입

## 품 질 보 증 서

당사의 제품은 국제규격 ISO 9001, 14001 및 국가  
공인시험기관(KOLAS) 시스템의 엄격한 품질 기준  
에 준하여 생산된 제품이므로 안심하고 사용하셔도  
좋습니다.

저희 (주)엔티바이오의 모든 제품은 1년 이내의 자체  
결함시 무상으로 A/S를 보장받을 수 있습니다.

(주) 엔티바이오 임직원 일동

성 명		연 락 처	
주 소			
구입일자		모 델 명	
구 입 처			

***New Technology for Bio-Solution***

(주) 엔티바이오

본사 : 경기도 포천시 가산면 정금로 255번길 4-49

고객문의 : 031)532-5987~8