


(주)엔티바이오 미끄럼방지용품(매트)

사용 설명서

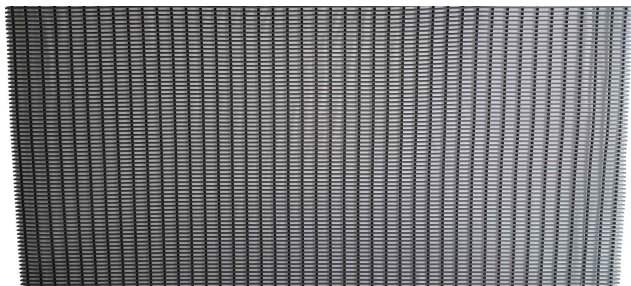

NT-3050

New Technology for Bio-Solution

(주)엔티바이오

(주)엔티바이오의 미끄럼방지용품(매트)를 구입하여 주신데 대하여
진심으로 감사를 드립니다.
이 미끄럼방지용품(매트)는 노약자, 장애우 및 환자를 위한 고령친화제품으로서,
사용방법에 대해 정확한 이해 없이 사용을 금합니다.
사용설명서를 반드시 읽어 보시고 숙지하신 후에 사용하여 주시기 바랍니다.

◎ 사용목적

고령자의 경우 신체의 약해짐과 인지능력 저하로 인해, 침실, 욕실, 주방 또는 거동이 불편한 경우 보행 이동 시 미끄러짐에 의한 충돌 및 낙상사고가 경상 또는 심할 경우 중상으까지 이어지는 경우가 빈번히 발생할 우려가 있습니다.
이를 방지하기 위해 제조된 (주)엔티바이오의 미끄럼방지용품(매트)는 이런 점을 고려하여 만들어진 제품으로 고객의 안전을 우선으로 생각합니다.

◎ 기능 및 용도

- ▶ 추위, 습기, 오일 등 산성에 강한 우수한 내구성.
- ▶ 일반 원통형보다 탁월한 쿠션감.
- ▶ 어느 공간과 잘 어울리는 디자인.
- ▶ 일반 원통에 내부에 삼각대 모양의 지지대를 설치함으로 탁월한 복원력과 내구성 등의 기능
- ▶ 강한 마찰력으로 미끄럼방지.

일반형과 엔티형의 비교의 예


기존형	누름전		누름후	
엔티형	누름전		누름후	

◎ 사용 예

- ▶ 미끄러운 세면대 앞
- ▶ 변기 및 샤워부스
- ▶ 싱크대
- ▶ 침대
- ▶ 욕실 베란다

◎ 제품사양(Specification)

모델명	NT-3050		
구성	미끄럼방지용품(매트)		
색상	진한회색, 밝은회색, 연두, 연보라, 청색, 황토색		
사이즈 (mm)	폭	길이	높이
	1210	2200	12.5
재질	PVC 외		
중량	약 8.5 kg		

	단체표준명(품명): 가정용미끄럼방지용품
	단체표준번호 : KSPA 1018
	인증번호 : 제553호(20180808-1)
	모델명 및 모델 고유번호 : NT-3050
	제조년월 : 2020.
	제조자명 : (주)엔티바이오
A/S 전화번호 : (031)-532-5987~8	
제조국명 : 대한민국	
품질보증	
본 제품은 단체표준인증단체인 당 협회에서 단체표준제품임을 보증함	
(사)한국고령친화용품산업협회	

* 계절의 따라 수축 변화를 ±2~3 변화가 생길 수 있음.

◎ 사용상의 주의사항

- ▶ 매트 사용시 상하를 구별하여 사용합니다.(구분법: 상측-컬러색상 /하측-검정색상)
- ▶ 매트 세척 후 건조시에는 서늘한 그늘에 말려 주시기 바랍니다.
- ▶ 바닥 노면 이 평평한 곳에서 사용하시기 바랍니다.
- ▶ 하부에 튜브 마모시 미끄럼방지에 기능이 떨어지므로 매트 교환을 권장합니다.
- ▶ 매트 사용 전 바닥에 물기를 제거하여 사용하시기 바랍니다.
- ▶ 바닥에 기름이 묻었을 시 매트가 미끄러질 수 있어 사용을 중지 하시기 바랍니다.

배상책임보험 1억원가입

품질보증서

당사의 제품은 국제규격 ISO 9001, 14001 및 국가 공인시험기관(KOLAS) 시스템의 엄격한 품질 기준에 준하여 생산된 제품이므로 안심하고 사용하셔도 좋습니다.

저희 (주)엔티바이오의 모든 제품은 1년 이내의 자체 결함시 무상으로 A/S를 보장받을 수 있습니다.

(주) 엔티바이오 임직원 일동

성명		연락처	
주소			
구입일자		모델명	
구입처			

New Technology for Bio-Solution

(주) 엔티바이오

본사 : 경기도 포천시 가산면 정금로 255번길 4-49

고객문의 : 031)532-5987~8