
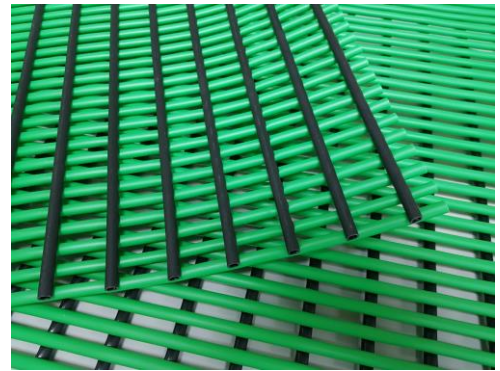


본 사용설명서를 모두 읽은 후 사용하시고 문의사항이 있을 경우 당사로 연락 주시기 바랍니다.

1. 제품사양

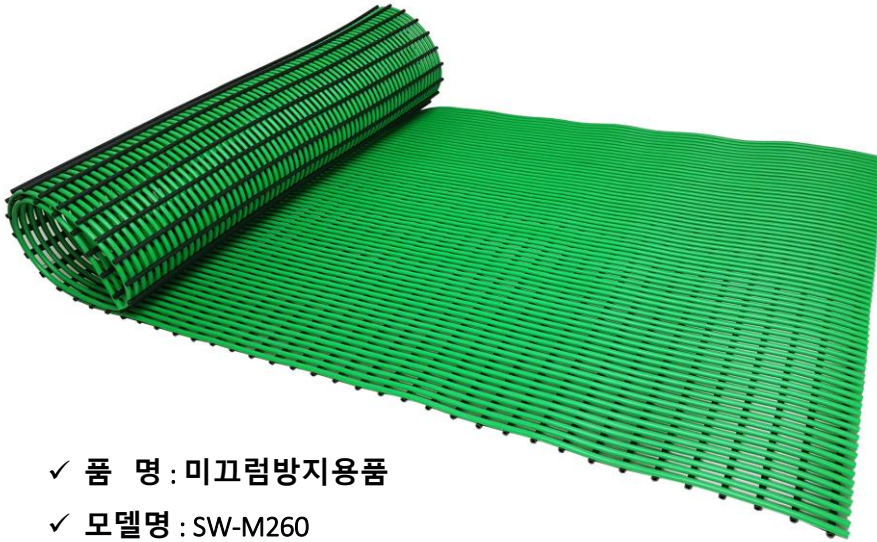

- ✓ 품 명 : 미끄럼방지용품
- ✓ 모델명 : SW-M260
- ✓ 사이즈(cm) : 260 X 100 X 1.4
- ✓ 무 게 : 7.7kg
- ✓ 주요재료 : PVC

2. 기능 및 용도

- 고령자 및 보호자가 욕실 이용 또는 목욕 시, 물기에 의하여 미끄러지는 사고를 예방하도록 만들어진 제품입니다.
 - 욕실, 화장실 등에 설치하시면 미끄러지는 사고를 예방할 수 있습니다.
 - 본 매트는 미끄러지기 쉬운 곳에 설치 하면 바닥면과의 미끄럼저항을 높여 주는 효과로 미끄럼사고 예방에 도움이 됩니다.
- ※ 고령자(사용자)의 신체상태나 상황에 따라 보호자와 협의하여 사용하시기 바랍니다.


3. 제품특징

- 튜브를 격자구조로 배치하여 슬리퍼를 신지 않아도 발이 찢지 않습니다.
- 접착제 등을 사용하지 않아 안전하게 사용 할 수 있습니다.

본 사용설명서를 모두 읽은 후 사용하시고 문의사항이 있을 경우 당사로 연락 주시기 바랍니다.

4. 사용시 주의사항

- 미끄럼방지 매트를 **설치할 장소의 바닥면의 이물질(물기, 먼지 등)을 제거하고 사용**하십시오.
- 바닥면이 평평한 곳에서 사용하십시오.
- 세척은 중성세제와 브러쉬(솔) 등을 이용해 세척하십시오.
- 검정색 튜브가 배수방향으로 향하게 설치해 주십시오.

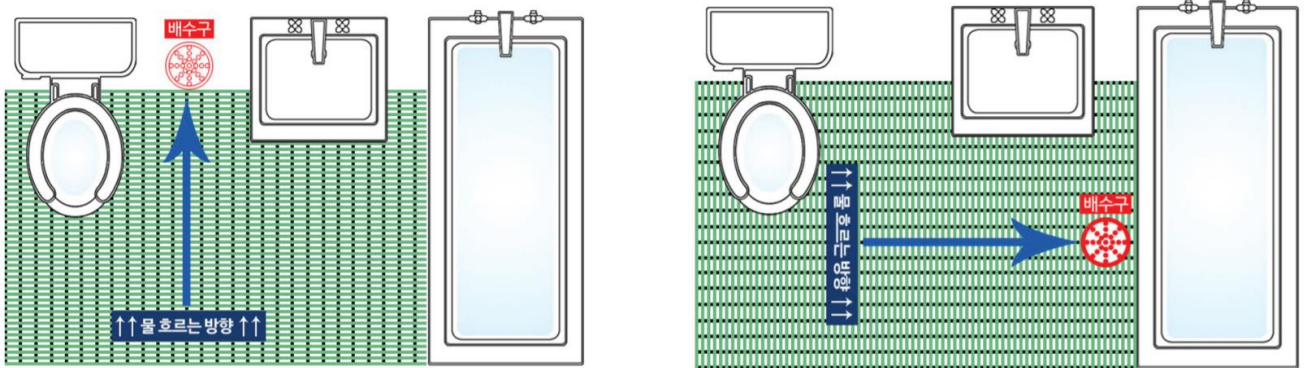

※ 매트를 사용하면 미끄럼에 의한 사고를 줄일 수 있지만, 반드시 미끄럼 사고 자체가 일어나지 않는다는 것은 아니므로 주의하여 사용하십시오.

5. 제품 A/S

- 본 제품은 소비자 피해보상규정에 의거하여, 교환 및 보상을 받을 수 있습니다.
- 사용자의 귀책사유로 인한 제품의 파손 및 훼손은 반품 및 교환이 불가합니다.
- 제품 불량인 경우, 구입 후 1년 이내 무상A/S처리가 됩니다.

6. 고객상담실 TEL. 031-323-1431

- 모델명: _____ / 구입일: _____년 _____월 _____일 / 보증기간: 구입일로부터 1년



- 단체표준명(품명): 가정용 미끄럼방지용품
- 단체표준번호: KSPA 1018
- 인증번호: 제648호
- 모델명 및 모델 고유번호: SW-M260
- 제조년월: 별도표기
- 수입자명: 주식회사 세원케어
- A/S 전화번호: 031-323-1431
- 제조국명: 대한민국

품질보증

본 제품은 단체표준인증단체인 당 협회에서 단체표준제품임을 보증함
(사)한국고령친화용품산업협회



안전인증번호: B671H016-19001

- 제조원: (주)세원케어
- 주소: 경기도 용인시 처인구 남사면 천덕산로 428번길 63
- 연락처: 031-323-1431