

# 다족지팡이 (SKL-020)

## 사용설명서

본 제품을 사용하기 전 반드시 사용설명서를 읽은 후 사용하시고, A/S 및 사용방법, 주의사항을 위하여 설명서를 보관하시기 바랍니다.

### 각부의 명칭



### 제품 기본 사양

크 기	손잡이 높이 조절	72 ~ 95 cm
색 상		칼라 ( M형, W형 )
무 게	중 량	700g
	최대 사용자 무게	100kg
재 질	Body	알루미늄 합금
	사발지지대	도 장

### 사용방법

1. 접어진 다족지팡이의 고정너트를 왼쪽으로 두바퀴 정도 돌려서 약간 풀어 준 다음
2. 높이 조절용 버튼을 눌러 사용자가 편한 높이로 버튼을 구멍으로 이동시켜 줍니다.  
(일반적 높이기준) 사용자가 똑바로 선 자세에서 손바닥이 끝나는 지점의 높이만큼 그립(손잡이)를 맞춥니다.
3. 버튼을 조정할 시 **본체의 사발이 각도가 적은 쪽이 대상자의 몸쪽으로 향하게** 하여야 합니다.(그림 참조)



- 버튼이 구멍 밖으로 완전 돌출 되었는지 육안으로 확인하고 “딸깍” 소리도 반드시 확인하셔야 합니다.
- 손잡이 높이 조정이 완료되면 조정 전에 풀었던 고정넛트를 오른쪽으로 돌려서 넛트를 잠근 후 사용합니다.  
(고정넛트를 잠근 후 사용하셔야 이동 간 지팡이 착지 시 소음이 발생하지 않습니다.)

### 보관방법 및 주의사항

- 버튼 조절시 버튼이 밖으로 완전 돌출되었는지 육안으로 확인하고 “딸깍” 소리도 동시에 확인합니다.
- 반드시 네발의 고무가 수평면에 착지 되었는지 확인하시기 바랍니다.
- 최대한 평탄길이나 실내에서 사용하고 네발 중 한발이라도 경사지거나 수평이 되지 않으면 옆으로 미끄러져 넘어 질 위험이 있으므로 사용을 주의하셔야 합니다.
- 본 제품에 전체 체중을 실지 말고 사용하시기 바랍니다.
- 보행 시 환기구나 노면 등에 끼이지 않도록 주의하시고 사람을 향해 휘두르는 등 강한 물리적 압력 등이 가해지지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- 다음 사용을 위하여 이물질 등을 제거하고 손잡이 끈을 이용하여 벽면 등에 걸어두고 보관하면 편리합니다.

### ※ 간단한 제품 이상시 처리 방법 ※

- 버튼이 완전히 밖으로 돌출 되었는지 확인합니다.
- 버튼의 고정 너트가 완전히 잠겼는지 확인합니다.
- 받침고무의 노후 상태를 확인합니다. (즉시 교환)

### 사후관리 (A/S)

- A/S범위 : 소모성부품 유상 <기능성부품무상보증 1년>
- 접 수 처 : 현품 소비자 구입처 또는 직영영업점  
 소비자지원팀 : 051)325-5100 (09시~17시)  
 Homepage : [www.skywheel.co.kr](http://www.skywheel.co.kr)  
[www.건강한백세.kr](http://www.건강한백세.kr)  
 E-mail : [samwonsky@hanmail.net](mailto:samwonsky@hanmail.net)

※ 본 제품은 생산물배상책임보험(P/L)에 가입되어 있습니다.



고령친화용품 전문제조업체

**삼원스카이**

TEL. 051-325-5100  
FAX. 051-325-5101

**SAMWONSKY**

Homepage : [www.skywheel.co.kr](http://www.skywheel.co.kr) | E-mail : [samwonsky@hanmail.net](mailto:samwonsky@hanmail.net)  
[www.건강한백세.kr](http://www.건강한백세.kr) | 부산시 사상구 가야대로176번길 32(학장동)