

## 품질보증서

## 제품사진



제조원 : 나래의로기 김포점  
 주 소 : 경기도 김포시 양촌읍 황금로 117, 메카존 602호  
 전 화 : 070-7762-1213 / 팩 스 : 02-6442-2249

### 4. 품질보증서

#### 1) 수리/교환/환불

- 품질보증기간은 구입일로부터 12개월입니다.
- 교환 및 반품은 구입일로부터 7일 이내입니다.
- 소모품 교환 및 구매는 구입처 또는 본사로 문의하시기 바랍니다.
- 제품의 하자 및 이상이 있으면 구입처 또는 본사로 문의하시기 바랍니다.
- 소비자 취급 부주의 또는 품질 보증 기간이 지난 제품은 본사에서 책임지지 않으며 수리비가 청구될 수 있습니다.
- 본 제품은 소비자 피해 보상 규정에 따라 교환 및 보상을 받을 수 있습니다.
- 본 제품은 생산물 배상책임 보험에 가입되어 있습니다

제품명	지팡이
모델명	나래-1000
구입일자	
성명	
주소	



# 나래-1000

## 제품 사용 설명서



## 제품정보

## 사용방법

## 주의사항

### 1. 제품정보

제품명	지팡이	
모델명	나래-1000	
구성품	지팡이 본체	
	사용설명서	
크기	수납길이	45.4cm ± 1cm
	조절범위	74.5~97.0cm ± 1cm
중량	295g±15g	
적정하중	100Kg	
재질	본체상단: 알루미늄	본체 중단,하단: 두랄루민
	손잡이: 플라스틱	고무팁: 합성고무
원산지	대한민국	

### 2. 사용방법



- 고정 장치의 커버를 위로 당긴다.
- 커버를 당긴 상태에서 하단 파이프를 원하는 길이로 조절한다.
- 당기고 있던 커버를 제자리로 위치시켜서 고정 장치가 파이프 홀에 고정되도록 한다.
- 알맞은 지팡이길이 결정방법: 지팡이 끝을 같은쪽 발끝의 앞쪽바깥 방향 20cm에 두고 팔꿈치는 30~40° 굴곡한 위치가 좋고 이 상태에서 지팡이의 길이를 결정한다.

### 3. 주의사항

- 사용 설명서를 반드시 읽은 후 보관하십시오.
- 사용 전 제품의 고정 부분에 이상이 없는지 확인 후 사용하십시오.
- 제품이 정확하게 고정되었는지 확인하고 사용하십시오.
- 지팡이 중단부 하단부의 정지선(STOP)을 넘어 사용하지 마십시오.
- 미끄러지기 쉬운 노면 등에서의 사용을 주의하십시오.
- 제품을 개조해서 사용하지 마십시오.
- 사용자의 안전을 보장하는 제품이 아닌, 보조기구입니다. 용도 이외로는 절대 사용하지 마십시오.
- 사용 후 보관하실 때에는 마른 걸레로 제품의 오염물질과 물기를 깨끗이 닦아 보관하십시오.

- 제품을 습하거나 온도 차가 많은 곳에서 보관 또는 사용하신 경우, 결로 현상이 발생하여 제품에 부식이 일어날 수 있습니다.
- 이는 제품 고장의 원인이 될 수 있으므로 제품 사용 후 윤활유(구리스 등)를 발라 건조한 곳에 보관해 주십시오.
- 제품 끝 고무가 부서지거나 마모되는 등의 이상이 있는 경우 교환 후 사용하십시오.
- 제품 특성상 제조(아노다이징 등) 및 조립 과정에서 스크래치, 얼룩 등이 발생할 수 있습니다.
- 제품에 이상이 있는 경우, 제품 사용을 즉시 멈추시고 구입처 또는 본사로 연락하십시오.