



제조원 : 나래의료기 김포점
주 소 : 경기도 김포시 양촌읍 황금로 117, 메카존 602호
전 화 : 070-7762-1213 / 팩 스 : 02-6442-2249

품질보증서

제품사진

4. 품질보증서

1) 수리/교환/환불

- 품질보증기간은 구입일로부터 12개월입니다.
- 교환 및 반품은 구입일로부터 7일 이내입니다.
- 소모품 교환 및 구매는 구입처 또는 본사로 문의하시기 바랍니다.
- 제품의 하자 및 이상이 있으면 구입처 또는 본사로 문의하시기 바랍니다.
- 소비자 취급 부주의 또는 품질 보증 기간이 지난 제품은 본사에서 책임지지 않으며 수리비가 청구될 수 있습니다.
- 본 제품은 소비자 피해 보상 규정에 따라 교환 및 보상을 받을 수 있습니다.
- 본 제품은 생산물 배상책임 보험에 가입되어 있습니다

제 품 명	지팡이
모 델 명	나래-4000
구 입 일 자	
성 명	
주 소	



접었을때

펼쳤을때

나래-4000

제품 사용 설명서



제품 정보


사용 방법

주의 사항

1. 제품 정보

제 품 명	지팡이
모 델 명	나래-4000
구 성 품	지팡이 본체 사용설명서
크 기	수납길이 : 63.5cm(±1cm) 조절길이 : 75~95cm(±1cm)
중 량	547g(±10g)
적정하중	80Kg이하
재 질	본체 상단, 하단 : 알루미늄 네 발 : 두랄루민 고무팁 : 합성고무 손잡이 : 플라스틱
원 산 지	대 한 민 국

2. 사용 방법

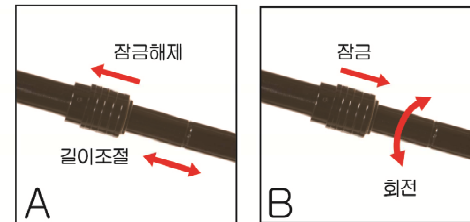

- 고정 장치의 캐버를 위로 밀린다.
- 캐버를 뒷면 상단에서 하단 피아프를 원하는 길이로 조절한다.
- 원하는 길이에 맞게 조절하여 홈에 고정장치를 위치시킨 후 당기고 있던 캐버를 놓고 하단피아프를 회전시키면 "딸깍"하는 소리와 함께 고정 장치가 하단피아프 홈에 고정된다.
(길이조절 후 하단피아프를 회전시켜서 회전이 되면 고정장치가 완전히 걸림되지 않은 것이니 다시 고정시킨 후 사용한다.)
- 알맞은 지팡이길이 결정방법: 지팡이 끝을 같은쪽 발끝의 안쪽비갈 방향 20cm에 두고 팔꿈치는 30~40° 굴곡한 위치가 축고 이 상태에서 지팡이의 길이를 결정한다.

3. 주의사항

- 사용 설명서를 반드시 읽은 후 보관하십시오.
- 사용 전 제품의 고정 부분에 이상이 없는지 확인 후 사용하십시오.
- 제품이 정확하게 고정되었는지 확인하고 사용하십시오.
- 지팡이 길이 조절시 하단부의 재일 위 홈 이상으로 빠지지 마십시오.
- 미끄러지기 쉬운 노면 등에서의 사용을 주의하십시오.
- 사용 시 제품에 무리한 힘이나 하중, 충격을 가하지 마십시오.
- 제품을 개조해서 사용하지 마십시오.
- 사용자의 안전을 보장하는 제품이 아닌, 보조기구입니다.
용도 이외로는 절대 사용하지 마십시오.
- 사용 후 보관하실 때에는 마른 길레로 제품의 오염물질과 물기를 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 제품을 습하거나 온도 차가 많은 곳에서 보관 또는 사용하신 경우, 결로 현상이 발생하여 제품에 부식이 일어날 수 있습니다.
- 이는 제품 고장의 원인이 될 수 있으므로 제품 사용 후 윤활유(구리스 등)를 발라 건조한 곳에 보관해 주십시오.
- 제품 끝 고무가 부서지거나 마모되는 등의 이상이 있는 경우 교환 후 사용하십시오.
- 제품 특성상 제조(아노다이징 등) 및 조립 과정에서 스크래치, 얼룩 등이 발생할 수 있습니다.
- 제품에 이상이 있는 경우, 제품 사용을 즉시 멈추시고 구입처 또는 본사로 연락하십시오.