

의료용 압력분산 매트리스(욕창예방방석)

브릭에어쿠션 NSBS-BM1416

Brick Air Cushion (브릭에어쿠션) 욕창 예방방석



제품의 특징


상하층이 분리된 이중 구조의 공기 주머니



상층부 대비 하층부의 공기 셀 1:4구조로 낙상 방지 기능 사용자의 몸무게 및 바닥면의 반발력을 제어하는 양방향

압력분산 및 상층부의 공기 유출로 인해 발생할 수 있는

공기 자동유입식

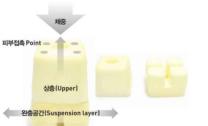

내부 충전제 기능 및 구조적 차별성 밀도와 통기성이 우수한 기능성 충전제 및 내부충전체의 접촉 포인트의 최소화 한 구조를 개선하여 환자의 편의성 개선

친환경 소재





구성이 강하여 마모가 잘 되지 않는 질로, 신발의 밑창 소재로 사용되어 틀림을 방지하고 충격을 흡수해주는

TPU 소재 활용 및 후처리가공을 통한 이물질로 인한 오염 시 세척이 쉽고 청결 유지가 용이함

제품의 사용방법

2차 피부손상(욕창) 예방 기능



01 쿠션 벨브가 잠겨있는 상태에서 02 벨브를 열어서 공기를 사용자가 편한 자세로 앉는다.



천천히 뺀다.



03 조절이 끝나면 벨브를 잠근다.



04 재사용시 벨브를 열어서 공기를 주입한 뒤 벨브를 잠근다.

욕창이란?

신체 일부에 정상 혈액순환보다 높은 압력이 장시간 지속적으로 가해져 발생 하는 질병

제품의 상세정보



NSBS-BM1416 구성품

본품, 방석커버, 수리용 패치, 소독솜

품목명 : 의료용 압력분산 매트리스 (욕창예방방석) | 제품무게 : 1800g(±100) 모델명: NSBS-BM1416 | 제조사명:㈜엔에스비에스

등급: 2등급 | 원산지: 대한민국 | 사이즈: 420×420×65(mm) 권장적정공기압 : 몸무게 및 접촉부위의 욕창진행속도에 따라 변함

NSBS-BM1416 스펙







[의료기기 제조업 허가증]



[디자인 등록증]



[고령친화우수제품지정서] (bm1416)

제품의 관리정보



따뜻한 물에 중성세제를 사용하여 제품을 부드럽게 닦으며 세척





절대로 사용하지 말고 반드시 손 세탁



직사광선, 열기구 및 날카로운 것으로부터 피하고 편평하게 펴서 상온 보관



장기간 사용하지 않을 경우 공기를 배출시키고 제품박스에 담아 보관

제품의 주의사항

- 01 정해진 용도로만 사용하며 적정 공기압을 유지합니다.
- 02 히터 등 전열기구로부터 제품을 멀리합니다.
- 03 사용 중 또는 보관 시 제품의 표면에 날카로운 것이 닿지 않도록 주의합니다.
- 04 보관 및 사용 시 직사광선을 피합니다.
- 05 사용 후 제품의 표면에 이물질이 없도록 청결하게 유지합니다.
- ※ 방석 세척시 꼭! 밸브를 잠그고 세척해주세요!!!

제 품 보 증 서

품 명 의료용 압력분산 매트리스 (욕창예방방석)

제 품 명 NSBS-BM1416

모델명(형명

구 입 일 자 20 년 월 일

그 객

구 입 처 명

전 화 번 호

※ 본 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다. 아래와 같이 보증합니다.

- 1) 본 제품의 이상 발생 시 보증기간 (구입후 1년)동한 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
- 2) 본 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 실비로 수리를 받을 수 있습니다.

THE SERVICE OF THE SE

- 3) 제품에 이상이 발생한 경우 구입처 및 A/S센터에 연락하셔서 보증서를 제시한 후 서비스 받으시길 바랍니다.
- 4) 위 보증서의 성명, 구입처 명, 구입일자, 전화번호 등이 기재되지 않으면 무효입니다.
- 5) 수리, 교환, 환불등의 보상방법은 재정경제부 고시 소비자 분쟁해결기준으로 합니다.
- 6) 소비자의 취급 부주의 또는 임의로 개조하여 고장 발생시는 보증기간 내라도 무료서비스를 받을 수 없습니다.
- 7) 다음의 경우에는 보증기간 중일지라도 실비를 받습니다.
- 제품 보증서의 제시가 없을 경우
- 사용자의 취급 부주위로 인한 고장
- 천재지변(화재, 염해, 수해, 기타)으로 인한 고장

보증기간

보 증 기 간 2년

무상보증기간 1년

홈 페 이 지 www.nsbs.co.kr

연 락 처 031-965-7989

F A X 0505-310-7989

제 품 문 의 처 경기도 고양시 일산동구 동국로32 동국대학교 산학협력관 504호

- ※ 본 제품은 생산물 배상 책임보험에 가입 되어있습니다.
- ※ 제품에 이상이 발생 시 제품 구입처나 본사로 연락 주시길바랍니다.



'주)엔에스비에스

경기도 고양시 일산동구 동국로32 동국대학교 산학협력관 504호

tel 031-965-7989 fax 0505-310-7989

e-mail gkfl120@nate.com
web http://www.nsbs.co.kr

- · 제 조 인 증 번 호 : 제인 16-4659호
- · 제조업허가번호 : 제5437호

- 본제품은 의료기기 입니다.
- · 제품설명서를 반드시 읽고 보관하여 주십시오.



의료용 압력분산 매트리스(욕창예방방석)

브릭에어쿠션

NSBS-BM1416



(주)엔에스비에스