

사용설명서

교환 및 반품이 가능한 경우

- ▶ 상품 및 서비스를 공급 받으신 날로부터 7일 이내
- ▶ 재화등의 내용이 표시, 광고내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우

교환 및 반품이 불가능한 경우

- ▶ 이용자에게 책임있는 사유로 재화등이 멸실 또는 훼손된 경우
- ▶ 이용자의 사용 또는 일부 소비에 의하여 재화등의 가치가 현저히 감소한 경우

A/S 내용 및 기간

- ▶ 제조상의 결함 - 보증기간 내 무상 A/S
- ▶ 사용자의 부주의 - 유상 A/S
- ▶ 무상 A/S - 1년
(사용자의 부주의로 인한 파손이나 훼손 시 사용자가 비용 일부 부담)

소비자 피해보상

- ▶ 소비자 피해보상 내용

- 본 제품은 소비자 피해보상 규정에 의거하여, 교환 및 보상을 받을 수 있습니다.

※ 본 설명서를 읽고 나신 후 제품을 사용하여 주시고, 기타 궁금한 사항이 있을시에는 당사로 연락주시기 바랍니다.

본사 : 서울 서대문구 성산로 263 (연희동)

A/S 및 소비자 상담 : 1661-0555

<http://www.yhmedical.co.kr/>

REV. 1 / 2016. 06. 09.

천연 라텍스
YH-LA32



천연 라텍스
YH-LA31



천연 라텍스
YH-LA33



4h YH MEDICAL
(주)영화의료기

제품명

자세변환용구 (YH-LA31), 자세변환용구 (YH-LA32), 자세변환용구 (YH-LA33)

종류

자세변환용 라텍스 삼각쿠션

제조국/원산지

한국

제품구성

쿠션 - 1EA
속카바 - 1EA

걸카바 - 1EA
설명서 - 1EA

제품사양

■ 자세변환용구 (YH-LA31)

중 량	1.35 Kg ±10%
재 질	내장재 - 천연 라텍스 내장재(속카바) - 패브릭 외장재(걸카바) - 면 100%
사이즈 (±10%)	가로 - 500mm 세로 - 320mm 높이 - 180mm

■ 자세변환용구 (YH-LA32)

중 량	1.6 Kg ±10%
재 질	내장재 - 천연 라텍스 내장재(속카바) - 패브릭 외장재(걸카바) - 면 100%
사이즈 (±10%)	가로 - 800mm 세로 - 320mm 높이 - 130mm

■ 자세변환용구 (YH-LA33)

중 량	1.75 Kg ±10%
재 질	내장재 - 천연 라텍스 내장재(속카바) - 패브릭 외장재(걸카바) - 면 100+양모
사이즈 (±10%)	가로 - 600mm 세로 - 400mm 높이 - 130mm

제품특징

- ▶ 거동이 불편한 노인 및 장애인의 등, 허리, 다리 용 쿠션
- ▶ 라텍스 재질 특유의 체압분산효과를 이용하여 접촉부위의 압박을 최소화시킴
- ▶ 인체구조에 맞는 형태와 천연라텍스의 사용으로 거동이 불편한 환자가 장시간 사용하여도 쿠션의 재질 변성이 적으며 천연라텍스의 항균기능으로 위생적임

사용상 주의사항

- ▶ 화기 근처에 방치하지 마십시오.
제품의 손상 및 화재의 위험이 됩니다.
- ▶ 젖은 상태로 사용하지 마십시오.
- ▶ 사용자의 신체상황에 따라 필요한 경우 보호자는 지속적으로 사용환경을 관찰 하십시오.
- ▶ 손상된 피부에는 사용하지 마십시오.
- ▶ 이물질에 오염이 되었을 경우 즉시 세척하십시오.
변색될 수 있습니다.

제품의 보관 및 관리

제품은 통풍이 잘되는 서늘한 곳에 보관하십시오.