


# EM500 트렁크 30cc




패드 (안쪽면)



## • 패드구성

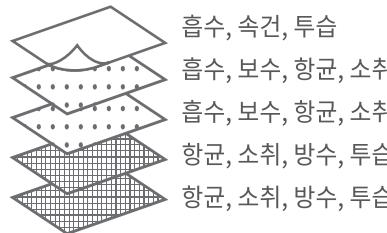

- 사이즈 95 / 100 / 105
- 흡수량 30cc
- 소재 면100%
- 패드표면- 폴리에스터100%

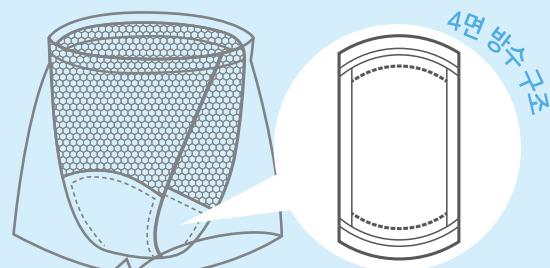

항균, 소취 가공한 방수필름과 원단을 라미네이트한 방수원단을 사용하여 2차적인 새어나감을 방지했고, 얇고 신축성이 높으며, 아트봉제를 적용해 다양한 움직임에도 뒤틀림 없이 편안합니다.

## 이런 분에게 추천합니다!

외출 시 요실금이 걱정인 분

화장실에 자주 가거나 기침, 재채기할 때 요실금이 있는 분



- 단체표준명: 요실금팬티
- 단체표준번호: KSPA1014
- 인증번호: 제 708호 (20200211-2)
- 모델명 및 모델 고유번호: EM500 트렁크 30cc
- 제조년월: 별도표기 · 제조자명: (주)안앤락
- A/S전화번호: 02-6671-1101 · 제조국명: 한국

## 품질보증

본 제품은 단체표준인증단체인 당 협회에서 단체표준 제품임을 보증함  
(사)한국고령친화용품산업협회

품 명 :  
제조사 :  
제품명 :



T000000000000-210100000000

→ 제품코드

→ 제조년월

※본 제품에 부착된 바코드는 제조년월을 표기하고 있습니다

## 사용 시 주의사항

1. 새 제품은 세탁 후 착용하시기 바랍니다.
2. 사용자의 신체 사이즈에 맞게 착용하시기 바랍니다.
3. 과도하게 늘릴 경우 제품 손상의 원인이 되므로 주의하시기 바랍니다.
4. 날카로운 물건에 제품 표면이 찢어지거나 손상이 되지 않도록 주의하시기 바랍니다.
5. 약 100회의 세탁까지 패드 기능이 유지되오니 참고하시기 바랍니다.
6. 세탁하지 않고 장시간 착용할 경우 피부에 트러블이 발생할 우려가 있습니다.
7. 착용 후에는 반드시 세탁하여 재 착용하시기 바랍니다.
8. 사용자를 위해 주기적으로 세탁하여 청결함을 유지하시기 바랍니다.
9. 화기와 가까운 곳 또는 습한 곳에 보관하지 마시기 바랍니다.
10. 세탁시주의사항을 먼저 읽어보신 후 알맞은 방법으로 세탁하시기 바랍니다.

## 세탁 시 주의사항

1. 섬유 유연제 사용 시 특수 패드 원단의 기능이 저하될 수 있습니다.
2. 40°C 이하의 미지근한 물에 30분 ~1시간 정도 담가둔 후 세탁비누 또는 중성세제를 사용하여 손세탁하시기 바랍니다.
3. 세탁 후 세제나 소변 잔여물이 남아있을 경우 패드 기능 저하나 냄새가 날 수 있으니 깨끗한 물에 여러 번 헹구어주시기 바랍니다.
4. 오염되었을 경우 변색의 원인이 될 수 있으니 가급적 빨리 세탁하시기 바랍니다.
5. 세탁기 사용 시 반드시 세탁망에 넣어 세탁하시기 바랍니다.
6. 건조기 및 다리미 사용을 하지 마시기 바랍니다.
7. 뜨거운 물에 삶거나 제품을 심하게 비틀어 짜지 마시기 바랍니다.
8. 염소계 표백제 사용을 하지 마시기 바랍니다.
9. 제품이 물에 젖었을 경우 세탁하여 그늘에서 건조하시기 바랍니다.
10. 다른 제품과 함께 세탁하지 마시고 단독 세탁하시기 바랍니다.

## 품질보증서

- 수리 의뢰 시 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 규정된 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시길 바랍니다.
- 무상보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 판매점 등에서 구입 일자를 기재 받으시길 바랍니다.
- 구입일자 미기재 및 확인이 곤란한 경우 제조 년월일로부터 3개월이 경과한 날을 기준으로 품질 보증 기간을 기산합니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다.

모델명 :

구입일 : 년 월 일 | 보증기간 : 구입일로부터 1년

고객명 : | 전화번호 :

주 소 :



LONG TERM CARE  
노인장기요양보험



특허 제 10-1688837호



119



ISO - 9001

(주)안앤락 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 108, 1206호(가산동, 뉴티캐슬) / 소비자상담실 : 02-6671-1101

[www.beneluv.com](http://www.beneluv.com)